

# Katarakt

Produktkatalog



## INHALTSVERZEICHNIS

---

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <b>Stellaris® Plattform</b> .....                    | 4  |
| Stellaris® Plattform Anterior System / Zubehör ..... | 5  |
| <b>Setup</b> .....                                   | 6  |
| Operieren mit Stellaris Elite™ .....                 | 8  |
| Packs für Stellaris Elite™.....                      | 14 |
| Phakonadeln .....                                    | 18 |
| Anteriore Vitrektomie .....                          | 19 |
| <b>Intraokularlinsen</b> .....                       | 20 |
| Übersicht hydrophobe Intraokularlinsen .....         | 22 |
| Übersicht hydrophile Intraokularlinsen .....         | 23 |
| Zubehör.....                                         | 33 |
| <b>Viskoelastika</b> .....                           | 34 |
| <b>Intraokulare Färbemittel</b> .....                | 38 |
| <b>Einmalinstrumente</b> .....                       | 42 |
| Kanülen .....                                        | 44 |
| Messer .....                                         | 49 |
| I/A Handstücke .....                                 | 54 |
| Manipulator und Lidsperrer .....                     | 60 |
| Pinzetten .....                                      | 61 |
| Bipolarstifte .....                                  | 62 |
| Zubehör .....                                        | 63 |
| <b>Über Bausch+Lomb</b> .....                        | 64 |
| <b>Index</b> .....                                   | 66 |

Stellaris Elite™ - Ihre neue Partnerin im OP

Ob zur Behandlung von Katarakten oder für den Einsatz im vitreoretinalen Bereich – Stellaris Elite™ ist dafür geschaffen, Spitzenleistungen zu ermöglichen. Sowohl die Ausführung als Phakogerät als auch das kombinierte System bestechen durch innovative Features, welche die Patientensicherheit, einen effizienten Ablauf sowie eine optimale Unterstützung Ihrer individuellen OP-Technik in den Fokus stellen.

Entwickelt für die Zukunft

Stellaris Elite™ ist das Resultat der langjährigen Geräteexpertise von Bausch + Lomb und überzeugt mit Technologien, die nicht nur heutigen Anforderungen entsprechen, sondern für die Zukunft bereit sind. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit der Stellaris® Plattform sowie die Expertise unserer Mitarbeiter. Gemäß unserem Leitsatz „See Better. Live Better“ verpflichten wir uns zu höchsten Qualitäts- und Servicestandards, um für Sie und Ihre Patienten beste Resultate zu erzielen.



ADAPTIVE FLUIDICS™

- Verbesserte Vorderkammerstabilität**  
durch minimierte IOD Schwankungen, u.a. minimierter Post-Okklusions-Sog
- Weniger Belastung für das Auge**, da bei inaktivem Vakuum kein hoher IOD entsteht - schont die Cornea, und ist angenehmer für den Patienten
- Erhöhte Sicherheit**  
durch verschiedene Reflux-Modi: Continuous, Single High, Single Low



ATTUNE® PHAKO

- Sechs effiziente Piezokristalle**
- 150 µm Bewegung der Nadel, longitudinal
  - mechanisches Schneiden und Kavitation
- Sicherer 28,5 kHz Ultraschall**
- Geringe Wärmeentwicklung
  - Anti Corneal Burn



KABELLOSER DUAL LINEARER FUSSSCHALTER

- Schnelle Ansprache
- Individuelle Programmierung
- Optimale Kontrolle



JETZT QR-CODE SCANNEN

Weitere Informationen und Inhalte auf der Stellaris Elite™ Produktwebsite finden Sie neben begleitenden wissenschaftlichen Beiträgen, unter anderem Erfahrungsberichte sowie weiterführende Produktvideos zu dem Equipment Portfolio von Bausch + Lomb.



Stellaris Elite™ Anterior System  
BL11145

Stellaris Elite™ Kombiniertes System (mit Laser)  
BL15455

Stellaris Elite™ Kombiniertes System (ohne Laser)  
BL14455

Fußschalter Stellaris Elite™  
BL2394

Fußschalterbatterie  
100027051

Wandladegerät für Fußschalter  
BL4391

Fußschalter Ladestation  
BL4393

Netzkabel für Fußschalter  
BL4394

Stellaris Elite™ Zero Level Bottle  
Hanger - Dual Bottle  
BL4363



= 1



Stellaris® Mayo Tray Adapter  
BL4364



= 1



Stellaris® Phakohandstück  
BL3170



= 1

Stellaris® Fragmentationshandstück  
BL3270



= 1

Stellaris® Fragmentationsnadel 15°  
20G BL5275



= 6



Stellaris® Fragmentationsnadel 30°  
23G BL5277



= 6



BALANCED SALT SOLUTION

500 ml Plastikflasche  
BSS-10PK



= 10



500 ml Glasflasche  
AQ500G



= 12

# Setup




OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: < 2.0 mm

ZUBEHÖR


Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt

SUB7596

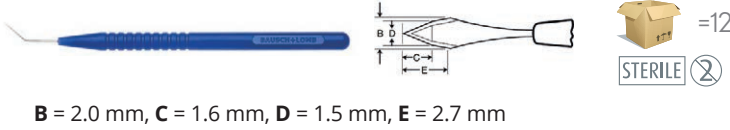

MICS Nadel 2,0

BL3420S

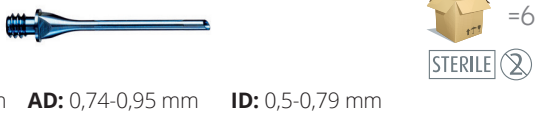

EQUIPMENT

Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Pack

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

BL5115-3

Bestandteile:

- |                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber® | <b>E</b> Testkammer                      |
| <b>B</b> Nadelschlüssel                                                     | <b>F</b> Nadeleinheit zum Vorstechen     |
| <b>C</b> 21G COOLFLOW Sleeve                                                | <b>G</b> Mayo Tray Abdeckung             |
| <b>D</b> Verschlussstopfen                                                  | <b>H</b> Bildschirmabdeckung             |
|                                                                             | <b>I</b> Abdeckung für die Fernbedienung |
|                                                                             | <b>J</b> MICS™ Nadel 2,0                 |

Hydrodissektionskanüle

25G SD5037/10



1,8 mm Sleeves

BL3118



< 2.0 mm



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: < 2.0 mm

VISKOELASTIKA

AMVISC® PLUS

60081L

- Besonders für MICS-Techniken geeignet
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche  
BSS-10PK



FÄRBMITTEL

BLutein™ Phaco Lutein

DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 43.


INTRAOKULARLINSEN

Akreos® Adapt AO

ADAPTAOP  
AO60PLC

- Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast
- Geeignet für kombinierte Kapselsack-/Sulkus-Implantation
- Hydrophile (preloaded) IOL für 1.8 mm Inzision

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.

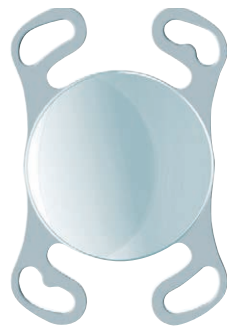

INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf [www.storzeye.eu](http://www.storzeye.eu)



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS


Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.


OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.2 mm

ZUBEHÖR

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt  
SUB7601

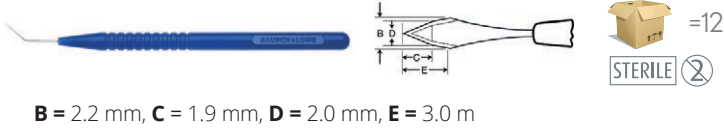

Microflow Nadel 30°

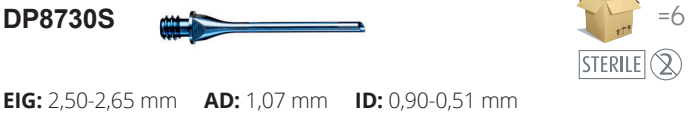

EQUIPMENT

Adaptive Fluidics™ Basic Pack

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

BL5115-4

- Bestandteile:
- |   |                                         |   |                                 |
|---|-----------------------------------------|---|---------------------------------|
| A | Sammelbehälter, standard Schlauchsystem | E | Testkammer                      |
| B | Nadelschlüssel                          | F | Nadeleinheit zum Vorstechen     |
| C | MICS™ Sleeve (1,8)                      | G | Mayo Tray Abdeckung             |
| D | Verschlussstopfen                       | H | Bildschirmabdeckung             |
|   |                                         | I | Abdeckung für die Fernbedienung |

Hydrodissektionskanüle



2,2 mm Sleeves



2.2 mm



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.

Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf [www.storzeye.eu](http://www.storzeye.eu)



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.2 mm

VISKOELASTIKA

AMVISC®

59081L

- Indiziert für Standard Katarakt OPs
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche  
BSS-10PK



FÄRBEMITTEL

BLutein™ Phaco Lutein

DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 43.

500ml Glasflasche  
AQ500G



INTRAOKULARLINSEN

LuxSmart™ & LuxGood™

YSMART / YSMARTT / SMART & YGOOD / GOOD

- IOL Plattform - (Torische) EDOF & Monofokale IOL
- Einfaches Preloaded System
- Mit & ohne Violettlichtfilter

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich Ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.4 mm

ZUBEHÖR

**Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig**  
**SUB7549ADB**



STERILE

B = 2.4 mm, C = 2.9 mm

**Microflow Nadel 30°**



STERILE

EIG: 2,50-2,65 mm    AD: 1,07 mm    ID: 0,90-0,51 mm

EQUIPMENT

**Adaptive Fluidics™ Premium Pack**

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

**BL5115-1**

Bestandteile:

- A

Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber®
- B

Nadelschlüssel
- C

2 MICS™ Sleeves (2,4)
- D

Verschlussstopfen
- E

Testkammer
- F

Nadeleinheit zum Vorstechen
- G

Mayo Tray Abdeckung
- H

Bildschirmabdeckung
- I

Abdeckung für die Fernbedienung
- J

MICS™ Nadel 2,0



STERILE

**Hydrodissektionskanüle**



STERILE

**2,4 mm Sleeves**



STERILE

A

B

C

E

F

D

G

H

I

J

2.4 mm



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.4 mm

VISKOELASTIKA

**AMVISC® PLUS**  
**60081L**

- Besonders für MICS-Techniken geeignet
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



STERILE



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

**500ml Plastikflasche**  
**BSS-10PK**



STERILE



**500ml Glasflasche**  
**AQ500G**




STERILE

INTRAOKULARLINSEN

**enVista®**  
**MXE / MXPLC / MXET**

- (Torische) Monofokale, asphärische IOL
- Maximale Rotations- und Refraktionsstabilität

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.

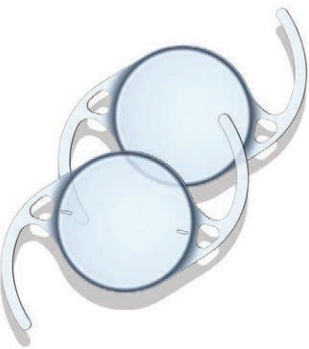

INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf [www.storzeye.eu](http://www.storzeye.eu)



SCANN MICH

INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.




PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack  
BL5110



Bestandteile:

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>E</b> 2 Sleeves (2,6)   |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>F</b> Verschlussstopfen |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>G</b> Testkammer        |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>H</b> Nadelschlüssel    |

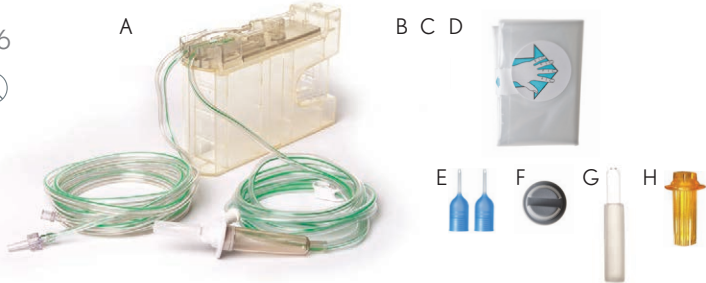


Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack  
BL5111



Bestandteile:

- |                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set | <b>D</b> Testkammer     |
| <b>B</b> Sleeve (2,6)               | <b>E</b> Nadelschlüssel |
| <b>C</b> Verschlussstopfen          |                         |

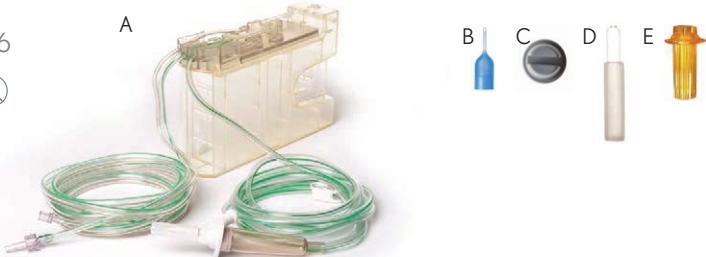


Stellaris® StableChamber™ Phako Pack  
BL5112



Bestandteile:

- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>E</b> 2 Sleeves (2,6)   |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>F</b> Verschlussstopfen |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>G</b> Testkammer        |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>H</b> Nadelschlüssel    |
|                                      | <b>I</b> Stable Chamber    |

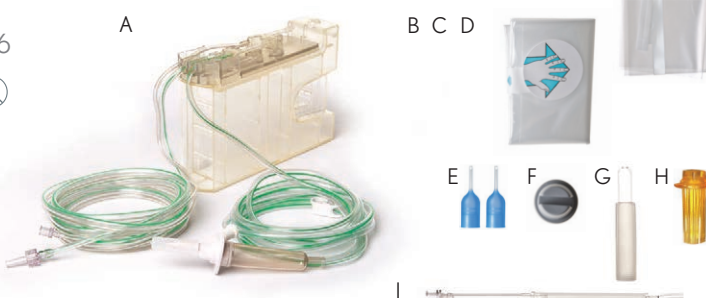


Stellaris® StableChamber™ Phako Pack  
mit MICS™ Nadel, gerade  
BL5113



Bestandteile:

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>F</b> Verschlussstopfen   |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>G</b> Testkammer          |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>H</b> Nadelschlüssel      |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>I</b> Stable Chamber      |
| <b>E</b> 2 Sleeves (1,8)             | <b>J</b> MICS™ Nadel, gerade |

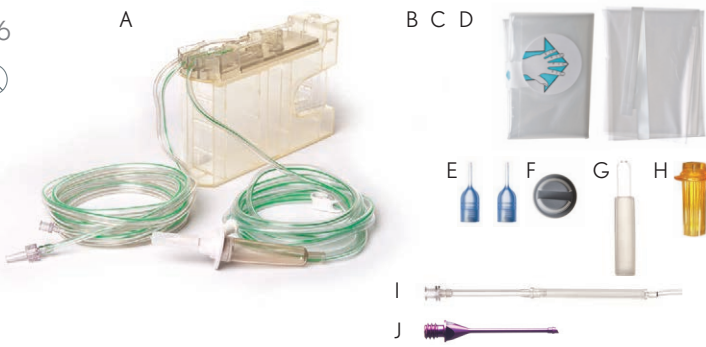


Stellaris® StableChamber™ Phako Pack  
mit MICS™ Nadel, angewinkelt  
BL5113A



Bestandteile:

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>F</b> Verschlussstopfen        |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>G</b> Testkammer               |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>H</b> Nadelschlüssel           |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>I</b> Stable Chamber           |
| <b>E</b> 2 Sleeves (1,8)             | <b>J</b> MICS™ Nadel, angewinkelt |

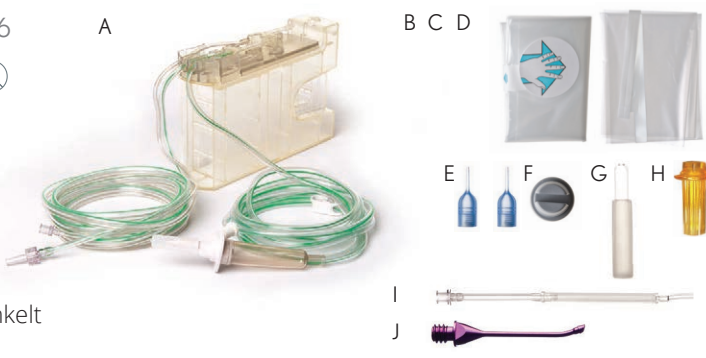


PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack  
mit MICS™ Nadel, gerade  
BL5114



Bestandteile:

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>E</b> MICS™ Sleeves (1,8) |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>F</b> Verschlussstopfen   |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>G</b> Testkammer          |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>H</b> Nadelschlüssel      |
|                                      | <b>I</b> MICS™ Nadel, gerade |

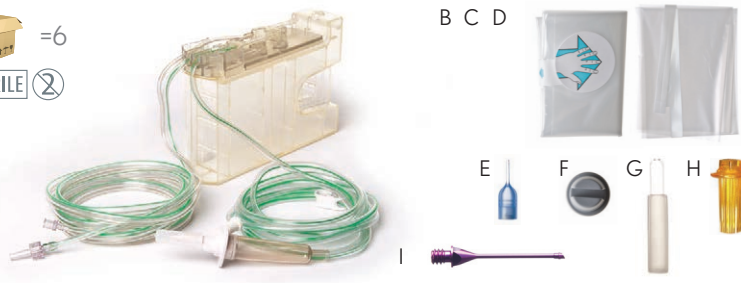


Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack  
mit MICS™ Nadel, angewinkelt  
BL5114A



Bestandteile:

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set  | <b>E</b> MICS™ Sleeves (1,8)      |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung         | <b>F</b> Verschlussstopfen        |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung         | <b>G</b> Testkammer               |
| <b>D</b> Abdeckung für Fernbedienung | <b>H</b> Nadelschlüssel           |
|                                      | <b>I</b> MICS™ Nadel, angewinkelt |

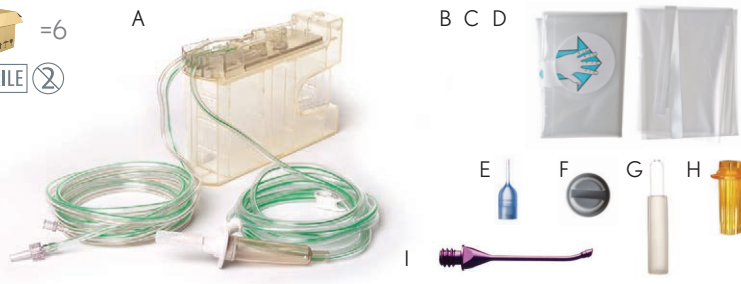


Stellaris® Basic Phako Pack  
BLV3220000



Bestandteile:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>A</b> Sammelbehälter und I/A Set | <b>D</b> 2 Sleeves (2,2)   |
| <b>B</b> Mayo Tray Abdeckung        | <b>E</b> Verschlussstopfen |
| <b>C</b> Bildschirmabdeckung        | <b>F</b> Testkammer        |

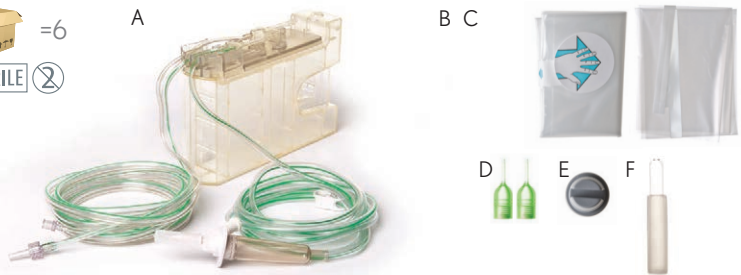


# Adaptive Fluidics™ – proaktiver Ansatz für eine verbesserte Vorderkammerstabilität

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind im OP oberstes Gebot. Aus diesem Grund ist Stellaris Elite™ mit smarten Funktionen, wie Adaptive Fluidics™ für optimale Vorderkammerstabilität, ausgestattet. Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

## IHRE VORTEILE MIT ADAPTIVE FLUIDICS™


- Verbesserte Vorderkammerstabilität**  
durch minimierte IOD Schwankungen, u.a. minimierter Post-Okklusions-Sog
- Weniger Belastung für das Auge,**  
da bei inaktivem Vakuum kein hoher IOD entsteht - schont die Cornea, und ist angenehmer für den Patienten
- Erhöhte Sicherheit durch verschiedene Reflux-Modi:**
  - Continuous
  - Single High
  - Single Low
- Adaptive Fluidics™ hält Ihnen den Rücken frei.**  
So können Sie sich voll und ganz auf den eigentlichen Eingriff konzentrieren.

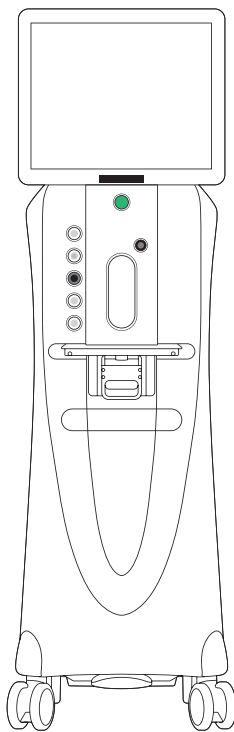

Weiterführende Informationen zur Technologie




Verlauf des IOD bei fixem Infusionsdruck

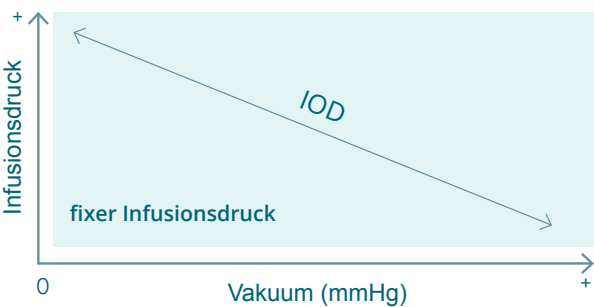


Intraokularer Druck (IOD) fällt mit steigendem Vakuum

Verlauf des IOD bei fixem Infusionsdruck

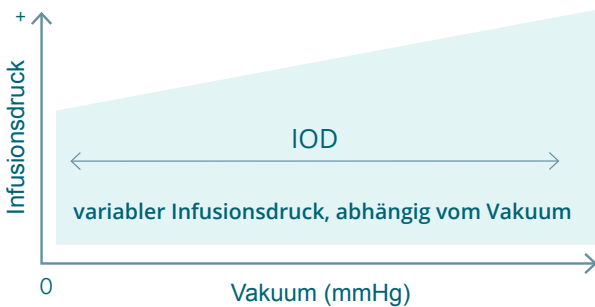

Stabiler IOD während des gesamten Eingriffes


## Adaptive Fluidics™ Premium Pack BL5115-1

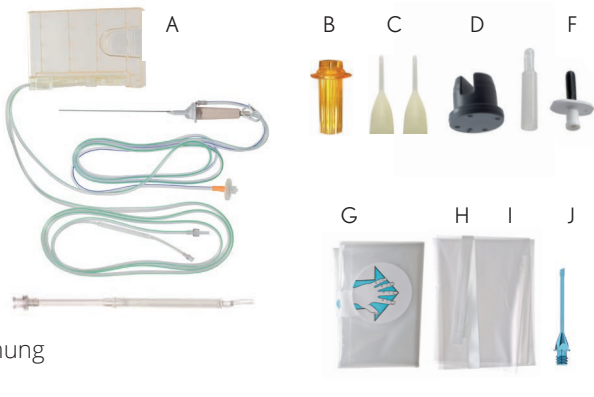

Bestandteile:

- A** Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber®
- B** Nadelschlüssel
- C** 2 MIC™ Sleeves (2,4)
- D** Verschlussstopfen
- E** Testkammer
- F** Nadeleinheit zum Vorstechen
- G** Mayo Tray Abdeckung
- H** Bildschirmabdeckung
- I** Abdeckung für die Fernbedienung
- J** MIC™ Nadel 2,0


## Adaptive Fluidics™ Standard Pack BL5115-2

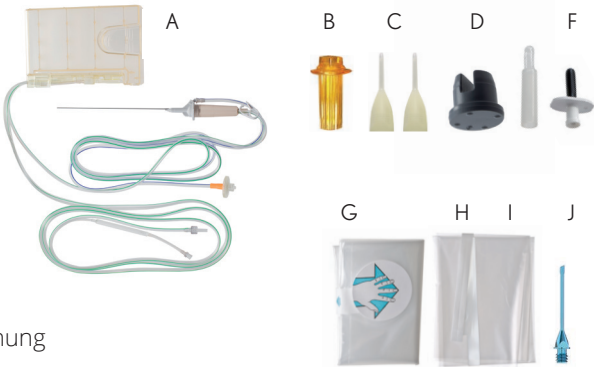

Bestandteile:

- A** Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux
- B** Nadelschlüssel
- C** 2 MIC™ Sleeves (2,4)
- D** Verschlussstopfen
- E** Testkammer
- F** Nadeleinheit zum Vorstechen
- G** Mayo Tray Abdeckung
- H** Bildschirmabdeckung
- I** Abdeckung für die Fernbedienung
- J** MIC™ Nadel 2,0


## Adaptive Fluidics™ MICSTM Premium Packs BL5115-3

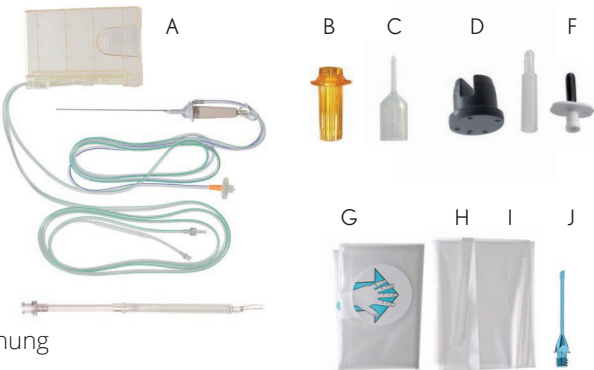

Bestandteile:

- A** Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber®
- B** Nadelschlüssel
- C** 21G COOLFLOW Sleeve
- D** Verschlussstopfen
- E** Testkammer
- F** Nadeleinheit zum Vorstechen
- G** Mayo Tray Abdeckung
- H** Bildschirmabdeckung
- I** Abdeckung für die Fernbedienung
- J** MIC™ Nadel 2,0

## Adaptive Fluidics™ Basic Pack BL5115-4

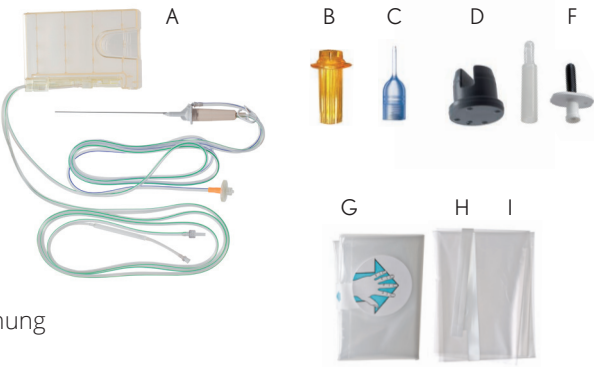

Bestandteile:

- A** Sammelbehälter, standard Schlauchsystem
- B** Nadelschlüssel
- C** MICSTM Sleeves (1,8)
- D** Verschlussstopfen
- E** Testkammer
- F** Nadeleinheit zum Vorstechen
- G** Mayo Tray Abdeckung
- H** Bildschirmabdeckung
- I** Abdeckung für die Fernbedienung

PHAKONADELN

PHAKONADELN FÜR MICS™ OPs

MICS™ Nadel 1,8  
BL3318S



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 1,8  
30° angewinkelt  
BL3318AS



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 2,0  
BL3420S



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

MICS™ Nadel 2,0  
30° angewinkelt  
BL3420AS



EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm

STANDARD PHAKONADELN

Thin Tip Nadel 30°  
DP8430S




EIG: 2,5-2,65 mm AD: 0,90 mm ID: 0,67 mm

Microflow Nadel 30°  
DP8730S



EIG: 2,5 mm AD: 0,90 mm ID: 0,70-0,50 mm

Microflow Nadel 30°  
DP8230S

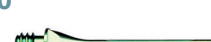

EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm

Microflow Nadel 45°  
DP8245S



EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm

Microflow Plus Nadel 30°  
DP8330S



EIG: 2,75-2,85 mm AD: 1,17 mm ID: 0,98-0,61 mm

STANDALONE SLEEVES

1,8 mm Sleeves  
BL3118



2,2 mm Sleeves  
DP5531



2,4 mm Sleeves  
BL3124S



2,6 mm Sleeves  
DP5501



ANTERIORE VITREKTOMIE

Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

20G SE5620AV



Bestandteile:

- 20G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem
- 22G Irrigations Handstück (85806ST)
- Koaxiales Infusionsleeve- und Schlauchset



Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

23G SE5623AV



Bestandteile:

- 23G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem
- 22G Irrigations Handstück (85807ST)



Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Anterior / Stellaris® PC)

20G BL5612



23G BL5623S

25G BL5625S

23 und 25G Cutter benötigen männlich - männlich Luer-Adapter aus dem Adapter Kit BL3190



Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)

23G SE5623




25G SE5625






Adapter Kit für anteriore Vitrektomie  
BL3190

Bestandteile:

- A Infusionskanüle
- B Männlich - männlich Luer-Adapter
- C Adapterschlauch (benötigt für Stellaris® PC)

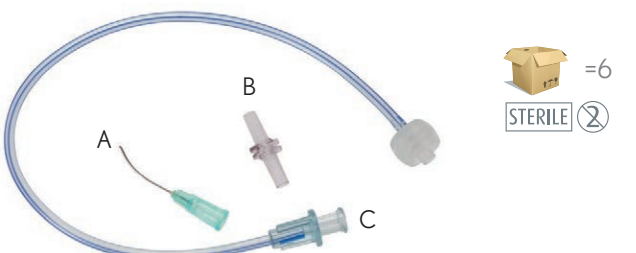

# INTRAOKULAR- LINSEN

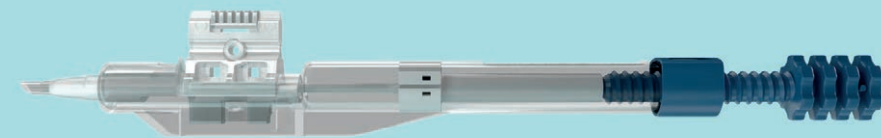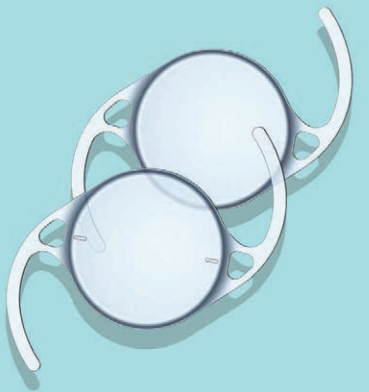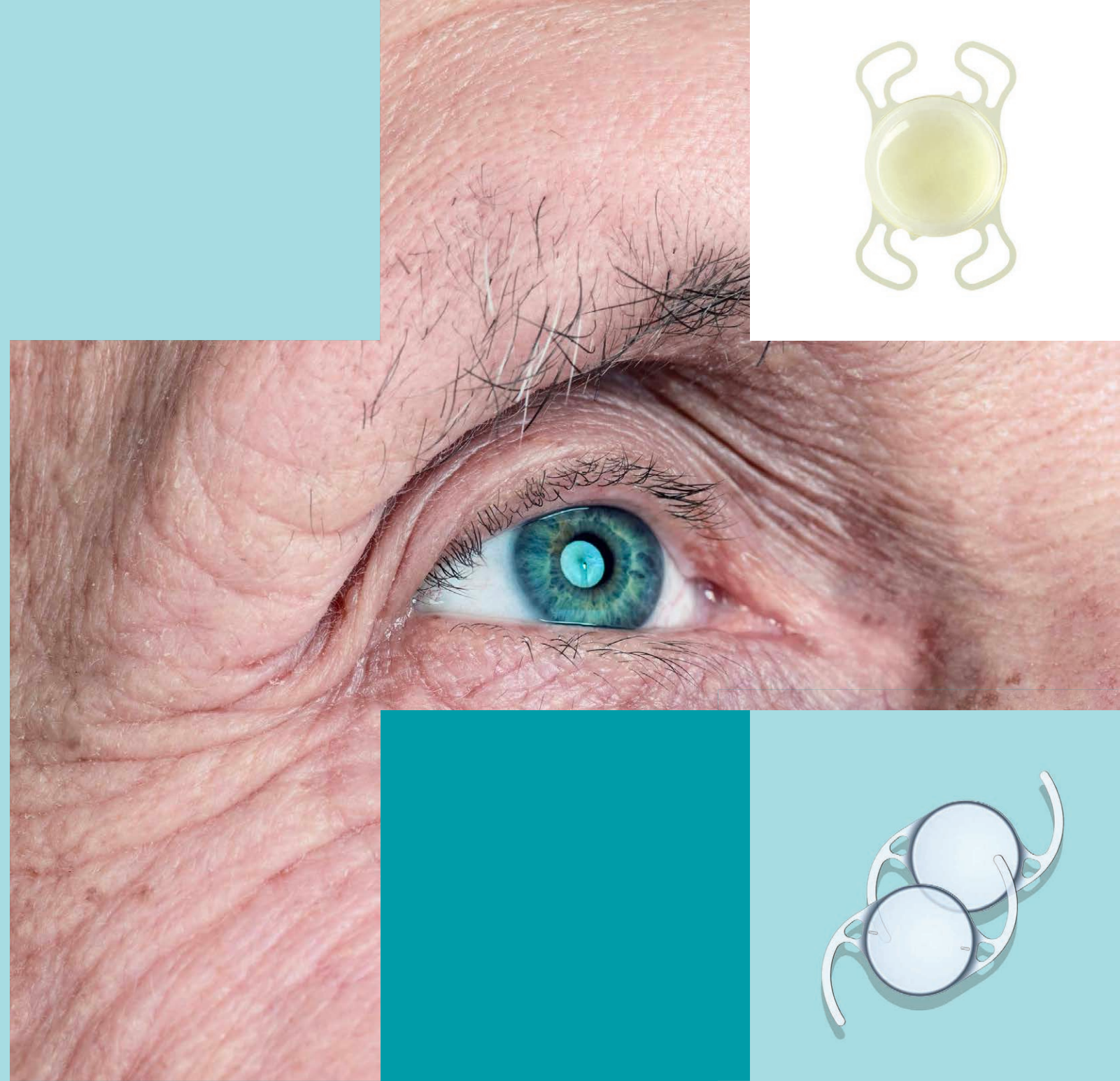

|                            | Hydrophobe IOL                                                                                                     |                                                      |                                                                                                |                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                            | enVista® & enVista® toric                                                                                          |                                                      | LuxSmart™ (toric) & LuxSmart™ Crystal                                                          | IC-8™                                                 |
|                            | Preloaded, Glisteningfrei                                                                                          |                                                      | Preloaded, EDOF                                                                                |                                                       |
| Art.-Nr.                   | MXE / MXPLC / MXET                                                                                                 |                                                      | YSMART / YSMARTT / SMART                                                                       |                                                       |
| Material                   | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                                                     |                                                      | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                                 |                                                       |
| Typ                        | hydrophobe HKL                                                                                                     |                                                      | hydrophobe HKL                                                                                 |                                                       |
| Optikdesign                | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex, (torisch)                                                     |                                                      | EDOF, asphärisch , (torisch)                                                                   |                                                       |
| Haptikdesign               | C-Haptiken, 0° Anwinkelung                                                                                         |                                                      | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung                                                               |                                                       |
| Optikdurchmesser           | 6,0 mm                                                                                                             |                                                      | 6,0 mm                                                                                         |                                                       |
| Gesamtdurchmesser          | 12,5 mm                                                                                                            |                                                      | 11,0 mm                                                                                        |                                                       |
| Refraktiver Index bei 35°C | 1,53                                                                                                               |                                                      | 1,54                                                                                           |                                                       |
| Lichtfilter                | UV                                                                                                                 |                                                      | UV, (Violettes Licht)                                                                          |                                                       |
| Dioptrien in dpt           | enVista®<br>0,0 - 10,0 und 30,0 -34,0<br>in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0<br>in 0,5 dpt-Schritten               | enVista® toric<br>6,0 - 30,0<br>in 0,5 dpt-Schritten | LuxSmart™<br>0,0 - 10,0 dpt<br>in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 34,0 dpt<br>in 0,5 dpt-Schritten | LuxSmart™ toric<br>6,0 - 30,0<br>in 0,5 dpt-Schritten |
| Zylinder in dpt            | 1,25 - 5,75                                                                                                        |                                                      | 0,75 - 6,0 dpt                                                                                 |                                                       |
| Inzision                   | 2,2 mm                                                                                                             |                                                      | 2,2 mm                                                                                         |                                                       |
| Injektor                   | INJ100 (INJ100)<br>BLIS Injektor mit Kartusche (BLIS-R1)<br>Preloaded: SimpliEYE™ (nur für die enVista® verfügbar) |                                                      | Preloaded: Accuject™ Pro                                                                       |                                                       |
|                            |                                                                                                                    |                                                      | Steriles Single-Use IC-8™ IOL Injektorsystem                                                   |                                                       |

|                            | Hydrophile IOL                                                                 |                                                                                    |                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Akreos® MICS                                                                   | Akreos® Adapt AO                                                                   | Akreos® Adapt                                                                  |
|                            |                                                                                | Preloaded                                                                          |                                                                                |
| Art.-Nr.                   | MI60P                                                                          | ADAPTAOP / AO60PLC                                                                 | ADAPTPRP                                                                       |
| Material                   | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                 | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                     | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                 |
| Typ                        | hydrophile HKL                                                                 | hydrophile HKL                                                                     | hydrophile HKL                                                                 |
| Optikdesign                | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex                            | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex                                | monofokal, sphärisch, equikonvex                                               |
| Haptikdesign               | Vierpunkt-Haptik<br>10° Anwinkelung                                            | Vierpunkt-Haptik<br>0° Anwinkelung                                                 | Vierpunkt-Haptik<br>0° Anwinkelung                                             |
| Optikdurchmesser           | 6,2 mm (0 - 15,0 dpt), 6,0 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>5,6 mm (22,5 - 30,0 dpt)    | 6,0 mm                                                                             | 6,0 mm                                                                         |
| Gesamtdurchmesser          | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt), 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt) | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt),10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)      | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt), 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt) |
| Refraktiver Index bei 35°C | 1,46                                                                           | 1,46                                                                               | 1,46                                                                           |
| Lichtfilter                | UV                                                                             | UV                                                                                 | UV                                                                             |
| Dioptrien                  | 0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten              | 0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten                  | 0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten              |
| Inzision                   | 1,8 mm                                                                         | 1,8-2,2 mm                                                                         | 2,2 mm                                                                         |
| Injektor                   | Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)                                                  | Viscoject 2.2 (LP604340)<br>Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)<br>Preloaded: SimpliEYE™ | Viscoject 2.2 (LP604340)                                                       |

|                            | Hydrophobe IOL                                                              |                                                                                          |                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                            | LuxGood™ & LuxGood™ Crystal                                                 | EyeCee® One & EyeCee® One Crystal                                                        | S1 IOL                                       |
|                            | Preloaded                                                                   | Preloaded                                                                                | Nur in Deutschland erhältlich                |
| Art.-Nr.                   | YGOOD / GOOD                                                                | EYEC1NP/ EYEC1NPC                                                                        | HF600                                        |
| Material                   | hydrophobes Acrylat, einteilig                                              | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                           | hydrophobes Acrylat, einteilig               |
| Typ                        | hydrophobe HKL                                                              | hydrophobe HKL                                                                           | hydrophobe HKL                               |
| Optikdesign                | asphärisch, aberrationsneutral, monofokal                                   | monofokal, asphärisch, aberrationskorrigierend (-0,13 µm SA)                             | monofokal, sphärisch, bikonvex               |
| Haptikdesign               | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung                                            | C-Haptiken, 0° Anwinkelung                                                               | modifizierte C-Loop Haptiken, 0° Anwinkelung |
| Optikdurchmesser           | 6,0 mm                                                                      | 6,0 mm                                                                                   | 6,0 mm                                       |
| Gesamtdurchmesser          | 11,0 mm                                                                     | 13,00 mm                                                                                 | 13,0 mm                                      |
| Refraktiver Index bei 35°C | 1,54                                                                        | 1,52                                                                                     | 1,48                                         |
| Lichtfilter                | UV, (Violettes Licht)                                                       | Blaulicht                                                                                | UV                                           |
| Dioptrien in dpt           | 0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 34,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten | 1,0 - 5,0 und 27,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>5,0 - 27,0 in 0,5 in 0,5 dpt-Schritten | 5,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten          |
| Inzision                   | 2,2 mm                                                                      | 2,2 - 2,4 mm                                                                             | 2,2 - 2,4 mm                                 |
| Injektor                   | Preloaded: Accuject™ Pro                                                    | Preloaded NP-1                                                                           | Bioject-P220 (12INJ0246)                     |

enVista® & enVista® toric  
MXE / MXPLC / MXET

- ▶ Glisteningfreie Trusight™ Optik
- ▶ Accuset™ Haptiken für maximale Rotations-und Refraktionsstabilität
- ▶ Einfaches Preloaded System mit Drehinjektor



INJEKTOREN:

- Einweginjektor INJ100
- Mehrweginjektor BLIS-R1 inkl. Kartusche BLIS-X1
- Preloaded: SimplifEYE™ (nur für die enVista® verfügbar)



|                   |                                                                                                               |                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                                                |                                                          |
| Optik             | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral,, bikonvex                                                          |                                                          |
| Haptik            | C-Loop, 0° Anwinkelung                                                                                        |                                                          |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                                                        |                                                          |
| Gesamtdurchmesser | 12,5 mm                                                                                                       |                                                          |
| Lichtfilter       | UV                                                                                                            |                                                          |
| Dioptrien         | enVista®<br>0,0 - 10,0 und 30,0 - 34,0 dpt<br>in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 dpt<br>in 0,5 dpt-Schritten | enVista® toric<br>6,0 - 30,0 dpt<br>in 0,5 dpt-Schritten |
| Zylinder          | 1,25 - 5,75                                                                                                   |                                                          |
| Inzision          | 2,2 mm                                                                                                        |                                                          |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten



enVista® toric Kalkulator  
<https://envista.toriccalculator.com>



LuxSmart™ (toric) & LuxSmart™ Crystal  
YSMART / YSMARTT / SMART

- ▶ EDOF IOL Plattform, basierend auf einer Kombination aus sphärischen Aberrationen
- ▶ Intermediärvisus ohne Nebeneffekte wie Halos & Starburst
- ▶ Vierpunkt-Haptikdesign für Kapsel- und Rotationsstabilität sowie sichere Vorhersagbarkeit des refraktiven Outcomes



INJEKTOR:


- Preloaded: Accuject™ Pro



|                   |                                                                                                |                                                                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                                 |                                                                                                                       |
| Optik             | EDOF, asphärisch                                                                               |                                                                                                                       |
| Haptik            | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung                                                               |                                                                                                                       |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                                         |                                                                                                                       |
| Gesamtdurchmesser | 11,0 mm                                                                                        |                                                                                                                       |
| Lichtfilter       | UV & Violettes Licht                                                                           |                                                                                                                       |
| Dioptrien         | LuxSmart™<br>0,0 - 10,0 dpt<br>in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 34,0 dpt<br>in 0,5 dpt-Schritten | LuxSmart™ toric<br>6,0 - 10,0 und 31,0 - 34,0 dpt<br>in 1,0 dpt-Schritten<br>10,5 - 30,0 dpt<br>in 0,5 dpt-Schrittenn |
| Zylinder          | 0,75 - 6,0                                                                                     |                                                                                                                       |
| Inzision          | 2,2 mm                                                                                         |                                                                                                                       |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten

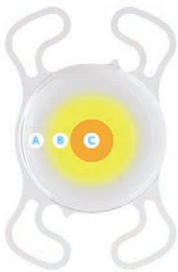

- A MONOFOKALE PERIPHERIE  
Im äußeren Bereich ist die Korrektur für die Ferne
- B PATENTIERTE ÜBERGANGSZONE  
Gleitender Übergang vom EDOF Zentrum in die asphärische monofokale Peripherie – ohne Lichtverlust
- C EDOF ZENTRUM  
Erhöhte subjektive Tiefenschärfe durch die Kombination der sphärischen Aberrationen 4. und 6. Ordnung mit gegensätzlichen Vorzeichen

HYDROPHOBE IOL


IC-8™  
IC8OUSBL



- ▶ IOL mit kleiner Apertur und integrierter FilterRing™-Komponente für den Einsatz bei komplexen Hornhäuten

INJEKTOR:

- Steriles Single-Use IC-8™ IOL Injektorsystem

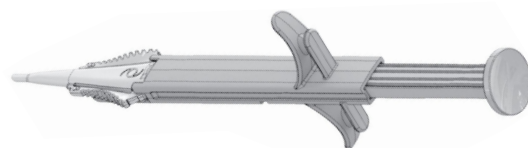

|                   |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | Hydrophobes Acrylat, einteilig / FilterRing™-Komponente aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) |
| Optik             | bikonvex, asphärische Vorderfläche, FilterRing™-Komponente                              |
| Haptik            | modifizierte C-Schleifen-Haptik, 5° Anwinkelung                                         |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                                  |
| Gesamtdurchmesser | 12,5 mm                                                                                 |
| Lichtfilter       | UV                                                                                      |
| Dioptrien         | 10,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten                                                    |
| Inzision          | 3,5 mm                                                                                  |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten



HYDROPHOBE IOL

LuxGood™ & LuxGood™ Crystal  
YGOOD / GOOD



- ▶ Einfaches Preloaded System mit Pushinjektor
- ▶ Mit & ohne Violettlichtfilter

INJEKTOR:

- Preloaded: Accuject™ Pro



|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophobes Acrylat, einteilig                                               |
| Optik             | asphärisch, aberrationsneutral                                               |
| Haptik            | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung                                             |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                       |
| Gesamtdurchmesser | 11,0 mm                                                                      |
| Lichtfilter       | UV & Violette Licht                                                          |
| Dioptrien         | 0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 34,0 dpt in 0,50 dpt-Schritten |
| Inzision          | 2,2 mm                                                                       |




Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten



EyeCee® One & EyeCee® One Crystal  
EYEC1NP/ EYEC1NPC

- ▶ Verlässliche Fixierung und Stabilität durch Ankerhaptiker
- ▶ Einfaches Preloaded System mit Pushinjektor

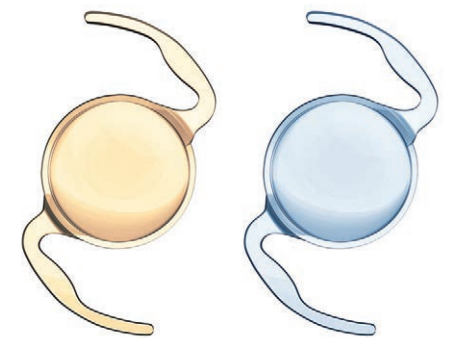

INJEKTOR:

- Preloaded NP-1



|                   |                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophobes Acrylat, einteilig                                                    |
| Optik             | monofokal, asphärisch, aberrationskorrigierend (-0,13 µm SA)                      |
| Haptik            | C-Loop, 0° Anwinkelung                                                            |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                            |
| Gesamtdurchmesser | 13,0 mm                                                                           |
| Lichtfilter       | UV & Blaulichtfilter                                                              |
| Dioptrien         | 1,0 - 5,0 und 27,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>5,0 - 27,0 in 0,5 dpt-Schritten |
| Inzision          | 2,2 mm                                                                            |

Hersteller: NIDEK CO., LTD. 34-14, Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten




S1 IOL  
HF600



- ▶ Sphärisches Oberflächendesign
- ▶ Nur in Deutschland erhältlich

INJEKTOREN:

- Bioject-P220 (12INJ0246)

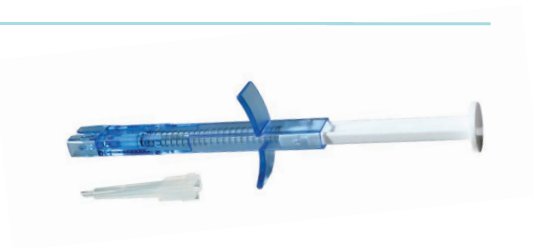

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Material          | hydrophobes Acrylat, einteilig               |
| Optik             | monofokal, sphärisch, bikonvex               |
| Haptik            | modifizierte C-Loop Haptiken, 0° Anwinkelung |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                       |
| Gesamtdurchmesser | 13,0 mm                                      |
| Lichtfilter       | UV                                           |
| Dioptrien         | 5,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten          |
| Inzision          | 2,2-2,4 mm                                   |

Hersteller: Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd. Plot No. 555-556-557, Opp. Subham Tex-O-Pack, Khatraj-Vadsar Road, P.O.: Khatraj, Taluka- Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten



Akreos® MICS  
MI60P



- Inzisionsgröße 1,8 mm: ideal zur Anwendung von MICS-Techniken geeignet
- Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast

INJEKTOR:

- Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)



|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                   |
| Optik             | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex                              |
| Haptik            | Vierpunkt-Haptik, 10° Anwinkelung                                                |
| Optikdurchmesser  | 6,2 mm (0 - 15,0 dpt)<br>6,0 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>5,6 mm (22,5 - 30,0 dpt)    |
| Gesamtdurchmesser | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt)<br>10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt) |
| Lichtfilter       | UV                                                                               |
| Dioptrien         | 0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten              |
| Inzision          | 1,8 mm                                                                           |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten


Akreos® Adapt AO  
ADAPTAOP / AO60PLC



- Aberrationsneutrales Advanced Optics Design
- Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast
- Geeignet für kombinierte Kapselsack-/ Sulkus-Implantation

INJEKTOREN:

- Preloaded: SimplifEYE™
- Viscoject 2.2 (LP604340),
- Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)

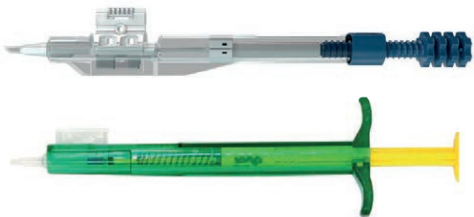

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                   |
| Optik             | monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex                              |
| Haptik            | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung                                                 |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                           |
| Gesamtdurchmesser | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt)<br>10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt) |
| Lichtfilter       | UV                                                                               |
| Dioptrien         | 0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten              |
| Inzision          | 1,8-2,2 mm                                                                       |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten

Akreos® Adapt  
ADAPTPRP



- ▶ Sphärisches Oberflächendesign
- ▶ Geeignet für kombinierte Kapselsack-/ Sulkus-Implantation

INJEKTOREN:

- Viscoject 2.2 (LP604340)



|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Material          | hydrophiles Acrylat, einteilig                                                   |
| Optik             | monofokal, sphärisch, equikonvex                                                 |
| Haptik            | Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinklung                                                  |
| Optikdurchmesser  | 6,0 mm                                                                           |
| Gesamtdurchmesser | 11,0 mm (0 - 15,0 dpt)<br>10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt)<br>10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt) |
| Lichtfilter       | UV                                                                               |
| Dioptrien         | 0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten<br>10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten              |
| Inzision          | 2,2 mm                                                                           |



Scannen Sie den QR Code  
oder besuchen Sie  
[www.IOLCon.org](http://www.IOLCon.org)  
für aktuelle A-Konstanten



Explantationspinzette n. Jünemann  
65530



- Gezahnte Pinzette für IOL Explantation  
ohne Zerschneiden
- 2,5 mm Inzision

ANWENDER-VIDEO



SCAN MICH


Nukleusmanipulator n. Menapace  
55485



- Dreidimensional abgewinkelte Spitze
- Länge distales Ende: 2 mm



Kapselspannring  
ACPi-11

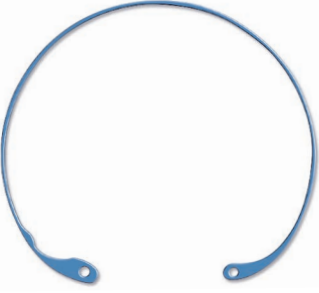


- Preloaded
- PMMA, einteilig
- Gesamtdurchmesser: 11,0 mm

EIN STARKES TEAM  
mit der LuxSmart™ toric



# VISKO- ELASTIKA

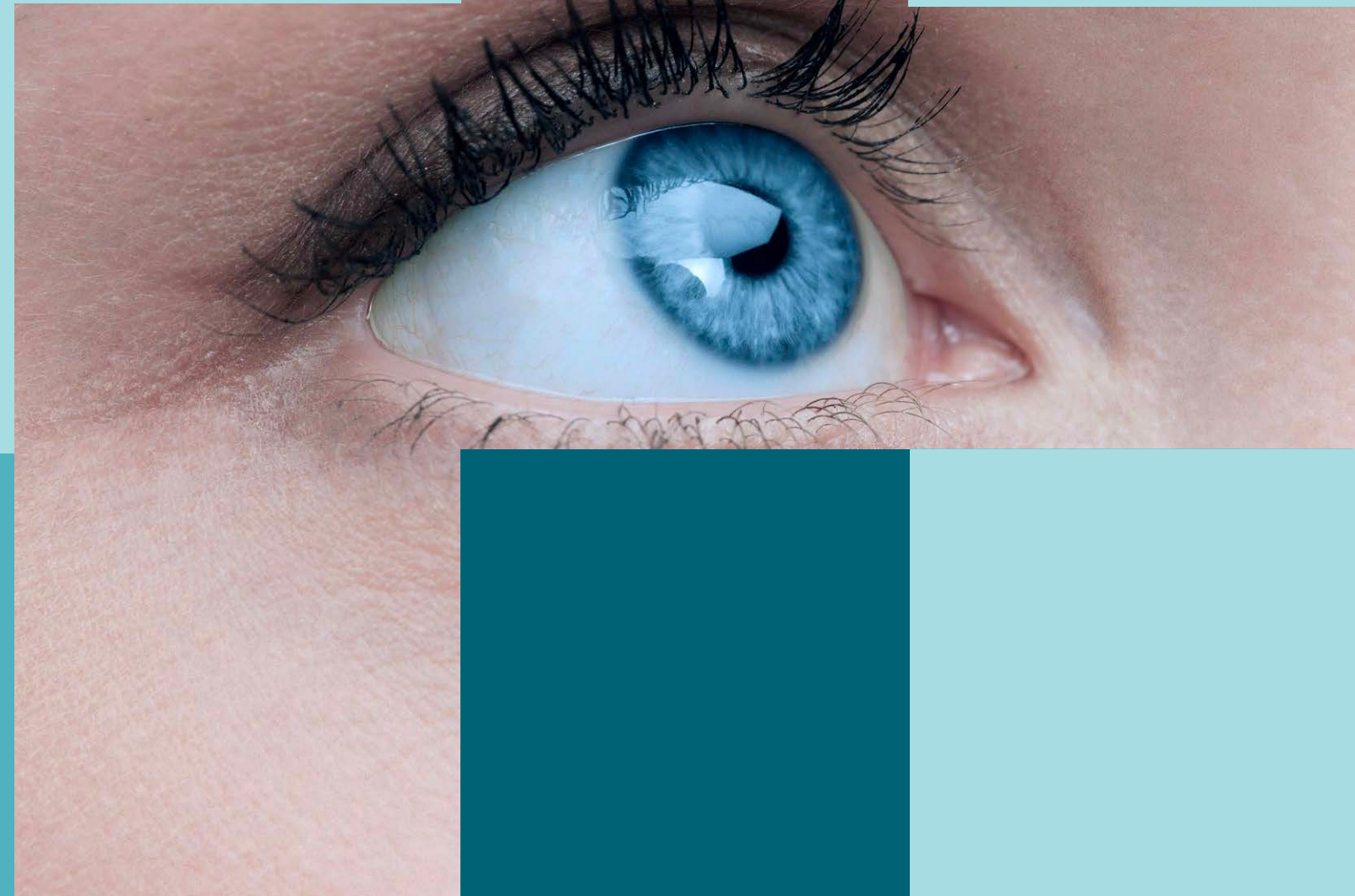

VISKOELASTIKA HA

VISKOELASTIKA HPMC

|                              | EYEFILL® S.C.                                                                                                                                                    | EYEFILL® C.                                                                                                | EYEFILL® M.B.                                                                                                                                                             | Amvisc®                                                                                                                                                       | Amvisc® Plus                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                 |                           |                                                                                          |                                                                            |                                                                              |
| Art. Nr.                     | EYEFILL-SC                                                                                                                                                       | EYEFILL-C-WST                                                                                              | EYEFILL-M                                                                                                                                                                 | 59081L                                                                                                                                                        | 60081L                                                                                                                                                          |
|                              | hoch kohäsiv                                                                                                                                                     | kohäsiv                                                                                                    | kohäsiv                                                                                                                                                                   | kohäsiv                                                                                                                                                       | kohäsiv dispersiv                                                                                                                                               |
| Zusammensetzung              | 2 % HA                                                                                                                                                           | 1.4 % HA                                                                                                   | MEGA I: 1.8 % HA<br>+ BIO II: 1.4 % HA                                                                                                                                    | 1.2 % HA                                                                                                                                                      | 1.6 % HA                                                                                                                                                        |
| Rohmaterial                  | Bakterielle Biofermentation                                                                                                                                      | Bakterielle Biofermentation                                                                                | Bakterielle Biofermentation                                                                                                                                               | Bakterielle Biofermentation                                                                                                                                   | Bakterielle Biofermentation                                                                                                                                     |
| Molekulargewicht (Da)        | 3.2 – 3.5 Mio                                                                                                                                                    | 3.2 – 3.5 Mio                                                                                              | 3.2 – 3.5 Mio                                                                                                                                                             | 1 – 2,9 Mio                                                                                                                                                   | 1 – 2,9 Mio                                                                                                                                                     |
| Viskosität mPa.s bei 0,1 s-1 | 400.000                                                                                                                                                          | 120.000                                                                                                    | MEGA I: 100.000<br>BIO II: 80.000                                                                                                                                         | 40.000                                                                                                                                                        | 55.000                                                                                                                                                          |
| Lagerung                     | Raumtemperatur                                                                                                                                                   | 2-8 °C                                                                                                     | 2-8 °C                                                                                                                                                                    | 2-8 °C                                                                                                                                                        | 2-8 °C                                                                                                                                                          |
| pH                           | 6,8 – 7,6                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
| Volumen                      | 0,9 ml                                                                                                                                                           | 1,0 ml                                                                                                     | MEGA I: 0,55 ml<br>BIO II: 0,8 ml                                                                                                                                         | 0,8 ml                                                                                                                                                        | 0,8 ml                                                                                                                                                          |
| Indikation                   | Perfekter Erhalt und Stabilität der Vorderkammer und des Kapselsacks<br><br>Indiziert bei flacher Vorderkammer und Irisprolaps<br><br>Sehr einfach zu aspirieren | Indiziert für Standard Katarakt OPs<br><br>Guter Schutz intra- okulärer Gewebe<br><br>Einfach zu entfernen | Vorderkammererhalt mit Endothelzellenschutz während der OP<br><br>Für die Anwendung der Soft Shell Technique<br><br>Guter Verbleib in der Vorderkammer und dem Kapselsack | Indiziert für Standard Katarakt OPs<br><br>Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität<br><br>Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben | Besonders für MICS-Techniken geeignet<br><br>Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität<br><br>Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben |
| Kanüle                       | 25G / 35°                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | 27G                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |

| EYEFILL® H.D                                                                          | OcuCoat®                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                       |
| EYEFILL-HD-WST                                                                        | CC050S / CC100SL                                                                                                                         |
| dispersiv                                                                             | dispersiv                                                                                                                                |
| 2 % HPMC                                                                              | 2 % HPMC                                                                                                                                 |
| Pflanzlich                                                                            | Pflanzlich                                                                                                                               |
| 86.000                                                                                | 80.000                                                                                                                                   |
| 3.200                                                                                 | 4.000                                                                                                                                    |
| Raumtemperatur                                                                        | Raumtemperatur                                                                                                                           |
| 6,8 – 7,6                                                                             |                                                                                                                                          |
| 2,5 ml                                                                                | 1,0 ml / 2,0 ml                                                                                                                          |
| Exzellenter Endothel Schutz<br><br>Idealer Hilfsstoff für Funduskopie und Gonioskopie | Erhaltung einer tiefen Kammer während der Vorderkammerchirurgie<br><br>Ermöglicht effiziente Manipulation<br><br>Geringere Traumawirkung |
| 23G / 45°                                                                             | 25G                                                                                                                                      |

# INTRAOKULARE FÄRBEMITTEL



BLutein™ Färbemittel:  
Ein komplettes Portfolio ophthalmologischer Färbemittel für die intraokulare Anwendung

Das BLutein™ Sortiment umfasst Färbemittel sowohl für die Färbung des hinteren Segments als auch für die Färbung der Vorderkapsel.

Die ersten und einzigen intraokularen Färbemittel mit Lutein

- Die BLutein™ Färbemittel enthalten alle natürlich gewonnenes Lutein
- Lutein ist ein Pigment, das physiologischerweise in der menschlichen Netzhaut vorkommt und wichtig für die allgemeine Gesundheit des Auges ist <sup>1-4</sup>
  - Lutein kann auch zum Schutz der Netzhaut bei Operationen beitragen:
  - durch seine Blaulichtfilterwirkung absorbiert es schädliches blaues Licht, bevor es die Netzhautzellen erreicht <sup>5,6</sup>
  - wirkt als Antioxidant, um freie Radikale zu neutralisieren, die für die Netzhautzellen schädlich sein können <sup>7-9</sup>
  - Verringerung der iatrogenen Belastung des Netzhautgewebes für eine schnellere funktionelle Erholung nach der Operation

Weiterführende Informationen zu den Färbemitteln



SCAN MICH

Referenzen  
1. Bergamo VC et al., Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2021; 10: 26-38.  
2. Rodrigues EB et al., Am J Ophthalmol. 2010; 149: 265-77.  
3. Casaroli-Marano RP et al., Curr Eye Res. 2015; 40: 707-718.  
4. Morales MC et al., Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010; 51: 6018-6029.  
5. Buscemi S et al., Nutrients. 2018; 10: 1321.  
6. Bernstein PS et al., Prog Retin Eye Res. 2016; 50: 34-66.  
7. Lima VC et al., Int J Retin Vit. 2016; 2:19.  
8. Beccera MO et al., J Funct Foods. 2020; 66: 103771.  
9. Junghans A et al., Arch Biochem Biophys. 2001; 391:160-164.

DYE100 Trypan blue Vorderkapsel Färbemittel  
DYE100

- 0.06% Trypanblau
- Intraokulares Färbemittel zur Visualisierung der Vorderkapsel
- 1.0 ml Glasfläschchen

STERILE = 25



BLutein™ Phaco Lutein Vorderkapsel Färbemittel  
DYE200

- 1 % lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- 0,5 ml sterile vorgefüllte Glasspritzen
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Visualisierung der Vorderkapsel
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis

STERILE = 5




BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel  
DYE300

- Zur verbesserten Visualisierung des Glaskörpers während der Operation
- 2% kristallines Lutein
- 1 ml sterile Einweg-Glasfläschchen

STERILE = 10




# EINMAL- INSTRUMENTE

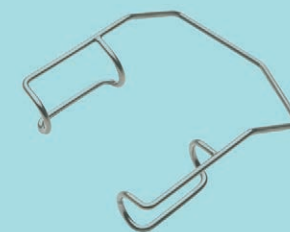

SPÜLUNG / ANÄSTHESIE

SPÜLKANÜLEN

Augenbrause  
82020S

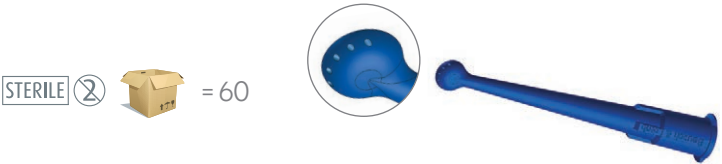

ANÄSTHESIEKANÜLEN


Retrobulbärkanüle  
25G SD1275/10




Sub-Tenon Anästhesie Kanüle  
19G SD5176/10  
1.1 x 25 mm




Retrobulbärkanüle n. Atkinson  
25G SD1637/10  
0.5 x 38 mm

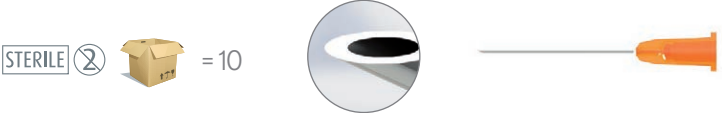

Retrobulbärkanüle n. Atkinson\*  
23G M0638-02/10  
0.64 x 38 mm

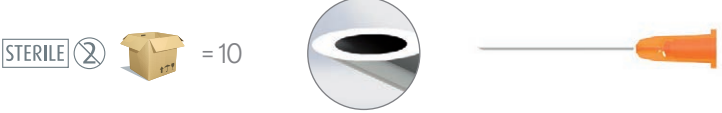

Peribulbärkanüle n. Atkinson  
27G SD5109/10  
0.4 x 32 mm

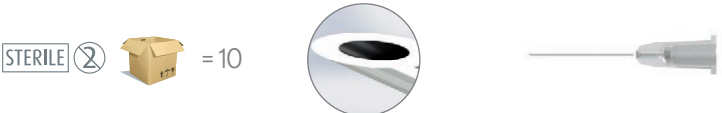

Peribulbärkanüle n. Atkinson  
25G SD5108/10  
0.5 x 32 mm



VORDERKAMMER

VORDERKAMMERKANÜLEN

Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
30G SD1273/10  
0.3 x 22 mm



Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
27G SD1280/10  
0.4 x 22 mm



Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
angewinkelt 45°, 7.5 mm\*  
20G M2273B-02/10  
0.9 x 22 mm




Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
angewinkelt 35°, 5.5 mm\*  
23G M2273G-02/10  
0.64 x 22 mm



Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
25G SD1639/10  
0.5 x 22 mm



Vorderkammerkanüle n. Rycroft  
angewinkelt 35°, 9 mm\*  
27G M3926A-02/10  
0.4 x 22 mm

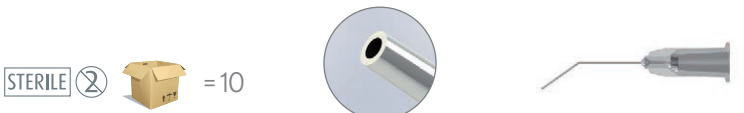

Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky,  
150 mm Silikonschlauch  
20G M2657-02/10  
0.64 x 3.5 mm



Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky,  
150 mm Silikonschlauch\*  
23G M2658-02/10  
0.64 x 3.5 mm



ZYSTOTOM / HYDRODISSEKTION

CYSTOTOMKANÜLEN

Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz\*

25G M3610S-02/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz

27G SD5042/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet\*

27G M3000F-02/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

25G SD4804/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

25G SD1610/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

27G SD1618/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



HYDRODISSEKTIONSKANÜLEN

Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgeflachte Spitze, vertikal

27G SD5099/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgeflachte Spitze, horizontal

27G SD5155/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



HYDRODISSEKTION / VISKOKANÜLEN / KANÜLEN ZUR KORTEX-ENTFERNUNG

HYDRODISSEKTIONSKANÜLEN

Hydrodissektionskanüle, angewinkelt

25G SD5037/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



Hydrodissektionskanüle, angewinkelt, - abgeflachte Spitze

27G SD3902/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



J-förmige Hydrodissektionskanüle

25G SD5003/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



VISKOKANÜLEN

Viskokanüle, angewinkelt

25G SD2639/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



KANÜLEN ZUR KORTEX-ENTFERNUNG

Irrigationskanüle n. Charleux

24G SD5106/10

0.5 x 12.5 mm

STERILE  = 10



KAPSELPOLITUR / TRÄNENWEG / VITREORETINAL


KANÜLEN ZUR KAPSELPOLITUR

Kapselpolierer, mattierte Spitze

23G SD1605/10

0.64 x 22 mm

STERILE  = 10

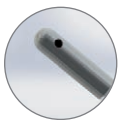

Kapselpolierer mit Silikonspitze

27G SD5005/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10




TRÄNENWEGKANÜLEN

Tränenwegkanüle, gebogen\*

25G M9277-02/10

0.5 x 29 mm

STERILE  = 10

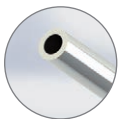

VITREORETINALE KANÜLEN

Infusionshandstück für schwere Flüssigkeiten, mit Fingerkontrolle und Luer-Lock-Anschluss\*

M4498-02/5

STERILE  = 5



MESSER

CLEAR CORNEAL MESSER



Clear Corneal Messer 1.3 mm, angewinkelt

LP7594 A = 1.3 mm, B = 1.4 mm STERILE  = 6

Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt

LP7527 A = 2.75 mm, B = 3 mm STERILE  = 6

Clear Corneal Messer 1.6 mm, angewinkelt

LP7595 A = 1.6 mm, B = 1.7 mm STERILE  = 6

Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt

LP7528 A = 2.85 mm, B = 3.2 mm STERILE  = 6



Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt

SUB7528 B = 2.85 mm, C = 2.8 mm STERILE  = 12

TELLERMESSER



Tellermesser, Anschliff oben, angewinkelt

LP7510 A = 2.0 mm, B = 4.0 mm STERILE  = 6

MVR MESSER



19G MVR Messer

19G LP7519 A = 1.37 mm STERILE  = 12

20G MVR Messer

20G LP7520 A = 1.2 mm STERILE  = 12

PHAKOLANZE



Phakolanz 2.2 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7548ADB    A = 2.2 mm, B = 2.3 mm      =6

Phakolanz 2.4 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7549ADB    A = 2.4 mm, B = 2.5 mm      =6

Phakolanz 2.5 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7550A    A = 2.5 mm, B = 3.3 mm      =6

Phakolanz 2.65 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7551A    A = 2.65 mm, B = 3.7 mm      =6

Phakolanz 2.65 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7551ADB    A = 2.65 mm, B = 3.7 mm      =6

Phakolanz 2.75 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7559A    A = 2.75 mm, B = 3.4 mm      =6

Phakolanz 2.8 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7552ADB    A = 2.8 mm, B = 3.2 mm      =6

Phakolanz 2.85 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7553A    A = 2.85 mm, B = 3.5 mm      =6

Phakolanz 3.0 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7556A    A = 3.0 mm, B = 3.6 mm      =6

Phakolanz 3.2 mm, angewinkelt, Anschliff oben

LP7557A    A = 3.2 mm, B = 3.2 mm      =6



Phakolanz 2.2 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

SUB7548ADB    B = 2.2 mm, C = 2.7 mm      =12

Phakolanz 2.4 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

SUB7549ADB    B = 2.4 mm, C = 2.9 mm      =12

Phakolanz 2.5 mm, angewinkelt, Anschliff oben

SUB7550A    B = 2.5 mm, C = 3.0 mm      =12

Phakolanz 2.75 mm, angewinkelt, Anschliff oben

SUB7559A    B = 2.75 mm, C = 3.3 mm      =12

Phakolanz 2.8 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

SUB7552ADB    B = 2.8 mm, C = 3.4 mm      =12

Phakolanz 2.85 mm, angewinkelt, Anschliff oben

SUB7553A    B = 2.85 mm, C = 3.4 mm      =12

Phakolanz 3.2 mm, angewinkelt, Anschliff oben

SUB7557A    B = 3.2 mm, C = 3.9 mm      =12

MESSER FÜR STICHINZISION



Messer für Stichinzision, 15 Grad  
LP7515 A = 15°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 22.5 Grad  
LP7522 A = 22.5°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 30 Grad  
LP7530 A = 30°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 45 Grad  
LP7545 A = 45°, B = 1.8 mm, C = 11.0 mm   =6



Messer für Stichinzision, 15 Grad  
SUB7515 B = 1.5 mm, C = 4.9 mm   =12

Messer für Stichinzision, 22.5 Grad  
SUB7522 B = 1.65 mm, C = 3.7 mm   =12

Messer für Stichinzision, 30 Grad  
SUB7530 B = 1.8 mm, C = 2.9 mm   =12

Messer für Stichinzision, 45 Grad  
SUB7545 B = 1.9 mm, C = 1.8 mm   =12

TRAPEZOIDES MESSER



Trapezoides Messer 1.5 – 1.7 mm, angewinkelt  
LP7599 A = 1.5 mm, B = 1.7 mm, E = 2.20 mm   =6

Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt  
LP7596 A = 1.5 mm, B = 2.0 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 1.6 – 1.8 mm, angewinkelt  
LP7600 A = 1.6 mm, B = 1.8 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 1.8 – 2.2 mm, angewinkelt  
LP7603 A = 1.8 mm, B = 2.2 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt  
LP7601 A = 2.0 mm, B = 2.2 mm, E = 2.29 mm   =6

Trapezoides Messer, 2.85 – 3.2 mm angewinkelt  
LP7582 A = 2.85 mm, B = 3.2 mm, E = 2.0 mm   =6



Trapezoides Messer 1.5 – 1.7 mm, angewinkelt  
SUB7599 B = 1.7 mm, C = 1.9 mm, D = 1.5 mm, E = 3.0 mm   =12

Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt  
SUB7596 B = 2.0 mm, C = 1.6 mm, D = 1.5 mm, E = 2.7 mm   =12

Trapezoides Messer 1.6 – 1.8 mm, angewinkelt  
SUB7600 B = 1.8 mm, C = 1.4 mm, D = 1.6 mm, E = 2.6 mm   =12

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt  
SUB7601 B = 2.2 mm, C = 1.9 mm, D = 2.0 mm, E = 3.0 mm   =12

SIDEPORT MESSER




Sideport Messer 0.8 mm, angewinkelt  
LP7593 A = 0.8 mm   =6

Sideport Messer 1.1 mm, angewinkelt  
LP7592 A = 1.1 mm   =6

STELLARIS® SYSTEM – I/A HANDSTÜCKE

KOAXIALE I/A HANDSTÜCKE
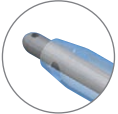
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I/A Handstück gebogen mit Sleeve für 1.8 C-MICS™<br><b>85794ST</b>                                                                                                  | STERILE  = 12   |       |
| I/A Handstück 45° mit Sleeve für 1.8 C-MICS™<br><b>85795ST</b>                                                                                                      | STERILE  = 12   |       |
| I/A Handstück 45° mit Sleeve und angerauter Spitze für 1.8 C-MICS™<br><b>85795STR</b>                                                                               | STERILE  = 12   |       |
| I/A Handstück, gebogen<br> (Ø 1.5mm) <b>85783ST</b>                               | STERILE  = 12  |    |
| I/A Handstück, 45°<br> (Ø 1.5mm) <b>85784ST</b>                                  | STERILE  = 12 |   |
| I/A Handstück gerade Spitze 90°, abgewinkelt, 16GA<br> (Ø 1.65mm) <b>85786ST</b> | STERILE  = 12 |   |

CAPSULEGUARD® STELLARIS® SYSTEM I/A HANDSTÜCKE

KOAXIALE CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE

|                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapsuleGuard® I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze<br><b>85910ST</b><br>EIG: 2.2mm-2.8mm   | STERILE  = 12   |       |
| CapsuleGuard® I/A Handstück, gerade*<br><b>85912ST</b><br>EIG: 2.2mm-2.8mm                   | STERILE  = 12   |       |
| CapsuleGuard® I/A Handstück, gebogen<br><b>85913ST</b><br>EIG: 2.2mm-2.8mm                   | STERILE  = 12   |       |
| CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, gerade<br><b>85914ST</b><br>EIG: < 2.0mm                  | STERILE  = 12 |   |
| CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze<br><b>85915ST</b><br>EIG: < 2.0mm | STERILE  = 12 |   |

EIG: Empfohlene Inzisionsgröße koaxial

\* Auftragsfertigung

I/A HANDSTÜCKE - UNIVERSELL

KOAXIALE I/A HANDSTÜCKE

I/A Handstück, gerade  
17G (Ø 1.5mm) 85782S

STERILE  = 12



I/A Handstück, gebogen  
17G (Ø 1.5mm) 85783S

STERILE  = 12



I/A Handstück, 45°  
17G (Ø 1.5mm) 85784S

STERILE  = 12



I/A Handstück, gerade mit Sleeve  
20G (Ø 0.9 mm) 85785S

STERILE  = 12



I/A Handstück, gerade, 90°  
16G (Ø 1.65 mm) 85786S

STERILE  = 12



CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE - UNIVERSELL

KOAXIALE CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE

CapsuleGuard IA® Handstück, 45°  
85910S

STERILE  = 12



CapsuleGuard IA® Handstück, gerade\*  
85912S

STERILE  = 12



CapsuleGuard IA® Handstück, gebogen  
85913S

STERILE  = 12



CapsuleGuard IA® Handstück  
für 1.8 C-MICS™, gerade  
85914S

STERILE  = 12



CapsuleGuard IA® Handstückfür  
1.8 C-MICS™, 45°  
85915S

STERILE  = 12



\* Auftragsfertigung

STELLARIS® SYSTEM BIMANUELLE IRRIGATIONS- UND ASPIRATIONSHANDSTÜCKE

BIMANUELLE ASPIRATIONSHANDSTÜCKE

Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut

- 19G **85901S19** (Ø 1.07mm)
- 20G **85901S20** (Ø 0.89 mm)
- 21G **85780S** (Ø 0.8 mm)
- 22G **85790S** (Ø 0.7 mm)
- 23G **85792S** (Ø 0.6 mm)



Aspirationshandstück mit lateralem Port

- 21GA **85900S** (Ø 0.8 mm)



STELLARIS SYSTEM® BIMANUELLE IRRIGATIONSHANDSTÜCKE

- 19G **85902ST19** (Ø 1.07mm)
- 21G **85787ST** (Ø 0.8 mm)
- 22G **85806ST** (Ø 0.7 mm)
- 23G **85807ST** (Ø 0.6 mm)



BIMANUELLE IRRIGATIONSHANDSTÜCKE - UNIVERSELL

Irrigationshandstück mit lateralem Port

- 19G **85902S19** (Ø 1.07mm)
- 20G **85902S20** (Ø 0.89 mm)
- 21G **85787S** (Ø 0.8 mm)
- 22G **85806S** (Ø 0.7 mm)
- 23G **85807S** (Ø 0.6 mm)



Irrigationshandstück, aufgeraut

- 21G **85781S** (Ø 0.8 mm)



Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port

- 22G **85789S** (Ø 0.7 mm)
- 23G **85791S** (Ø 0.6 mm)



Biaxiale Irrigations-Chopper\*

- 19G **85903S19** (Ø 1.07mm)
- 21G **85903S20** (Ø 0.89 mm)



HANDSTÜCKE FÜR ZERO PHAKO LINSENENTFERNUNG / INDIVIDUELLE PER PROCEDURE

I/A HANDPIECES FOR ZERO PHACO LENS REMOVAL

ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm

SUP06

Einmal Irrigations- / Aspirationshandstück zur Entfernung der femtolaserfragmentierten Linse ohne Einsatz von Ultraschallenergie. 30° Aspirationsrohr mit distaler Öffnung. Empfohlen für 2.2 mm Inzisionsbreite.



Stellaris® ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm

SUP06ST

Einmal Irrigations- / Aspirationshandstück zur Entfernung der femtolaserfragmentierten Linse ohne Einsatz von Ultraschallenergie. 30° Aspirationsrohr mit distaler Öffnung. Empfohlen für 2.2 mm Inzisionsbreite. Mit Surelock™ Luer Konnektor für Stellaris®.



INDIVIDUELLE PER PROCEDURE TRAYS

Das individuelle Per Procedure Tray ist ein komplettes Set einmalverwendbarer Instrumente von Bausch + Lomb, die entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik konfiguriert werden können.

Besuchen Sie [www.storzeye.eu](http://www.storzeye.eu) und stellen Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray mit dem Online-Konfigurator zusammen.

Konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf [www.storzeye.eu](http://www.storzeye.eu).



MANIPULATOREN, LIDSPERRER

LIDSPERRER

Lidsperre n. Barraquer  
SUH01



Lidsperre mit Feststellschraube  
SUH04



MANIPULATOREN

Koch Stop & Chop Manipulator  
SUF01



IOL Hkchen n. Sinskey  
SUF02



Phako-Spatel  
SUF03



Nukleusmanipulator n. Drysdale  
SUF04



Y-Hkchen, horizontal  
SUF05



Y-Hkchen, vertikal  
SUF06



PINZETTEN

Kapsulorhexispinzette  
SUE01-12



Pinzette n. Bonn  
SUE02-12



Fadenpinzette, gerade  
SUE03-12



Fadenpinzette n. McPherson  
SUE04-12



Fadenpinzette n. Pierse  
SUE05-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette  
SUE06-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette  
mit Markierungen  
SUE07-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette,  
Branchen gebogen  
SUE08-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette  
1.0 mm  
SUI20-12



BIPOLARSTIFTE

Sklera Bipolarstift, Lemos Adapter

20G E7928

STERILE  =12



Bipolarstift, angeschrägt, Lemos Adapter

20G E7929  
23G E7930  
25G E7926  
27G E7932

STERILE  =12



Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor

23G E7931  
25G E7924  
27G E7933

STERILE  =12



Bipolarstift, stumpf, 2-Pin-Konnektor

25G E7925

STERILE  =12



Bipolar-Konnektor, stumpf, Lemos-Konnektor

25G E7927

STERILE  =12



ZUBEHÖR

Bananenstecker Adapter

CX9404

 =1



Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor

CX9400

 =1



Bipolarkabel, Lemos Adapter

CX9430

 =1





Der umfassende Support-Service von Bausch+Lomb Surgical gewährleistet maximale Leistung.



KUNDENSERVICE

Das Team des Kundenservice steht Ihnen für Rückfragen zu den Themen Bestellungen, Preisgestaltung, Produktverfügbarkeit, Rücksendungen, Lieferungen und Gutschriften zur Seite.

DEUTSCHLAND

Bausch & Lomb GmbH  
Tel.: 0800 58 93 114  
Fax: 01805 90 94 90 94

ÖSTERREICH

Bausch & Lomb GmbH  
Tel.: 0800 241 015  
Fax: 0800 241 016

SCHWEIZ

Bausch & Lomb Swiss AG  
Tel.: 0848 228 724  
Fax: 0848 228 725



GLOBALE LOGISTIK

Bestellungen und Lieferungen auf der ganzen Welt werden durch das globale Netzwerk von Bausch+Lomb von Servicevertretern und Händlern sichergestellt. Die Lieferzeit unserer Produkte beträgt in etwa 24-48 Stunden.



TECHNISCHER SERVICE


Die Ingenieure von Bausch+Lomb Surgical unterlaufen regelmäßig einen strengen Zertifizierungsprozess, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Ein Monitoring-System ermöglicht Software-Updates und Datensicherungen, die bei Bedarf von Technikern vor Ort durchgeführt werden.



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die F&E-Abteilung von Bausch+Lomb Surgical konzentriert sich auf die Entwicklung technologisch innovativer Produkte. Die Produkte werden in fünf Zentren auf der ganzen Welt entwickelt: Saint Louis (Missouri, USA) für Geräte; Clearwater (Florida, USA) für Intraokularlinsen; Irvine (Kalifornien, USA) für IOL-Teile; München (Deutschland) für Laser und Heidelberg (Deutschland) für Instrumente.

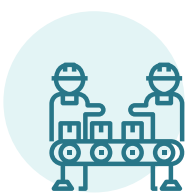

HIER ENTSTEHEN UNSERE PRODUKTE

Die Produktionsstätten von **Bausch+Lomb** Surgical befinden sich in den Vereinigten Staaten und in Europa.



St. Louis, Missouri, USA

- Katarakt- und Vitreoretinales Equipment und Zubehör



Manchester, Missouri, USA

- wiederverwendbare Instrumente



O'Fallon, Missouri, USA

- Instrumente und vitreoretinales Equipment



München, Deutschland

- Laser Equipment



Eppelheim, Deutschland

- wiederverwendbare und einmalverwendbare Instrumente



Clearwater, Florida, USA

- Intraokularlinsen



Warschau, Polen

- Intraokularlinsen

Produkt Referenz

Produktname

Seite

|                    |                                                                    |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 55485              | Nukleusmanipulator n. Menapace                                     | 33      |
| 59081L             | Viskoelastika AMVISC®                                              | 11/36   |
| 60081L             | Viskoelastika AMVISC® PLUS                                         | 9/13/36 |
| 65530              | Explantationspinzette n. Jünemann                                  | 33      |
| 82020S             | Augenbrause                                                        | 44      |
| 85780S             | Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut                             | 58      |
| 85781S             | Irrigationshandstück, aufgeraut                                    | 58      |
| 85782S             | I/A Handstück, gerade                                              | 56      |
| 85783S             | I/A Handstück, gebogen                                             | 56      |
| 85784S             | I/A Handstück, 45°                                                 | 56      |
| 85785S             | I/A Handstück, gerade mit Sleeve                                   | 56      |
| 85786S             | I/A Handstück, gerade, 90°                                         | 56      |
| 85787ST            | Irrigationshandstück                                               | 58      |
| 85783ST            | I/A Handstück, gebogen                                             | 58      |
| 85784ST            | I/A Handstück, 45°                                                 | 58      |
| 85786ST            | I/A Handstück gerade Spitze 90°, abgewinkelt, 16GA                 | 58      |
| 85787S             | Irrigationshandstück mit lateralem Port                            | 58      |
| 85789S             | Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port                | 58      |
| 85790S             | Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut                             | 58      |
| 85791S             | Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port                | 58      |
| 85792S             | Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut                             | 58      |
| 85794ST            | I/A Handstück gebogen mit Sleeve für 1.8 C-MICS™                   | 54      |
| 85795ST            | I/A Handstück 45° mit Sleeve für 1.8 C-MICS™                       | 54      |
| 85795STR           | I/A Handstück 45° mit Sleeve und angerauter Spitze für 1.8 C-MICS™ | 54      |
| 85806S             | Irrigationshandstück mit lateralem Port                            | 58      |
| 85806ST            | Irrigationshandstück                                               | 58      |
| 85807S             | Irrigationshandstück mit lateralem Port                            | 58      |
| 85807ST            | Irrigationshandstück                                               | 58      |
| 85900S             | Anspirationshandstück mit lateralem Port                           | 58      |
| 85901S19           | Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut                             | 58      |
| 85901S20           | Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut                             | 58      |
| 85902S19           | Irrigationshandstück mit lateralem Port                            | 58      |
| 85902S20           | Irrigationshandstück mit lateralem Port                            | 58      |
| 85903S19           | Biaxiale Irrigations-Chopper                                       | 58      |
| 85903S20           | Biaxiale Irrigations-Chopper                                       | 58      |
| 85910S             | CapsuleGuard IA® Handstück, 45°                                    | 57      |
| 85910ST            | CapsuleGuard® I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze               | 55      |
| 85912S             | CapsuleGuard IA® Handstück, gerade                                 | 57      |
| 85912ST            | CapsuleGuard® I/A Handstück, gerade                                | 55      |
| 85913S             | CapsuleGuard IA® Handstück, gebogen                                | 57      |
| 85913ST            | CapsuleGuard® I/A Handstück, gebogen                               | 55      |
| 85914S             | CapsuleGuard IA® Handstück für 1.8 C-MICS™, gerade                 | 57      |
| 85914ST            | CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, gerade                          | 55      |
| 85915S             | CapsuleGuard IA® Handstück für1.8 C-MICS™, 45°                     | 57      |
| 85915ST            | CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze         | 55      |
| 100027051          | Fußschalterbatterie                                                | 5       |
| ACPi-11            | Kapselspannring                                                    | 33      |
| ADAPTPRP           | Akreos® Adapt                                                      | 22/32   |
| ADAPTAOP / AO60PLC | Akreos® Adapt AO                                                   | 9/22/31 |
| AQ500G             | Balanced Salt Solution 500ml Glasflasche                           | 5/9/11  |
| BL11145            | Stellaris ELITE™ Anterior System                                   | 5       |
| BL14455            | Stellaris ELITE™ Kombiniertes System (ohneLaser)                   | 5       |
| BL15455            | Stellaris ELITE™ Kombiniertes System (mit Laser)                   | 5       |
| BL2394             | Integriertes Fußschalter                                           | 5       |
| BL3118             | 1,8 mm Sleeves                                                     | 13/18   |
| BL3124S            | 2,4 mm Sleeves                                                     | 12/18   |
| BL3170             | Stellaris® Phakohandstück                                          | 5       |
| BL3190             | Adapter Kit für anteriore Vitrektomie                              | 19      |
| BL3318S            | MICS™ Nadel 1.8                                                    | 18      |
| BL3318AS           | MICS™ Nadel 1.8 angewinkelt 30°                                    | 18      |
| BL3420S            | 2.0 MICS™ Nadel                                                    | 8/18    |
| BL3420AS           | 2.0 MICS™ Nadel                                                    | 18      |
| BL3270             | Stellaris® Fragmentationshandstück                                 | 18      |
| BL4363             | Stellaris ELITE™ Zero Level Bottle Hanger - Dual                   | 5       |
| BL4364             | Stellaris® Mayo Tray Adapter                                       | 5       |
| BL4391             | Wandladegerät für Fußschalter                                      | 5       |
| BL4393             | Fußschalter Ladestation                                            | 5       |
| BL4394             | Netzkabel für Fußschalter                                          | 5       |
| BL5110             | Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack                               | 14      |
| BL5111             | Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack                                 | 14      |
| BL5112             | Stellaris® StableChamber™ Phako Pack                               | 14      |
| BL5113             | Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade       | 14      |
| BL5113A            | Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt  | 14      |
| BL5114             | Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade       | 15      |
| BL5114A            | Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt  | 15      |

Produkt Referenz

Produktname

Seite

|                               |                                                                      |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| BL5115-1                      | Adaptive Fluidics™ Premium Pack                                      | 12/17       |
| BL5115-2                      | Adaptive Fluidics™ Standard Pack                                     | 11/17       |
| BL5115-3                      | Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Packs                               | 17          |
| BL5115-4                      | Adaptive Fluidics™ Basic Pack                                        | 10/12/17    |
| BL5275                        | Stellaris® Fragmentationsnadel 15°                                   | 5           |
| BL5277                        | Stellaris® Fragmentationsnadel 30°                                   | 5           |
| BL5612                        | Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)           | 21          |
| BL5623S                       | Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)           | 21          |
| BL5625S                       | Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)           | 21          |
| BLV3220000                    | Stellaris® Basic Phako Pack                                          | 15          |
| BSS-10PK                      | Balanced Salt Solution 500ml Plastikflasche                          | 5/9/11/13   |
| CC050S / CC100SL              | Viskoelastika OCUCOAT®                                               | 37          |
| CX9400                        | Bananenstecker Adapter                                               | 63          |
| CX9404                        | Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor                                        | 63          |
| CX9430                        | Bipolarkabel, Lemosa Adapter                                         | 63          |
| DP5501                        | 2,6 mm Sleeves                                                       | 18          |
| DP5531                        | 2,2 mm Sleeves                                                       | 10/18       |
| DP8230S                       | Microflow Nadel 30°                                                  | 12/18       |
| DP8245S                       | Microflow Nadel 45°                                                  | 18          |
| DP8330S                       | Microflow Plus Nadel 30°                                             | 18          |
| DP8430S                       | Thin Tip Nadel 30°                                                   | 18          |
| DP8730S                       | Microflow Nadel 30°                                                  | 18          |
| DYE100                        | Färbemittel                                                          | 41          |
| DYE200                        | Färbemittel                                                          | 09/11/13/41 |
| DYE300                        | Färbemittel                                                          | 41          |
| E7925                         | Bipolarstift, stumpf, 2-Pin-Konnektor                                | 62          |
| E7927                         | Bipolar-Konnektor, stumpf, Lemosa-Konnektor                          | 62          |
| E7928                         | Sklera Bipolarstift, Lemosa Adapter                                  | 62          |
| E7929 / E7930 / E7926 / E7932 | Bipolarstift, angeschrägt, Lemosa Adapter                            | 62          |
| E7931 / E7924 / E7933         | Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor                           | 62          |
| EYEC1NP/ EYEC1NPC             | EyeCee® One / EyeCee® One Crystal                                    | 23/28       |
| EYEFILL-SC                    | Viskoelastika EYEFILL®-SC.                                           | 36          |
| EYEFILL-C-WST                 | Viskoelastika EYEFILL® C.                                            | 36          |
| EYEFILL-HD-WST                | Viskoelastika EYEFILL® H.D                                           | 37          |
| EYEFILL-M                     | Viskoelastika EYEFILL® M.B.                                          | 36          |
| HF600                         | S1 IOL                                                               | 23/29       |
| IC8OUSBL                      | IC-8™                                                                | 22/26       |
| LP7510                        | Tellermesser, Anschliff oben, angewinkelt                            | 49          |
| LP7515                        | Messer für Stichinzision, 15 Grad                                    | 52          |
| LP7519                        | 19G MVR Messer                                                       | 49          |
| LP7520                        | 20G MVR Messer                                                       | 49          |
| LP7522                        | Messer für Stichinzision, 22.5 Grad                                  | 52          |
| LP7527                        | Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt                            | 49          |
| LP7528                        | Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt                            | 49          |
| LP7530                        | Messer für Stichinzision, 30 Grad                                    | 52          |
| LP7545                        | Messer für Stichinzision, 45 Grad                                    | 52          |
| LP7548ADB                     | Phakolanze 2.2 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig                 | 50          |
| LP7549ADB                     | Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig                  | 50          |
| LP7550A                       | Phakolanze 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben                        | 50          |
| LP7551A                       | Phakolanze 2.65 mm, angewinkelt Anschliff oben                       | 50          |
| LP7551ADB                     | Phakolanze 2.65 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig                 | 50          |
| LP7552ADB                     | Phakolanze 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig                  | 50          |
| LP7553A                       | Phakolanze 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben                       | 50          |
| LP7556A                       | Phakolanze 3.0 mm, angewinkelt Anschliff oben                        | 50          |
| LP7557A                       | Phakolanze 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben                        | 50          |
| LP7559A                       | Phakolanze 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben                       | 50          |
| LP7582                        | Trapezoides Messer, 2.85 – 3.2 mm angewinkelt                        | 52          |
| LP7592                        | Sideport Messer 1.1 mm, angewinkelt                                  | 52          |
| LP7593                        | Sideport Messer 0.8 mm, angewinkelt                                  | 53          |
| LP7594                        | Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt                            | 49          |
| LP7595                        | Clear Corneal Messer 1.6 mm, angewinkelt                             | 49          |
| LP7596                        | Trapezoides Messer, 1.5 – 2.0 mm angewinkelt                         | 52          |
| LP7599                        | Trapezoides Messer, 1.5 – 1.7 mm angewinkelt                         | 52          |
| LP7600                        | Trapezoides Messer, 1.6 – 1.8 mm angewinkelt                         | 52          |
| LP7601                        | Trapezoides Messer, 2.0 – 2.2 mm angewinkelt                         | 52          |
| LP7603                        | Trapezoides Messer, 1.8 – 2.2 mm angewinkelt                         | 52          |
| M0638-02/10                   | Retrobulbärkanüle n. Atkinson                                        | 44          |
| M2273B-02/10                  | Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 45°, 7.5 mm               | 45          |
| M2273G-02/10                  | Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 35°, 5.5 mm               | 45          |
| M2657-02/10                   | Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch | 45          |
| M2658-02/10                   | Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch | 45          |
| M3000F-02/10                  | Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet                  | 46          |
| M3610S-02/10                  | Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz            | 46          |
| M3926A-02/10                  | Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 35°, 9mm                  | 45          |
| M4498-02/5                    | Infusionshandstück für schwere Flüssigkeiten                         | 48          |

| Produkt Referenz         | Produktname                                                              | Seite      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| M9277-02/10              | Tränenwegkanüle, gebogen                                                 | 48         |
| MI60P                    | Akreos® MICS                                                             | 22/30      |
| MXE / MXPLC / MXET       | enVista® & enVista® TORIC                                                | 13/22/24   |
| SD1273/10                | Vorderkammerkanule n. Rycroft                                            | 44         |
| SD1275/10                | Retrobulbärkanüle                                                        | 44         |
| SD1280/10                | Vorderkammerkanule n. Rycroft                                            | 44         |
| SD1605/10                | Kapselpolierer, mattierte Spitze                                         | 48         |
| SD1610/10                | Irrigationszystotomkanüle, abgerundet                                    | 46         |
| SD1618/10                | Irrigationszystotomkanüle, abgerundet                                    | 46         |
| SD1637/10                | Retrobulbärkanüle n. Atkinson                                            | 44         |
| SD1639/10                | Vorderkammerkanule n. Rycroft                                            | 44         |
| SD2639/10                | Viskokanüle, angewinkelt                                                 | 47         |
| SD3902/10                | Hydrodissektionskanüle, angewinkelt, - abgeflachte Spitze                | 47         |
| SD4804/10                | Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet                      | 46         |
| SD5003/10                | J-förmige Hydrodissektionskanüle                                         | 47         |
| SD5005/10                | Kapselpolierer mit Silikonspitze                                         | 48         |
| SD5037/10                | Hydrodissektionskanüle, angewinkelt                                      | 8/10/12/47 |
| SD5042/10                | Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz                | 46         |
| SD5099/10                | Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgeflachte Spitze, vertikal  | 46         |
| SD5106/10                | Irrigationskanule n. Charleux                                            | 47         |
| SD5108/10                | Peribulbärkanüle n. Atkinson                                             | 44         |
| SD5109/10                | Peribulbärkanüle n. Atkinson                                             | 44         |
| SD5155/10                | Hydrodissektionskanüle Helsinki, gebogen, abgeflachte Spitze, horizontal | 46         |
| SD5176/10                | Sub-Tenon Anästhesie Kanüle                                              | 44         |
| SE5620AV                 | Anteriore Vitrektomie Pack                                               | 19         |
| SE5623AV                 | Anteriore Vitrektomie Pack                                               | 19         |
| SE5623                   | Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)                            | 19         |
| SE5625                   | Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)                            | 19         |
| SUB7515                  | Messer für Stichinzision, 15 Grad                                        | 52         |
| SUB7522                  | Messer für Stichinzision, 22.5 Grad                                      | 52         |
| SUB7528                  | Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt                                | 49         |
| SUB7530                  | Messer für Stichinzision, 30 Grad                                        | 52         |
| SUB7545                  | Messer für Stichinzision, 45 Grad                                        | 52         |
| SUB7548ADB               | Phakolanze 2.2 mm ,angewinkelt Anschliff beidseitig                      | 52         |
| SUB7549ADB               | Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig                      | 12/51      |
| SUB7550A                 | Phakolanze 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben                            | 51         |
| SUB7559A                 | Phakolanze 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben                           | 51         |
| SUB7552ADB               | Phakolanze 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig                      | 51         |
| SUB7553A                 | Phakolanze 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben                           | 51         |
| SUB7557A                 | Phakolanze 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben                            | 51         |
| SUB7596                  | Trapezoides Messer, 1.5 – 2.0 mm angewinkelt                             | 8/51       |
| SUB7599                  | Trapezoides Messer, 1.5 – 1.7 mm angewinkelt                             | 52         |
| SUB7600                  | Trapezoides Messer, 1.6 – 1.8 mm angewinkelt                             | 52         |
| SUB7601                  | Trapezoides Messer, 2.0 – 2.2 mm angewinkelt                             | 10/52      |
| SUE01-12                 | Kapsulorhexispinzette                                                    | 61         |
| SUE02-12                 | Pinzette n. Bonn                                                         | 61         |
| SUE03-12                 | Fadenpinzette, gerade                                                    | 61         |
| SUE04-12                 | Fadenpinzette n. McPherson                                               | 61         |
| SUE05-12                 | Fadenpinzette n. Pierse                                                  | 61         |
| SUE06-12                 | MICS™ Kapsulorhexispinzette                                              | 61         |
| SUE07-12                 | MICS™ Kapsulorhexispinzette mit Markierungen                             | 61         |
| SUE08-12                 | MICS™ Kapsulorhexispinzette, Branchen gebogen                            | 61         |
| SUF01                    | Koch Stop & Chop Manipulator                                             | 60         |
| SUF02                    | IOL Häkchen n. Sinsky                                                    | 60         |
| SUF03                    | Phako-Spatel                                                             | 60         |
| SUF04                    | Nukleusmanipulator n. Drysdale                                           | 60         |
| SUF05                    | Y-Häkchen, horizontal                                                    | 60         |
| SUF06                    | Y-Häkchen, vertikal                                                      | 60         |
| SUH01                    | Lidsperrer n. Barraquer                                                  | 60         |
| SUH04                    | Lidsperrer mit Feststellschraube                                         | 60         |
| SUI20-12                 | MICS™ Kapsulorhexispinzette, 1.0 mm                                      | 61         |
| SUP06                    | ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm                                      | 59         |
| SUP06ST                  | Stellaris® ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm                           | 59         |
| YSMART / YSMARTT / SMART | LuxSmart™ (toric) & LuxSmart™ Crystal                                    | 11/22/25   |
| YGOOD / GOOD             | LuxGood™ & LuxGood™ Crystal                                              | 11/23/27   |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>VISIBLE LASER RADIATION<br/>AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE<br/>TO DIRECT OR SCATTERED<br/>RADIATION<br/>CLASS 2 &amp; 4 LASER PRODUCTS<br/>(IEC 60825-1:2007)</p> | <p>Aiming beam:<br/>Class 2, <math>\lambda = 635 \text{ nm}</math> 1 mW CW (max)<br/>Treatment beam:<br/>Class 4, <math>\lambda = 532 \text{ nm}</math> 2W CW (max)</p> |
|                                                                                     | <p>Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007</p> <p>015000642 / 4104600</p>            |                                                                                                                                                                         |

 Bausch & Lomb  
Incorporated  
Rochester, NY 14609, USA

 Bausch + Lomb GmbH  
Im Schuhmachergewann 4  
69123 Heidelberg, Germany

 Bausch + Lomb GmbH  
Brunsbütteler Damm 165 - 173  
13581 Berlin, Germany

**Deutschland**  
Bausch & Lomb GmbH  
Tel.: 0800 58 93 114  
Fax: 01805 90 94 90 94  
[www.bausch-lomb.de/surgical](http://www.bausch-lomb.de/surgical)

**Österreich**  
Bausch & Lomb GmbH  
Tel.: 0800 241 015  
Fax: 0800 241 016  
[www.bausch-lomb.at/surgical](http://www.bausch-lomb.at/surgical)

**Schweiz**  
Bausch & Lomb Swiss AG  
Tel.: 0848 228 724  
Fax: 0848 228 725  
[www.bausch-lomb.ch/surgical](http://www.bausch-lomb.ch/surgical)

[kontakt-surgical@bausch.com](mailto:kontakt-surgical@bausch.com)

[www.discoverstellariselite.com](http://www.discoverstellariselite.com)

 Bausch + Lomb Surgical DACH

 Bausch+Lomb Surgical