

Katarakt

Produktkatalog



INHALTSVERZEICHNIS

Stellaris® Plattform	4
Stellaris® Plattform Anterior System / Zubehör	5
Setup	6
Operieren mit Stellaris Elite™	8
Packs für Stellaris Elite™	14
Phakonadeln	18
Anteriore Vitrektomie	19
Intraokularlinsen	20
Übersicht hydrophobe Intraokularlinsen	24
Übersicht hydrophile Intraokularlinsen	30
PMMA IOL Intraokularlinse	34
Zubehör	35
Viskoelastika	36
Intraokulare Färbemittel	40
Einmalinstrumente	44
Kanülen	46
Messer	51
I/A Handstücke	56
Manipulator und Lidsperrerr	62
Pinzetten	63
Bipolarstifte	64
Zubehör	65
Wiederverwendbare Instrumente	66
Scheren	68
Lidsperrerr	68
Manipulatoren	69
Nadelhalter	70
Pinzetten	71
I/A Handstücke	73
Über Bausch + Lomb	74
Index	76

Stellaris Elite™ - Ihre neue Partnerin im OP

Ob zur Behandlung von Katarakten oder für den Einsatz im vitreoretinalen Bereich – Stellaris Elite™ ist dafür geschaffen, Spitzenleistungen zu ermöglichen. Sowohl die Ausführung als Phakogerät als auch das kombinierte System bestechen durch innovative Features, welche die Patientensicherheit, einen effizienten Ablauf sowie eine optimale Unterstützung Ihrer individuellen OP-Technik in den Fokus stellen.

Entwickelt für die Zukunft

Stellaris Elite™ ist das Resultat der langjährigen Geräteexpertise von Bausch + Lomb und überzeugt mit Technologien, die nicht nur heutigen Anforderungen entsprechen, sondern für die Zukunft bereit sind. Vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit der Stellaris® Plattform sowie die Expertise unserer Mitarbeiter. Gemäß unserem Leitsatz „See Better. Live Better“ verpflichten wir uns zu höchsten Qualitäts- und Servicestandards, um für Sie und Ihre Patienten beste Resultate zu erzielen.



ADAPTIVE FLUIDICS™

- Verbesserte Vorderkammerstabilität**
durch minimierte IOD Schwankungen, u.a. minimierter Post-Okklusions-Sog
- Weniger Belastung für das Auge**, da bei inaktivem Vakuum kein hoher IOD entsteht - schont die Cornea, und ist angenehmer für den Patienten
- Erhöhte Sicherheit**
durch verschiedene Reflux-Modi: Continuous, Single High, Single Low



ATTUNE® PHAKO

- Sechs effiziente Piezokristalle**
- 150 µm Bewegung der Nadel, longitudinal
 - mechanisches Schneiden und Kavitation
- Sicherer 28,5 kHz Ultraschall**
- Geringe Wärmeentwicklung
 - Anti Corneal Burn



KABELLOSER DUAL LINEARER FUSSSCHALTER

- Schnelle Ansprache
- Individuelle Programmierung
- Optimale Kontrolle



JETZT QR-CODE SCANNEN

Weitere Informationen und Inhalte auf der Stellaris Elite™ Produktwebsite finden Sie neben begleitenden wissenschaftlichen Beiträgen, unter anderem Erfahrungsberichte sowie weiterführende Produktvideos zu dem Equipment Portfolio von Bausch + Lomb.



Stellaris Elite™ Anterior System
BL11145

Stellaris Elite™ Kombiniertes System (mit Laser)
BL15455

Stellaris Elite™ Kombiniertes System (ohne Laser)
BL14455

Fußschalter Stellaris Elite™
BL2394

Fußschalterbatterie
100027051

Wandladegerät für Fußschalter
BL4391

Fußschalter Ladestation
BL4393

Netzkabel für Fußschalter
BL4394

Stellaris Elite™ Zero Level Bottle
Hanger - Dual Bottle
BL4363




= 1



Stellaris® Mayo Tray Adapter
BL4364



= 1

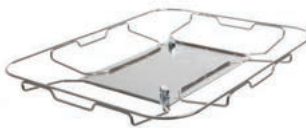

Stellaris® Phakohandstück
BL3170



= 1

Stellaris® Fragmentationshandstück
BL3270



= 1

Stellaris® Fragmentationsnadel 15°

20G BL5275



= 6



Stellaris® Fragmentationsnadel 30°

23G BL5277



= 6



BALANCED SALT SOLUTION

500 ml Plastikflasche
BSS-10PK



= 10

500 ml Glasflasche
AQ500G



= 12

Setup




OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: < 2.0 mm

ZUBEHÖR


Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt

SUB7596

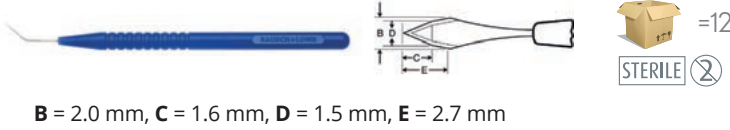

MICS Nadel 2,0

BL3420S

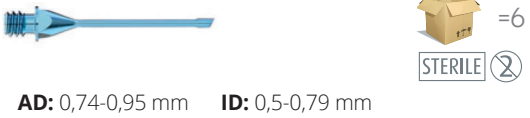

EQUIPMENT

Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Pack

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

BL5115-3

Bestandteile:

- A** Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber®

B Nadelschlüssel

C 21G COOLFLOW Sleeve

D Verschlussstopfen
- E** Testkammer

F Nadeleinheit zum Vorstechen

G Mayo Tray Abdeckung

H Bildschirmabdeckung

I Abdeckung für die Fernbedienung

J MICS™ Nadel 2,0

Hydrodissektionskanüle

25G SD5037/10



1,8 mm Sleeves

BL3118



< 2.0 mm



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: < 2.0 mm

VISKOELASTIKA

AMVISC® PLUS

60081L

- Besonders für MICS-Techniken geeignet
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche BSS-10PK



FÄRBE MITTEL

BLutein™ Phaco Lutein

DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 43.

500ml Glasflasche AQ500G



INTRAOKULARLINSEN

Akreos® Adapt AO

ADAPTAOPV
AO60PLC

- Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast
- Geeignet für kombinierte Kapselsack-/Sulkus-Implantation
- Hydrophile (preloaded) IOL für 1.8 mm Inzision

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.


Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.

OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - **Inzisionsgröße: 2.2 mm**

ZUBEHÖR

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt

SUB7601

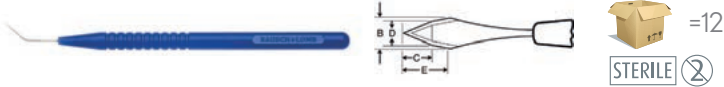

B = 2.2 mm, C = 1.9 mm, D = 2.0 mm, E = 3.0 mm

Microflow Nadel 30°

DP8730S



EIG: 2,2 mm AD: 0,90 mm ID: 0,70-0,50 mm

EQUIPMENT

Adaptive Fluidics™ Basic Pack

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

BL5115-4

Bestandteile:

- A Sammelbehälter, standard Schlauchsystem
- B Nadelschlüssel
- C MICS™ Sleeve (1,8)
- D Verschlussstopfen

- E Testkammer
- F Nadeleinheit zum Vorstechen
- G Mayo Tray Abdeckung
- H Bildschirmabdeckung
- I Abdeckung für die Fernbedienung



Hydrodissektionskanüle

25G SD5037/10



2,2 mm Sleeves

DP5531



2.2 mm



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.

Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu



SCAN MICH

OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - **Inzisionsgröße: 2.2 mm**

VISKOELASTIKA

AMVISC®

59081L

- Indiziert für Standard Katarakt OPs
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

500ml Plastikflasche BSS-10PK



INTRAOKULARLINSEN

LuxSmart™ & LuxGood™

YSMART / YSMARTT / SMART & YGOOD / GOOD

- IOL Plattform - (Torische) EDOF & Monofokale IOL
- Einfaches Preloaded System
- Mit & ohne Violettlichtfilter

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.

FÄRBEMITTEL

BLutein™ Phaco Lutein

DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 43.

500ml Glasflasche AQ500G



INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.


Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.




OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.4 mm

ZUBEHÖR

Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig
SUB7549ADB

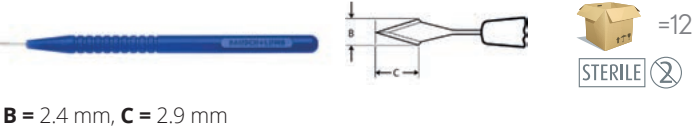

Microflow Nadel 30°

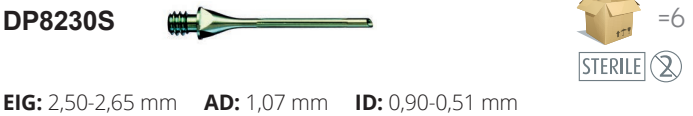

EQUIPMENT

Adaptive Fluidics™ Premium Pack

Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

BL5115-1

Bestandteile:

- | | |
|---|--|
| A Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber® | E Testkammer |
| B Nadelschlüssel | F Nadeleinheit zum Vorstechen |
| C 2 MICS™ Sleeves (2,4) | G Mayo Tray Abdeckung |
| D Verschlussstopfen | H Bildschirmabdeckung |
| | I Abdeckung für die Fernbedienung |
| | J MICS™ Nadel 2,0 |

Hydrodissektionskanüle



2,4 mm Sleeves



OPERIEREN MIT STELLARIS ELITE™ - Inzisionsgröße: 2.4 mm

VISKOELASTIKA

AMVISC® PLUS
60081L

- Besonders für MICS-Techniken geeignet
- Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität
- Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben



Eine Übersicht unserer Viskoelastika finden Sie auf Seite 38/39.

BALANCED SALT SOLUTION

500ml
Plastikflasche
BSS-10PK




INTRAOKULARLINSEN

enVista®
MXE / MXPLC / MXET

- (Torische) Monofokale, asphärische IOL
- Maximale Rotations- und Refraktionsstabilität

Eine Übersicht unseres Angebots an Intraokularlinsen finden Sie auf Seite 22/23.

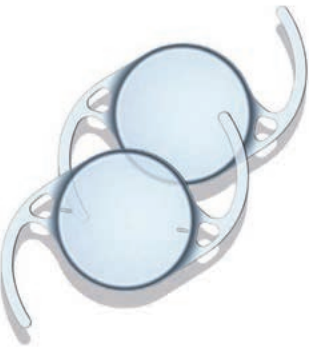

BLutein™ Phaco Lutein

DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis



Eine Übersicht unserer Färbemittel finden Sie auf Seite 43.

500ml
Glasflasche
AQ500G



INSTRUMENTE

Sterile Einmal-Instrumente – einzeln verpackt oder als Set im individuellen Per Procedure Tray.

Neben den klassisch einzeln verpackten Einmal-Instrumenten können Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray bestehend aus einem kompletten Set einmalsteriler Instrumente, entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik, selbst konfigurieren.

Eine Übersicht unserer Instrumente finden Sie auf Seite 46-65.



Scannen Sie den QR-Code und konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu



SCANN MICH

INDIVIDUELLE CUSTOM PACKS

Ob OP-Kittel, Handschuhe, Abdecktücher oder Spritzen und Kanülen: stellen Sie sich ihr persönliches Custom Pack nach Ihren individuellen Bedürfnissen zusammen.

Gerne helfen wir Ihnen ihre optimale Set-Konfiguration zu finden. Sprechen Sie uns gerne auf unsere Custom Pack Möglichkeiten an.




PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
BL5110

Bestandteile:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | E 2 Sleeves (2,6) |
| B Mayo Tray Abdeckung | F Verschlussstopfen |
| C Bildschirmabdeckung | G Testkammer |
| D Abdeckung für Fernbedienung | H Nadelschlüssel |

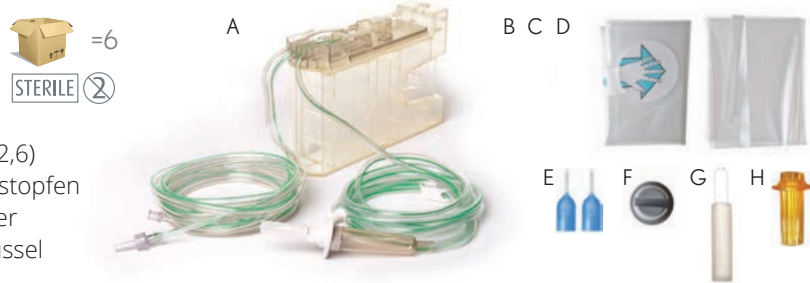

Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack
BL5111

Bestandteile:


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | D Testkammer |
| B Sleeve (2,6) | E Nadelschlüssel |
| C Verschlussstopfen | |



Stellaris® StableChamber™ Phako Pack
BL5112

Bestandteile:


- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | E 2 Sleeves (2,6) |
| B Mayo Tray Abdeckung | F Verschlussstopfen |
| C Bildschirmabdeckung | G Testkammer |
| D Abdeckung für Fernbedienung | H Nadelschlüssel |
| | I Stable Chamber |

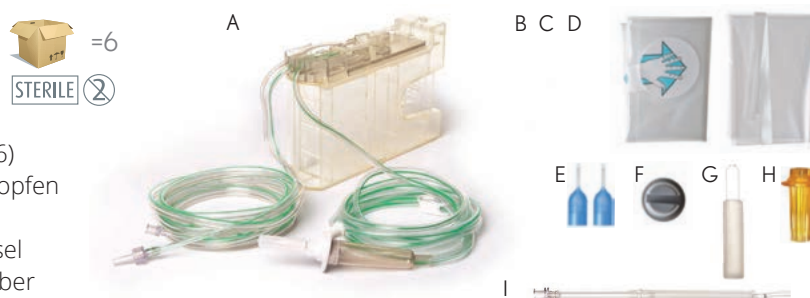

Stellaris® StableChamber™ Phako Pack
mit MICS™ Nadel, gerade
BL5113

Bestandteile:


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | F Verschlussstopfen |
| B Mayo Tray Abdeckung | G Testkammer |
| C Bildschirmabdeckung | H Nadelschlüssel |
| D Abdeckung für Fernbedienung | I Stable Chamber |
| E 2 Sleeves (1,8) | J MICS™ Nadel, gerade |

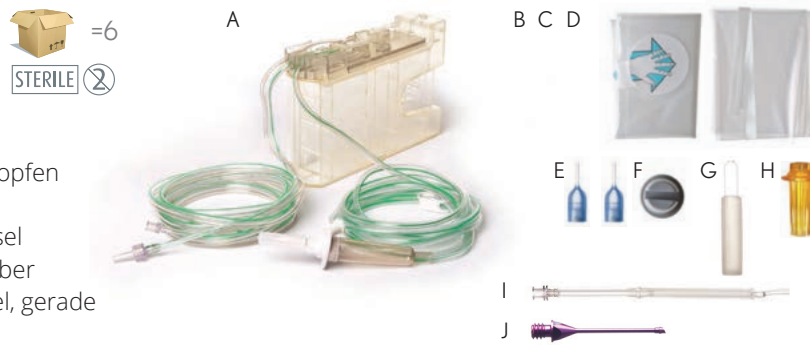

Stellaris® StableChamber™ Phako Pack
mit MICS™ Nadel, angewinkelt
BL5113A

Bestandteile:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | F Verschlussstopfen |
| B Mayo Tray Abdeckung | G Testkammer |
| C Bildschirmabdeckung | H Nadelschlüssel |
| D Abdeckung für Fernbedienung | I Stable Chamber |
| E 2 Sleeves (1,8) | J MICS™ Nadel, angewinkelt |

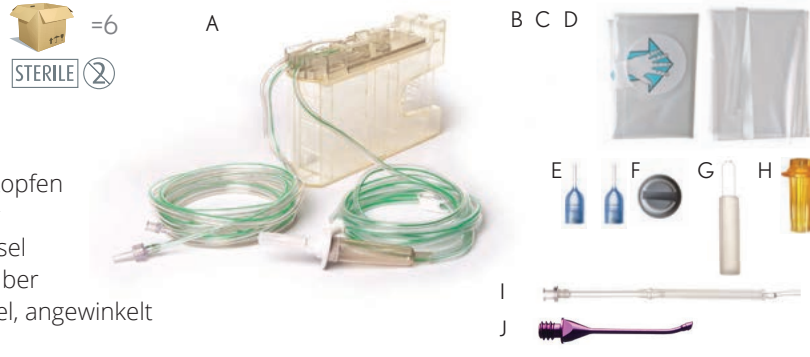


PACKS FÜR STELLARIS ELITE™

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
mit MICS™ Nadel, gerade
BL5114

Bestandteile:


- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | E MICS™ Sleeves (1,8) |
| B Mayo Tray Abdeckung | F Verschlussstopfen |
| C Bildschirmabdeckung | G Testkammer |
| D Abdeckung für Fernbedienung | H Nadelschlüssel |
| | I MICS™ Nadel, gerade |

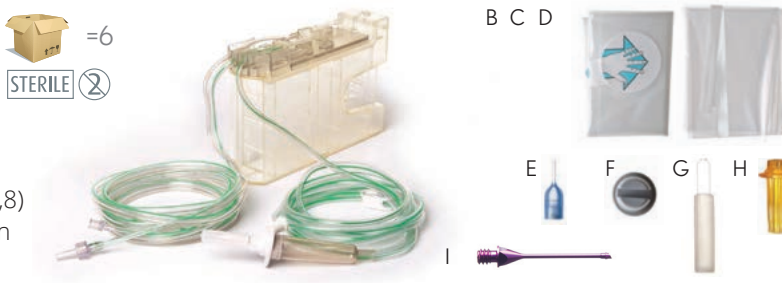

Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack
mit MICS™ Nadel, angewinkelt
BL5114A

Bestandteile:


- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | E MICS™ Sleeves (1,8) |
| B Mayo Tray Abdeckung | F Verschlussstopfen |
| C Bildschirmabdeckung | G Testkammer |
| D Abdeckung für Fernbedienung | H Nadelschlüssel |
| | I MICS™ Nadel, angewinkelt |

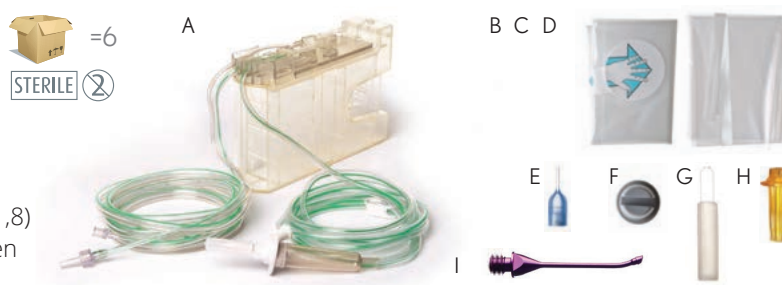

Stellaris® Basic Phako Pack
BLV3220000

Bestandteile:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| A Sammelbehälter und I/A Set | D 2 Sleeves (2,2) |
| B Mayo Tray Abdeckung | E Verschlussstopfen |
| C Bildschirmabdeckung | F Testkammer |

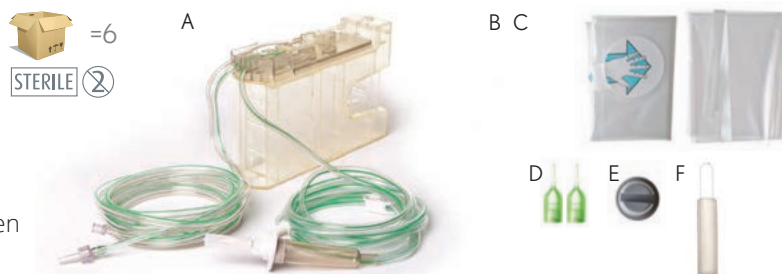


Adaptive Fluidics™ – proaktiver Ansatz für eine verbesserte Vorderkammerstabilität

Zuverlässigkeit und Sicherheit sind im OP oberstes Gebot. Aus diesem Grund ist Stellaris Elite™ mit smarten Funktionen, wie Adaptive Fluidics™ für optimale Vorderkammerstabilität, ausgestattet. Das innovative Fluidiksystem reguliert selbstständig den Infusionsdruck und hält Ihnen den Rücken frei, damit Sie Ihre Aufmerksamkeit noch stärker auf den eigentlichen Eingriff richten können.

IHRE VORTEILE MIT ADAPTIVE FLUIDICS™

- **Verbesserte Vorderkammerstabilität** durch minimierte IOD Schwankungen, u.a. minimierter Post-Okklusions-Sog
- **Weniger Belastung für das Auge,** da bei inaktivem Vakuum kein hoher IOD entsteht - schont die Cornea, und ist angenehmer für den Patienten
- **Erhöhte Sicherheit durch verschiedene Reflux-Modi:**
 - Continuous
 - Single High
 - Single Low
- **Adaptive Fluidics™ hält Ihnen den Rücken frei.** So können Sie sich voll und ganz auf den eigentlichen Eingriff konzentrieren.

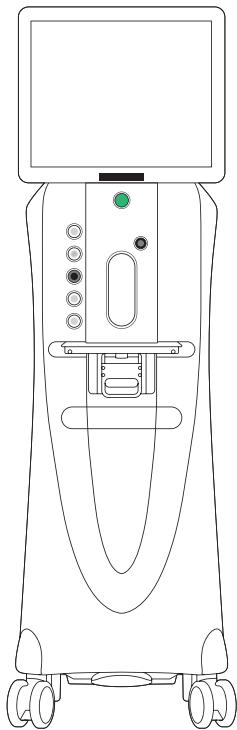


Weiterführende Informationen zur Technologie




SCAN MICH

Verlauf des IOD bei fixem Infusionsdruck

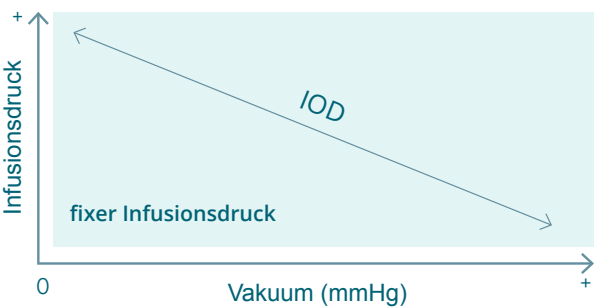


Intraokularer Druck (IOD) fällt mit steigendem Vakuum

Verlauf des IOD bei fixem Infusionsdruck

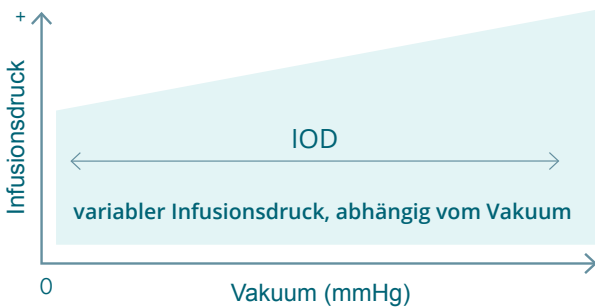

Stabiler IOD während des gesamten Eingriffes


Adaptive Fluidics™ Premium Pack BL5115-1

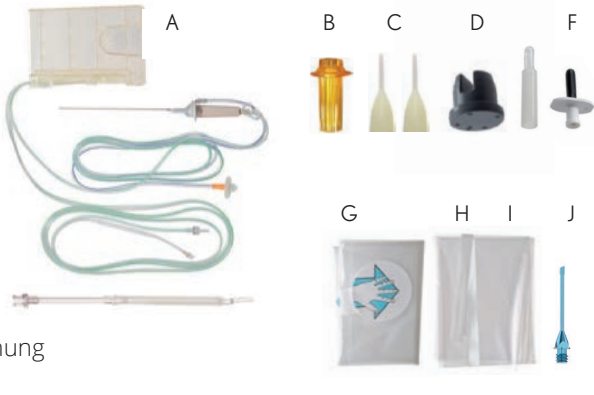

Bestandteile:

- | | |
|---|--|
| A Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber® | E Testkammer |
| B Nadelschlüssel | F Nadeleinheit zum Vorstechen |
| C 2 MICSTM Sleeves (2,4) | G Mayo Tray Abdeckung |
| D Verschlussstopfen | H Bildschirmabdeckung |
| | I Abdeckung für die Fernbedienung |
| | J MICSTM Nadel 2,0 |


Adaptive Fluidics™ Standard Pack BL5115-2

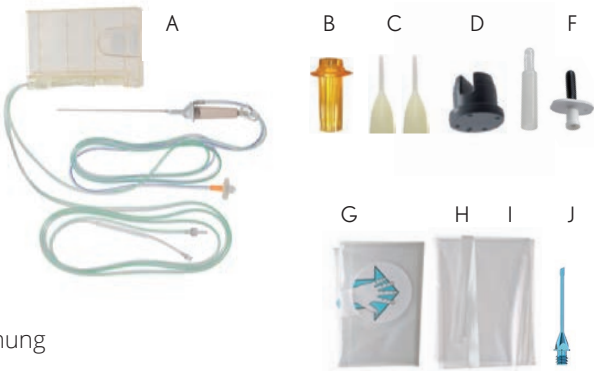

Bestandteile:

- | | |
|--|--|
| A Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux | F Nadeleinheit zum Vorstechen |
| B Nadelschlüssel | G Mayo Tray Abdeckung |
| C 2 MICSTM Sleeves (2,4) | H Bildschirmabdeckung |
| D Verschlussstopfen | I Abdeckung für die Fernbedienung |
| E Testkammer | J MICSTM Nadel 2,0 |


Adaptive Fluidics™ MICSTM Premium Packs BL5115-3

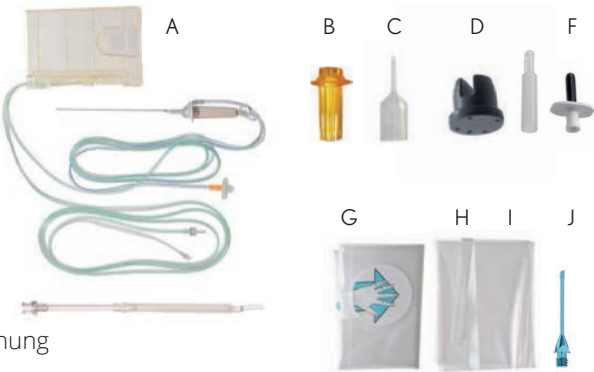

Bestandteile:

- | | |
|---|--|
| A Sammelbehälter, Schlauchsystem mit Pulse Reflux und StableChamber® | E Testkammer |
| B Nadelschlüssel | F Nadeleinheit zum Vorstechen |
| C 21G COOLFLOW Sleeve | G Mayo Tray Abdeckung |
| D Verschlussstopfen | H Bildschirmabdeckung |
| | I Abdeckung für die Fernbedienung |
| | J MICSTM Nadel 2,0 |

Adaptive Fluidics™ Basic Pack BL5115-4

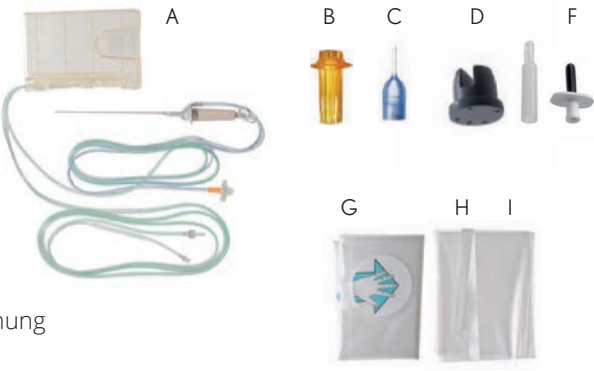

Bestandteile:

- | | |
|--|--|
| A Sammelbehälter, standard Schlauchsystem | E Testkammer |
| B Nadelschlüssel | F Nadeleinheit zum Vorstechen |
| C MICSTM Sleeves (1,8) | G Mayo Tray Abdeckung |
| D Verschlussstopfen | H Bildschirmabdeckung |
| | I Abdeckung für die Fernbedienung |

PHAKONADELN

PHAKONADELN FÜR MICS™ OPS

MICS™ Nadel 1,8 BL3318S EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm	  =6 STERILE	MICS™ Nadel 1,8 30° angewinkelt BL3318AS EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm	  =6 STERILE
MICS™ Nadel 2,0 BL3420S EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm	  =6 STERILE	MICS™ Nadel 2,0 30° angewinkelt BL3420AS EIG: 1,8-2,00 mm AD: 0,74-0,95 mm ID: 0,5-0,79 mm	  =6 STERILE

STANDARD PHAKONADELN

Thin Tip Nadel 30° DP8430S EIG: 2,5-2,65 mm AD: 0,90 mm ID: 0,67 mm	  =6 STERILE	Microflow Nadel 30° DP8730S EIG: 2,2 mm AD: 0,90 mm ID: 0,70-0,50 mm	  =6 STERILE
Microflow Nadel 30° DP8230S EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm	  =6 STERILE	Microflow Nadel 45° DP8245S EIG: 2,50-2,65 mm AD: 1,07 mm ID: 0,90-0,51 mm	  =6 STERILE
Microflow Plus Nadel 30° DP8330S EIG: 2,75-2,85 mm AD: 1,17 mm ID: 0,98-0,61 mm	  =6 STERILE		

STANDALONE SLEEVES

1,8 mm Sleeves BL3118   =12 x 2 STERILE	2,2 mm Sleeves DP5531   =12 x 2 STERILE
2,4 mm Sleeves BL3124S   =12 x 2 STERILE	2,6 mm Sleeves DP5501   =12 x 2 STERILE

ANTERIORE VITREKTOMIE

Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

20G SE5620AV  =6 STERILE	
Bestandteile: • 20G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem • 22G Irrigations Handstück (85806ST) • Koaxiales Infusionsleeve- und Schlauchset	

Anteriore Vitrektomie Pack (Stellaris Elite™ Kombiniert)

23G SE5623AV  =6 STERILE	
Bestandteile: • 23G Anterior Vitrectomie Cutter (7.500 cpm) inkl. Schlauchsystem • 22G Irrigations Handstück (85807ST)	

Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior / Stellaris® PC)


20G BL5612 23G BL5623S 25G BL5625S  =6 STERILE	
23 und 25G Cutter benötigen männlich - männlich Luer-Adapter aus dem Adapter Kit BL3190	

Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)





23G SE5623 25G SE5625  =6 STERILE	
---	---

Adapter Kit für anteriore Vitrektomie
BL3190

Bestandteile: A Infusionskanüle B Männlich - männlich Luer-Adapter C Adapterschlauch (benötigt für Stellaris® PC)	
--	--

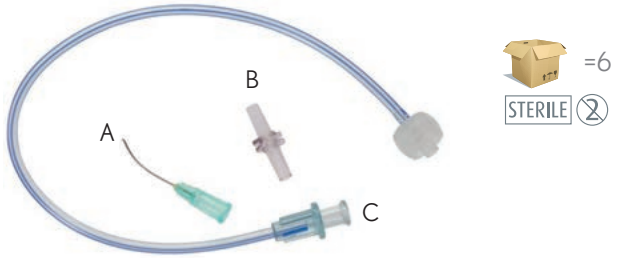

INTRAOKULAR- LINSEN

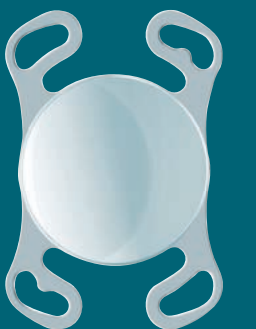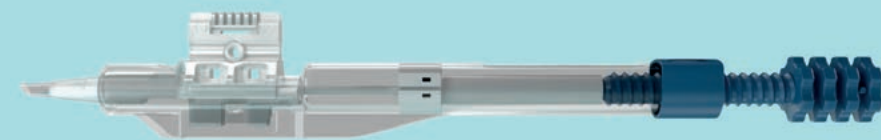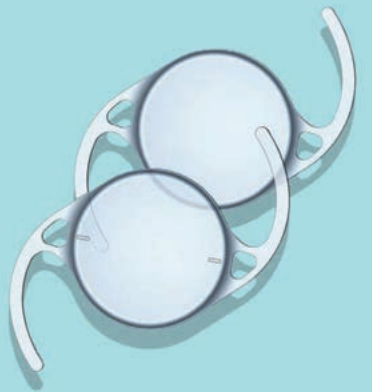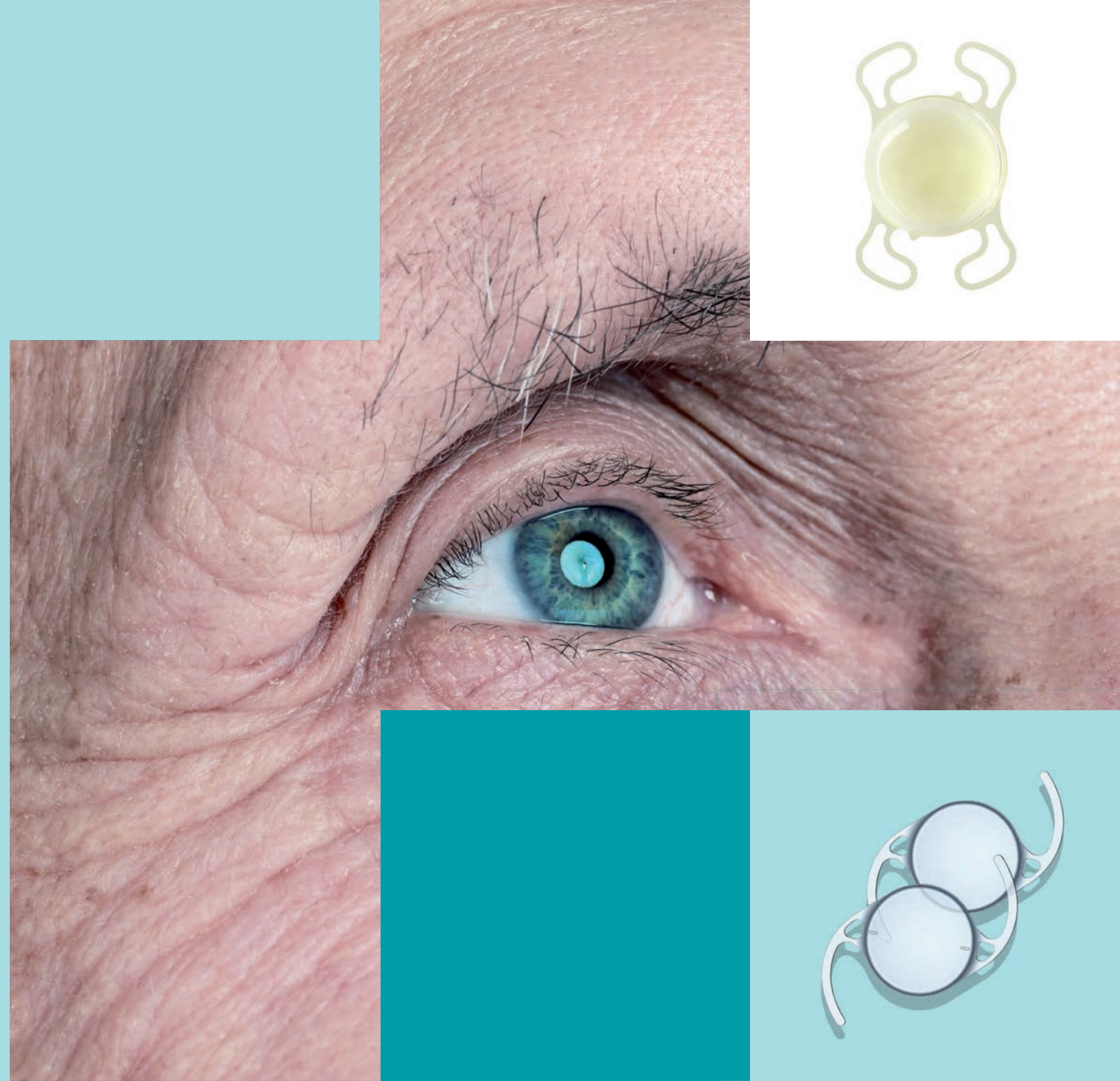

	Hydrophobe IOL			
	enVista® & enVista® toric	LuxSmart™ & LuxSmart™ toric		IC-8™
				
	Preloaded, Glisteningfrei	Preloaded, EDOF		
Art.-Nr.	MXE / MXPLC / MXET		YSMART / YSMARTT	
Material	hydrophobes Acrylat, einteilig		hydrophobes Acrylat, einteilig	
Typ	hydrophobe HKL		hydrophobe HKL	
Optikdesign	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex, (torisch)		EDOF, asphärisch , (torisch)	
Haptikdesign	C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung		Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung	
Optikdurchmesser	6,0 mm		6,0 mm	
Gesamtdurchmesser	12,5 mm		11,0 mm	
Refraktiver Index bei 35°C	1,53		1,54	
Lichtfilter	UV		UV, Violette Licht	
Dioptrien in dpt	enVista® 0,0 - 10,0 und 30,0 -34,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten	enVista® toric 6,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten	LuxSmart™ 0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 34,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten	LuxSmart™ toric 6,0 - 10,0 und 31,0 - 34,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,5 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Zylinder in dpt	1,25 - 5,75		0,75 - 6,0 dpt	
Inzision	2,2 mm		2,2 mm	
Injektor	INJ100 (INJ100) BLIS Injektor mit Kartusche (BLIS-R1) Preloaded: SimpliEYE™ (nur für die enVista® verfügbar)		Preloaded: Accuject™ Pro	
			Steriles Single-Use IC-8™ IOL Injektorsystem	

	Hydrophile IOL		
	Akreos® MICS	Akreos® Adapt AO	Akreos® Adapt
			
		Preloaded	
Art.-Nr.	MI60P	ADAPTAOPV / AO60PLC	ADAPTPRP
Material	hydrophiles Acrylat, einteilig	hydrophiles Acrylat, einteilig	hydrophiles Acrylat, einteilig
Typ	hydrophile HKL	hydrophile HKL	hydrophile HKL
Optikdesign	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex	monofokal, sphärisch, equikonvex
Haptikdesign	Vierpunkt-Haptik 10° Anwinkelung	Vierpunkt-Haptik 0° Anwinkelung	Vierpunkt-Haptik 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,2 mm (0 - 15,0 dpt), 6,0 mm (15,5 - 22,0 dpt) 5,6 mm (22,5 - 30,0 dpt)	6,0 mm	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm (0 - 15,0 dpt), 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)	11,0 mm (0 - 15,0 dpt),10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)	11,0 mm (0 - 15,0 dpt), 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)
Refraktiver Index bei 35°C	1,46	1,46	1,46
Lichtfilter	UV	UV	UV
Dioptrien	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	1,8 mm	1,8-2,2 mm	2,2 mm
Injektor	Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)	Viscoject 2.2 (LP604340) Viscoject BIO 1.8 (LP604350C) Preloaded: SimpliEYE™	Viscoject 2.2 (LP604340)

	Hydrophobe IOL		
	LuxGood™	EyeCee® One & EyeCee® One Crystal	S1 IOL*
			
	Preloaded	Preloaded	
Art.-Nr.	YGOOD	EYEC1NP/ EYEC1NPC	HF600
Material	hydrophobes Acrylat, einteilig	hydrophobes Acrylat, einteilig	hydrophobes Acrylat, einteilig
Typ	hydrophobe HKL	hydrophobe HKL	hydrophobe HKL
Optikdesign	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral	monofokal, asphärisch, aberrationskorrigierend (-0,13 µm SA)	monofokal, sphärisch, bikonvex
Haptikdesign	Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung	C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung	C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm	13,00 mm	13,0 mm
Refraktiver Index bei 35°C	1,54	1,52	1,48
Lichtfilter	UV, Violette Licht	UV, Blaulicht	UV
Dioptrien in dpt	0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 34,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten	1,0 - 5,0 und 27,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 5,0 - 27,0 in 0,5 in 0,5 dpt-Schritten	5,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	2,2 mm	2,2 - 2,4 mm	2,2 - 2,4 mm
Injektor	Preloaded: Accuject™ Pro	Preloaded NP-1	Bioject-P220 (12INJ0246)

	Hydrophile/ PMMA IOL	
	Loop Keeper™**	Loop Guardian™**
		
Art.-Nr.	TP613	B60130S
Material	hydrophiles Acrylat, dreiteilig, Haptiken aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)	Polymethylmethacrylat (PMMA), einteilig
Typ	hydrophile HKL	VKL
Optikdesign	monofokal, sphärisch	monofokal, sphärisch
Haptikdesign	C-Loop-Haptik, 5° Anwinkelung	S-Loop-Haptik, 10° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm	13,0 mm
Refraktiver Index bei 35°C	1,46	1,49
Lichtfilter	UV	UV
Dioptrien	0,0 – 9,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 9,0 – 30,5 dpt in 0,5 dpt-Schritten	6,0 – 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	3,0 mm	6,5 mm
Injektor	Bio Mecaject (BMSET180)	Implantationspinzette (65400)

* Nur in Deutschland erhältlich. ** Nur in Deutschland und Österreich erhältlich.

enVista® & enVista® toric
MXE / MXPLC / MXET

- ▶ Glisteningfreie Trusight™ Optik
- ▶ Accuset™ Haptiken für maximale Rotations- und Refraktionsstabilität
- ▶ Einfaches Preloaded System mit Drehinjektor



INJEKTOREN:

- Einweginjektor INJ100
- Mehrweginjektor BLIS-R1 inkl. Kartusche BLIS-X1
- Preloaded: SimplifEYE™ (nur für die enVista® verfügbar)



Material	hydrophobes Acrylat, einteilig	
Optik	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex, (torisch)	
Haptik	C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung	
Optikdurchmesser	6,0 mm	
Gesamtdurchmesser	12,5 mm	
Lichtfilter	UV	
Dioptrien	enVista® 0,0 - 10,0 und 30,0 - 34,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten	enVista® toric 6,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Zylinder	1,25 - 5,75	
Inzision	2,2 mm	



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

enVista® toric Kalkulator
<https://envista.toriccalculator.com>



LuxSmart™ & LuxSmart™ toric
YSMART / YSMARTT

- ▶ EDOF IOL Plattform, basierend auf einer Kombination aus sphärischen Aberrationen
- ▶ Intermediärvisus ohne Nebeneffekte wie Halos & Starburst
- ▶ Vierpunkt-Haptikdesign für Kapsel- und Rotationsstabilität sowie sichere Vorhersagbarkeit des refraktiven Outcomes



INJEKTOR:

- Preloaded: Accuject™ Pro




Material	hydrophobes Acrylat, einteilig	
Optik	EDOF, asphärisch, (torisch)	
Haptik	Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung	
Optikdurchmesser	6,0 mm	
Gesamtdurchmesser	11,0 mm	
Lichtfilter	UV & Violette Licht	
Dioptrien	LuxSmart™ 0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 34,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten	LuxSmart™ toric 6,0 - 10,0 und 31,0 - 34,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,5 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Zylinder	0,75 - 6,0	
Inzision	2,2 mm	

Hersteller: Cutting Edge S.A.S., 770 rue Alfred Nobel Immeuble Le Nobel, 34000 Montpellier, Frankreich



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

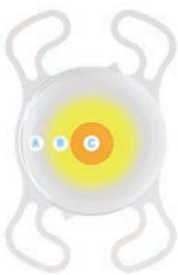

- A **MONOFOKALE PERIPHERIE**
Im äußeren Bereich ist die Korrektur für die Ferne
- B **PATENTIERTE ÜBERGANGSZONE**
Gleitender Übergang vom EDOF Zentrum in die asphärische monofokale Peripherie – ohne Lichtverlust
- C **EDOF ZENTRUM**
Erhöhte subjektive Tiefenschärfe durch die Kombination der sphärischen Aberrationen 4. und 6. Ordnung mit gegensätzlichen Vorzeichen


IC-8™
IC8OUSBL



- ▶ IOL mit kleiner Apertur und integrierter FilterRing™-Komponente für den Einsatz bei komplexen Hornhäuten

INJEKTOR:

- Steriles Single-Use IC-8™ IOL Injektorsystem

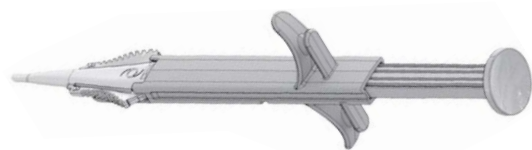

Material	Hydrophobes Acrylat, einteilig / FilterRing™-Komponente aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Optik	bikonvex, asphärische Vorderfläche, FilterRing™-Komponente
Haptik	C-Loop-Haptik, 5° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	12,5 mm
Lichtfilter	UV
Dioptrien	10,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	3,5 mm



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

LuxGood™
YGOOD



- ▶ Einfaches Preloaded System mit Pushinjektor
- ▶ Mit Violettlichtfilter

INJEKTOR:

- Preloaded: Accuject™ Pro



Material	hydrophobes Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral
Haptik	Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm
Lichtfilter	UV & Violette Licht
Dioptrien	0,0 - 10,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 34,0 dpt in 0,50 dpt-Schritten
Inzision	2,2 mm


Hersteller: Cutting Edge S.A.S., 770 rue Alfred Nobel Immeuble Le Nobel, 34000 Montpellier, Frankreich



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

EyeCee® One & EyeCee® One Crystal
EYEC1NP/ EYEC1NPC

- ▶ Verlässliche Fixierung und Stabilität durch Ankerhaptiken
- ▶ Einfaches Preloaded System mit Pushinjektor

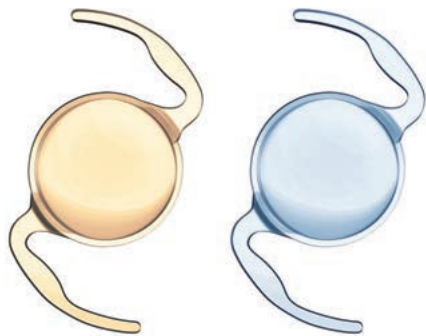

INJEKTOR:

- Preloaded NP-1



Material	hydrophobes Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, asphärisch, aberrationskorrigierend (-0,13 µm SA)
Haptik	C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm
Lichtfilter	UV & Blaulichtfilter
Dioptrien	1,0 - 5,0 und 27,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 5,0 - 27,0 in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	2,2 mm

Hersteller: NIDEK CO., LTD. 34-14, Maehama, Hiroishi-cho, Gamagori, Aichi 443-0038, Japan



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten


S1 IOL*
HF600



- ▶ Sphärisches Oberflächendesign

INJEKTOR:

- Bioject-P220 (12INJ0246)

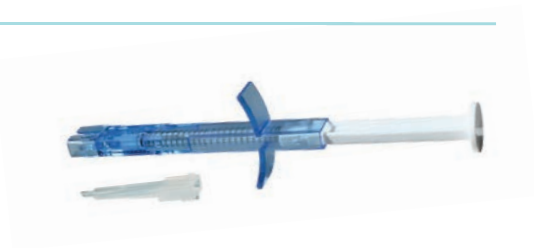

Material	hydrophobes Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, sphärisch, bikonvex
Haptik	modifizierte C-Loop-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm
Lichtfilter	UV
Dioptrien	5,0 - 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	2,2-2,4 mm

Hersteller: Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd. Plot No. 555-556-557, Opp. Subham Tex-O-Pack, Khatraj-Vadsar Road, P.O.: Khatraj, Taluka- Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

* Nur in Deutschland erhältlich

Akreos® MICS
MI60P



- ▶ Inzisionsgröße 1,8 mm: ideal zur Anwendung von MICS-Techniken geeignet
- ▶ Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast

INJEKTOR:

- Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)



Material	hydrophiles Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex
Haptik	Vierpunkt-Haptik, 10° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,2 mm (0 - 15,0 dpt) 6,0 mm (15,5 - 22,0 dpt) 5,6 mm (22,5 - 30,0 dpt)
Gesamtdurchmesser	11,0 mm (0 - 15,0 dpt) 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)
Lichtfilter	UV
Dioptrien	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	1,8 mm



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

Akreos® Adapt AO
ADAPTAOPV / AO60PLC



- ▶ Aberrationsneutrales Advanced Optics Design
- ▶ Asphärisches Oberflächendesign für maximale Schärfe und Kontrast
- ▶ Geeignet für kombinierte Kapselsack-/ Sulkus-Implantation

INJEKTOREN:

- Preloaded: SimplifEYE™
- Viscoject 2.2 (LP604340),
- Viscoject BIO 1.8 (LP604350C)



Material	hydrophiles Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, asphärisch, aberrationsneutral, bikonvex
Haptik	Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm (0 - 15,0 dpt) 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)
Lichtfilter	UV
Dioptrien	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	1,8-2,2 mm



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

Akreos® Adapt
ADAPTPRP



- ▶ Sphärisches Oberflächendesign
- ▶ Geeignet für kombinierte Kapselsack-/ Sulkus-Implantation

INJEKTOR:

- Viscoject 2.2 (LP604340)



Material	hydrophiles Acrylat, einteilig
Optik	monofokal, sphärisch, equikonvex
Haptik	Vierpunkt-Haptik, 0° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	11,0 mm (0 - 15,0 dpt) 10,7 mm (15,5 - 22,0 dpt) 10,5 mm (22,5 - 30,0 dpt)
Lichtfilter	UV
Dioptrien	0,0 - 30,0 in 1,0 dpt-Schritten 10,0 - 30,0 in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	2,2 mm



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

Loop Keeper™**
TP613



- ▶ Sphärisches Oberflächendesign
- ▶ Dreiteilige hydrophile IOL
- ▶ Geeignet für Implantation in Sulkus oder Kapselsack

INJEKTOR:

- Bio Mecaject (BMSET180)



Material	hydrophiles Acrylat, Haptiken aus Polyvinylidenfluorid (PVDF), dreiteilig
Optik	monofokal, sphärisch
Haptik	C-Loop-Haptik, 5° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm
Lichtfilter	UV
Dioptrien	6,0 – 9,0 dpt in 1,0 dpt-Schritten 9,0 – 30,5 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	3,0 mm

Hersteller: Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd, Plot No. 555-556-557, Opp. Subham Tex-O-Pack, Khatraj-Vadsar Road, P.O.: Khatraj, Taluka- Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

** Nur in Deutschland und Österreich erhältlich.

Loop Guardian™**
B60130S

- Sphärisches Oberflächen-design
- Zur Implantation in die Vorderkammer



INJEKTOR:

- Implantationspinzette (65400)



Material	Polymethylmethacrylat
Optik	monofokal, sphärisch
Haptik	S-Loop-Haptik, 10° Anwinkelung
Optikdurchmesser	6,0 mm
Gesamtdurchmesser	13,0 mm
Lichtfilter	UV
Dioptrien	6,0 – 30,0 dpt in 0,5 dpt-Schritten
Inzision	6,5 mm

Hersteller: Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd. Plot No. 555-556-557, Opp. Subham Tex-O-Pack, Khatraj-Vadsar Road, P.O.: Khatraj, Taluka- Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.



Scannen Sie den QR Code
oder besuchen Sie
www.IOLCon.org
für aktuelle A-Konstanten

Explantationspinzette n. Jünemann
65530

- Gezahnte Pinzette für IOL Explantation ohne Zerschneiden
- 2,5 mm Inzision



ANWENDER-VIDEO



SCAN MICH

Nukleusmanipulator n. Menapace
55485

- Dreidimensional abgewinkelte Spitze
- Länge distales Ende: 2 mm



Kapselspannring
ACPi-11



- Preloaded
- PMMA, einteilig
- Gesamtdurchmesser: 11,0 mm



EIN STARKES TEAM
mit der LuxSmart™ toric



VISKO- ELASTIKA

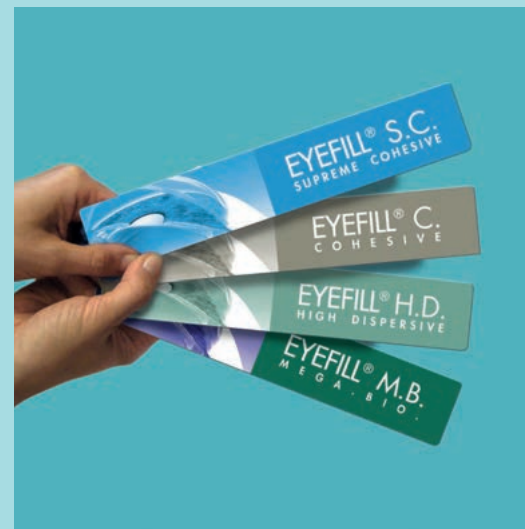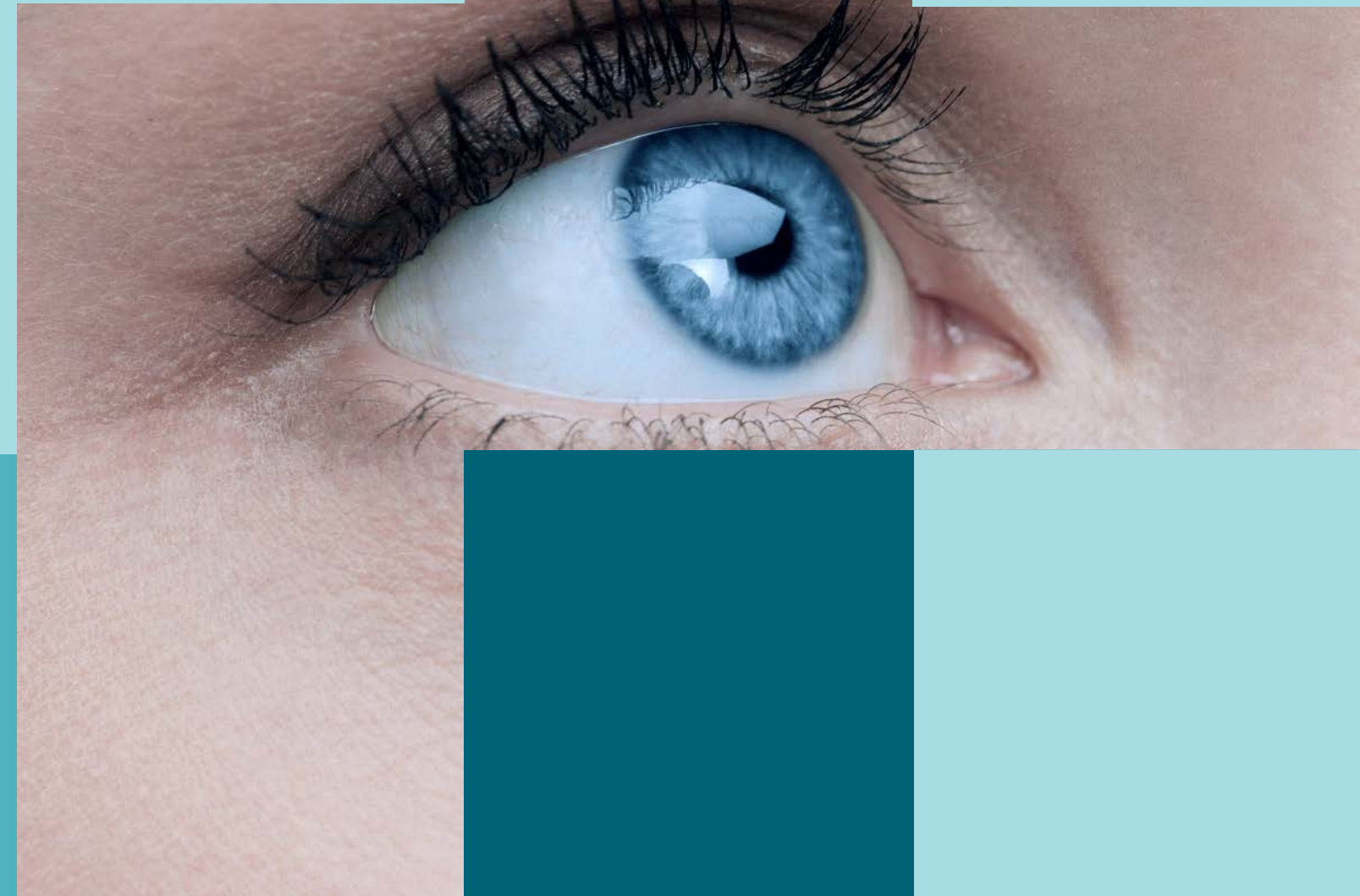

VISKOELASTIKA HA

VISKOELASTIKA HPMC

	EYEFILL® S.C.	EYEFILL® C.	EYEFILL® M.B.	Amvisc®	Amvisc® Plus
					
Art. Nr.	EYEFILL-SC	EYEFILL-C-WST	EYEFILL-M	59081L	60081L
	hoch kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv	kohäsiv dispersiv
Zusammensetzung	2 % HA	1.4 % HA	MEGA I: 1.8 % HA + BIO II: 1.4 % HA	1.2 % HA	1.6 % HA
Rohmaterial	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation	Bakterielle Biofermentation
Molekulargewicht (Da)	3.2 – 3.5 Mio	3.2 – 3.5 Mio	3.2 – 3.5 Mio	1 – 2,9 Mio	1 – 2,9 Mio
Viskosität mPa.s bei 0,1 s-1	400.000	120.000	MEGA I: 100.000 BIO II: 80.000	40.000	55.000
Lagerung	Raumtemperatur	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C	2-8 °C
pH	6,8 – 7,6				
Volumen	0,9 ml	1,0 ml	MEGA I: 0,55 ml BIO II: 0,8 ml	0,8 ml	0,8 ml
Indikation	Perfekter Erhalt und Stabilität der Vorderkammer und des Kapselsacks Indiziert bei flacher Vorderkammer und Irisprolaps Sehr einfach zu aspirieren	Indiziert für Standard Katarakt OPs Guter Schutz intra- okulärer Gewebe Einfach zu entfernen	Vorderkammererhalt mit Endothelzellenschutz während der OP Für die Anwendung der Soft Shell Technique Guter Verbleib in der Vorderkammer und dem Kapselsack	Indiziert für Standard Katarakt OPs Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben	Besonders für MICS-Techniken geeignet Aufrechterhaltung der Vorderkammerstabilität und Visibilität Minimiert die Interaktion zwischen den Geweben
Kanüle	25G / 35°			27G	

EYEFILL® H.D	OcuCoat®
	
EYEFILL-HD-WST	CC050S / CC100SL
dispersiv	dispersiv
2 % HPMC	2 % HPMC
Pflanzlich	Pflanzlich
86.000	80.000
3.200	4.000
Raumtemperatur	Raumtemperatur
6,8 – 7,6	
2,5 ml	1,0 ml / 2,0 ml
Exzellenter Endothel Schutz Idealer Hilfsstoff für Funduskopie und Gonioskopie	Erhaltung einer tiefen Kammer während der Vorderkammerchirurgie Ermöglicht effiziente Manipulation Geringere Traumawirkung
23G / 45°	25G

INTRAOKULARE FÄRBEMITTEL



BLutein™ Färbemittel:
Ein komplettes Portfolio ophthalmologischer Färbemittel für die intraokulare Anwendung

Das BLutein™ Sortiment umfasst Färbemittel sowohl für die Färbung des hinteren Segments als auch für die Färbung der Vorderkapsel.

Die ersten und einzigen intraokularen Färbemittel mit Lutein

- Die BLutein™ Färbemittel enthalten alle natürlich gewonnenes Lutein
- ▶ Lutein ist ein Pigment, das physiologischerweise in der menschlichen Netzhaut vorkommt und wichtig für die allgemeine Gesundheit des Auges ist¹⁻⁴
 - ▶ Lutein kann auch zum Schutz der Netzhaut bei Operationen beitragen:
 - durch seine Blaulichtfilterwirkung absorbiert es schädliches blaues Licht, bevor es die Netzhautzellen erreicht^{5,6}
 - wirkt als Antioxidant, um freie Radikale zu neutralisieren, die für die Netzhautzellen schädlich sein können⁷⁻⁹
 - Verringerung der iatrogenen Belastung des Netzhautgewebes für eine schnellere funktionelle Erholung nach der Operation¹⁰

Weiterführende Informationen zu den Färbemitteln



Referenzen

1. Buscemi S et al., Nutrients. 2018; 10: 1321.
2. Bernstein PS et al., Prog Retin Eye Res. 2016; 50: 34-66.
3. Lima VC et al., Int J Retin Vitro. 2016; 2:19.
4. Beccera MO et al., J Funct Foods. 2020; 66: 103771.
5. Junghans A et al., Arch Biochem Biophys. 2001; 391:160-164.
6. Sasaki M et al., J Nutr Biochem. 2012; 23: 423-429.
7. Bian Q et al., Free Radic Biol Med. 2012; 53: 1298-1307.
8. Sundelin SP et al., Free Radic Biol Med. 2001; 31: 217-225.
9. Kim SR et al., Exp Eye Res. 2006; 82: 828-839.
10. Romano MR et al., Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2018; 256: 1573-1580.

DYE100 Trypan blue Vorderkapsel Färbemittel
DYE100

- 0,06% Trypanblau
- Intraokulares Färbemittel zur Visualisierung der Vorderkapsel
- 1,0 ml Glasfläschchen

STERILE = 25



BLutein™ Phaco Lutein Vorderkapsel Färbemittel
DYE200

- 1% lösliches Lutein; 0,04% Trypanblau
- 0,5 ml sterile vorgefüllte Glasspritzen
- Optimale Anfärbung der Vorderkapsel bei Kataraktoperationen
- Erleichtert die Visualisierung der Vorderkapsel
- Erleichtert die Durchführung der Kapsulorhexis

STERILE = 5




BLutein™ Vitreo Lutein Glaskörper Färbemittel
DYE300

- Zur verbesserten Visualisierung des Glaskörpers während der Operation
- 2% kristallines Lutein
- 1 ml sterile Einweg-Glasfläschchen

STERILE = 10




EINMAL- INSTRUMENTE

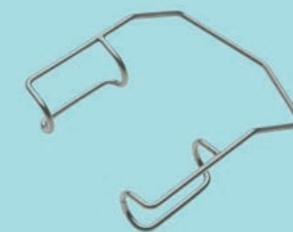

SPÜLUNG / ANÄSTHESIE

SPÜLKANÜLEN

Augenbrause
82020S

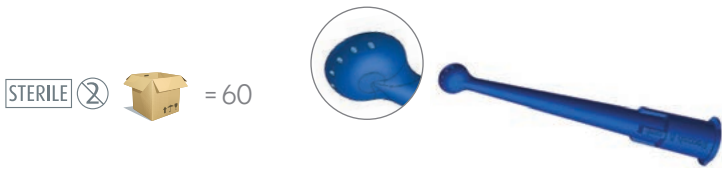

ANÄSTHESIEKANÜLEN

Retrobulbärkanüle
25G SD1275/10
0.5 x 38 mm



Sub-Tenon Anästhesie Kanüle
19G SD5176/10
1.1 x 25 mm



Retrobulbärkanüle n. Atkinson
25G SD1637/10
0.5 x 38 mm



Retrobulbärkanüle n. Atkinson*
23G M0638-02/10
0.64 x 38 mm



Peribulbärkanüle n. Atkinson
27G SD5109/10
0.4 x 32 mm




Peribulbärkanüle n. Atkinson
25G SD5108/10
0.5 x 32 mm




VORDERKAMMER

VORDERKAMMERKANÜLEN

Vorderkammerkanüle n. Rycroft
30G SD1273/10
0.3 x 22 mm

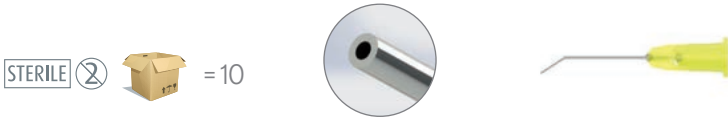


Vorderkammerkanüle n. Rycroft
27G SD1280/10
0.4 x 22 mm

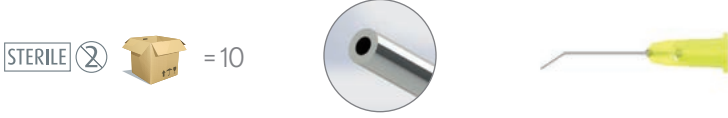

Vorderkammerkanüle n. Rycroft
angewinkelt 45°, 7.5 mm*
20G M2273B-02/10
0.9 x 22 mm



Vorderkammerkanüle n. Rycroft
angewinkelt 35°, 5.5 mm*
23G M2273G-02/10
0.64 x 22 mm

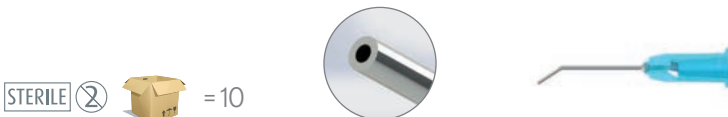

Vorderkammerkanüle n. Rycroft
25G SD1639/10
0.5 x 22 mm



Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky,
150 mm Silikonschlauch
20G M2657-02/10
0.64 x 3.5 mm



Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky,
150 mm Silikonschlauch*
23G M2658-02/10
0.64 x 3.5 mm



ZYSTOTOM / HYDRODISSEKTION

CYSTOTOMKANÜLEN

Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz*

25G M3610S-02/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz

27G SD5042/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet*

27G M3000F-02/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

25G SD4804/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

25G SD1610/10

0.5 x 16 mm

STERILE  = 10



Irrigationszystotomkanüle, abgerundet

27G SD1618/10

0.4 x 16 mm

STERILE  = 10



HYDRODISSEKTIONSKANÜLEN

Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgeflachte Spitze, vertikal

27G SD5099/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgeflachte Spitze, horizontal

27G SD5155/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



HYDRODISSEKTION / VISKOKANÜLEN / KANÜLEN ZUR KORTEX-ENTFERNUNG

HYDRODISSEKTIONSKANÜLEN

Hydrodissektionskanüle, angewinkelt

25G SD5037/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



Hydrodissektionskanüle, angewinkelt, - abgeflachte Spitze

27G SD3902/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



J-förmige Hydrodissektionskanüle

25G SD5003/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



VISKOKANÜLEN

Viskokanüle, angewinkelt

25G SD2639/10

0.5 x 22 mm

STERILE  = 10



Vorderkammerkanüle n. Rycroft
angewinkelt 35°, 9 mm*

27G M3926A-02/10

0.4 x 22 mm

STERILE  = 10



KANÜLEN ZUR KORTEX-ENTFERNUNG

Irrigationskanüle n. Charleux

24G SD5106/10

0.5 x 12.5 mm

STERILE  = 10



KAPSELPOLITUR / TRÄNENWEG / VITREORETINAL


KANÜLEN ZUR KAPSELPOLITUR

Kapselpolierer, mattierte Spitze

23G SD1605/10

0.64 x 22 mm

STERILE  =10

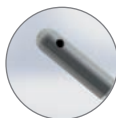


Kapselpolierer mit Silikonspitze

27G SD5005/10

0.4 x 22 mm

STERILE  =10

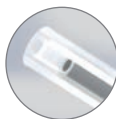


TRÄNENWEGKANÜLEN

Tränenwegkanüle, gebogen*

25G M9277-02/10

0.5 x 29 mm

STERILE  =10

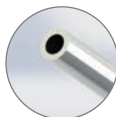

VITREORETINALE KANÜLEN

Infusionshandstück für schwere Flüssigkeiten, mit Fingerkontrolle und Luer-Lock-Anschluss*

M4498-02/5

STERILE  =5



MESSER

CLEAR CORNEAL MESSER



Clear Corneal Messer 1.3 mm, angewinkelt

LP7594 A = 1.3 mm, B = 1.4 mm STERILE  =6

Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt

LP7527 A = 2.75 mm, B = 3 mm STERILE  =6

Clear Corneal Messer 1.6 mm, angewinkelt

LP7595 A = 1.6 mm, B = 1.7 mm STERILE  =6

Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt

LP7528 A = 2.85 mm, B = 3.2 mm STERILE  =6



Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt

SUB7528 B = 2.85 mm, C = 2.8 mm STERILE  =12

TELLERMESSER



Tellermesser, Anschliff oben, angewinkelt

LP7510 A = 2.0 mm, B = 4.0 mm STERILE  =6

MVR MESSER



19G MVR Messer

19G LP7519 A = 1.37 mm STERILE  =12

20G MVR Messer

20G LP7520 A = 1.2 mm STERILE  =12

PHAKOLANZE



Phakolanz 2.2 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7548ADB A = 2.2 mm, B = 2.3 mm   =6

Phakolanz 2.4 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig

LP7549ADB A = 2.4 mm, B = 2.5 mm   =6

Phakolanz 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7550A A = 2.5 mm, B = 3.3 mm   =6

Phakolanz 2.65 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7551A A = 2.65 mm, B = 3.7 mm   =6

Phakolanz 2.65 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig

LP7551ADB A = 2.65 mm, B = 3.7 mm   =6

Phakolanz 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7559A A = 2.75 mm, B = 3.4 mm   =6

Phakolanz 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig

LP7552ADB A = 2.8mm, B = 3.2 mm   =6

Phakolanz 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7553A A = 2.85 mm, B = 3.5 mm   =6

Phakolanz 3.0 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7556A A = 3.0 mm, B = 3.6 mm   =6

Phakolanz 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben

LP7557A A = 3.2 mm, B = 3.2 mm   =6



Phakolanz 2.2 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig

SUB7548ADB B = 2.2 mm, C = 2.7 mm   =12

Phakolanz 2.4 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig

SUB7549ADB B = 2.4 mm, C = 2.9 mm   =12

Phakolanz 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben

SUB7550A B = 2.5 mm, C = 3.0 mm   =12

Phakolanz 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben

SUB7559A B = 2.75 mm, C = 3.3 mm   =12

Phakolanz 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig

SUB7552ADB B = 2.8 mm, C = 3.4 mm   =12

Phakolanz 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben

SUB7553A B = 2.85 mm, C = 3.4 mm   =12

Phakolanz 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben

SUB7557A B = 3.2 mm, C = 3.9 mm   =12

MESSER FÜR STICHINZISION



Messer für Stichinzision, 15 Grad
LP7515 A = 15°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 22.5 Grad
LP7522 A = 22.5°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 30 Grad
LP7530 A = 30°, B = 1.6 mm, C = 11.0 mm   =6

Messer für Stichinzision, 45 Grad
LP7545 A = 45°, B = 1.8 mm, C = 11.0 mm   =6



Messer für Stichinzision, 15 Grad
SUB7515 B = 1.5 mm, C = 4.9 mm   =12

Messer für Stichinzision, 22.5 Grad
SUB7522 B = 1.65 mm, C = 3.7 mm   =12

Messer für Stichinzision, 30 Grad
SUB7530 B = 1.8 mm, C = 2.9 mm   =12

Messer für Stichinzision, 45 Grad
SUB7545 B = 1.9 mm, C = 1.8 mm   =12

TRAPEZOIDES MESSER



Trapezoides Messer 1.5 – 1.7 mm, angewinkelt
LP7599 A = 1.5 mm, B = 1.7 mm, E = 2.20 mm   =6

Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt
LP7596 A = 1.5 mm, B = 2.0 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 1.6 – 1.8 mm, angewinkelt
LP7600 A = 1.6 mm, B = 1.8 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 1.8 – 2.2 mm, angewinkelt
LP7603 A = 1.8 mm, B = 2.2 mm, E = 2.0 mm   =6

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt
LP7601 A = 2.0 mm, B = 2.2 mm, E = 2.29 mm   =6

Trapezoides Messer, 2.85 – 3.2 mm angewinkelt
LP7582 A = 2.85 mm, B = 3.2 mm, E = 2.0 mm   =6



Trapezoides Messer 1.5 – 1.7 mm, angewinkelt
SUB7599 B = 1.7 mm, C = 1.9 mm, D = 1.5 mm, E = 3.0 mm   =12

Trapezoides Messer 1.5 – 2.0 mm, angewinkelt
SUB7596 B = 2.0 mm, C = 1.6 mm, D = 1.5 mm, E = 2.7 mm   =12

Trapezoides Messer 1.6 – 1.8 mm, angewinkelt
SUB7600 B = 1.8 mm, C = 1.4 mm, D = 1.6 mm, E = 2.6 mm   =12

Trapezoides Messer 2.0 – 2.2 mm, angewinkelt
SUB7601 B = 2.2 mm, C = 1.9 mm, D = 2.0 mm, E = 3.0 mm   =12

SIDEPORT MESSER




Sideport Messer 0.8 mm, angewinkelt
LP7593 A = 0.8 mm   =6

Sideport Messer 1.1 mm, angewinkelt
LP7592 A = 1.1 mm   =6

STELLARIS® SYSTEM – I/A HANDSTÜCKE

KOAXIALE I/A HANDSTÜCKE

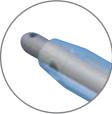I/A Handstück gebogen mit Sleeve für 1.8 C-MICS™ 85794ST	STERILE   = 12		
I/A Handstück 45° mit Sleeve für 1.8 C-MICS™ 85795ST	STERILE   = 12		
I/A Handstück 45° mit Sleeve und angerauter Spitze für 1.8 C-MICS™ 85795STR	STERILE   = 12		
I/A Handstück, gebogen  (Ø 1.5mm) 85783ST	STERILE   = 12		
I/A Handstück, 45°  (Ø 1.5mm) 85784ST	STERILE   = 12		
I/A Handstück gerade Spitze 90°, abgewinkelt, 16GA  (Ø 1.65mm) 85786ST	STERILE   = 12		

CAPSULEGUARD® STELLARIS® SYSTEM I/A HANDSTÜCKE

KOAXIALE CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE

CapsuleGuard® I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze 85910ST EIG: 2.2mm-2.8mm	STERILE   = 12		
CapsuleGuard® I/A Handstück, gerade* 85912ST EIG: 2.2mm-2.8mm	STERILE   = 12		
CapsuleGuard® I/A Handstück, gebogen 85913ST EIG: 2.2mm-2.8mm	STERILE   = 12		
CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, gerade 85914ST EIG: < 2.0mm	STERILE   = 12		
CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze 85915ST EIG: < 2.0mm	STERILE   = 12		

EIG: Empfohlene Inzisionsgröße koaxial

* Auftragsfertigung

I/A HANDSTÜCKE - UNIVERSELL

KOAXIALE I/A HANDSTÜCKE

I/A Handstück, gerade 17G (Ø 1.5mm) 85782S	STERILE   = 12	 
I/A Handstück, gebogen 17G (Ø 1.5mm) 85783S	STERILE   = 12	 
I/A Handstück, 45° 17G (Ø 1.5mm) 85784S	STERILE   = 12	 
I/A Handstück, gerade mit Sleeve 20G (Ø 0.9 mm) 85785S	STERILE   = 12	 
I/A Handstück, gerade, 90° 16G (Ø 1.65 mm) 85786S	STERILE   = 12	 

CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE - UNIVERSELL

KOAXIALE CAPSULEGUARD® I/A HANDSTÜCKE

CapsuleGuard IA® Handstück, 45° 85910S	STERILE   = 12	 
CapsuleGuard IA® Handstück, gerade* 85912S	STERILE   = 12	 
CapsuleGuard IA® Handstück, gebogen 85913S	STERILE   = 12	 
CapsuleGuard IA® Handstück für 1.8 C-MICS™, gerade 85914S	STERILE   = 12	 
CapsuleGuard IA® Handstück für 1.8 C-MICS™, 45° 85915S	STERILE   = 12	 

* Auftragsfertigung

STELLARIS® SYSTEM BIMANUELLE IRRIGATIONS- UND ASPIRATIONSHANDSTÜCKE

BIMANUELLE ASPIRATIONSHANDSTÜCKE

Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut

19G

85901S19 (Ø 1.07mm)

20G

85901S20 (Ø 0.89 mm)

21G

85780S (Ø 0.8 mm)

22G

85790S (Ø 0.7 mm)

23G

85792S (Ø 0.6 mm)

12

STERILE







Aspirationshandstück mit lateralem Port

21GA

85900S (Ø 0.8 mm)

12

STERILE







STELLARIS SYSTEM® BIMANUELLE IRRIGATIONSHANDSTÜCKE

19G

85902ST19 (Ø 1.07mm)

21G

85787ST (Ø 0.8 mm)

22G

85806ST (Ø 0.7 mm)

23G

85807ST (Ø 0.6 mm)

12

STERILE







BIMANUELLE IRRIGATIONSHANDSTÜCKE - UNIVERSELL

Irrigationshandstück mit lateralem Port

19G

85902S19 (Ø 1.07mm)

20G

85902S20 (Ø 0.89 mm)

21G

85787S (Ø 0.8 mm)

22G

85806S (Ø 0.7 mm)

23G

85807S (Ø 0.6 mm)

12

STERILE







Irrigationshandstück, aufgeraut

21G

85781S (Ø 0.8 mm)

12

STERILE







Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port

22G

85789S (Ø 0.7 mm)

23G

85791S (Ø 0.6 mm)

12

STERILE







Biaxiale Irrigations-Chopper*

19G

85903S19 (Ø 1.07mm)

21G

85903S20 (Ø 0.89 mm)

12

STERILE







HANDSTÜCKE FÜR ZEROPHAKO LINSENENTFERNUNG / INDIVIDUELLE PER PROCEDURE TRAYS

I/A HANDPIECES FOR ZERO PHACO LENS REMOVAL

ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm

SUP06

12

STERILE







Einmal Irrigations- / Aspirationshandstück zur Entfernung der femtolaserfragmentierten Linse ohne Einsatz von Ultraschallenergie. 30° Aspirationsrohr mit distaler Öffnung. Empfohlen für 2,2 mm Inzisionsbreite.

Stellaris® ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm

SUP06ST

12

STERILE







Einmal Irrigations- / Aspirationshandstück zur Entfernung der femtolaserfragmentierten Linse ohne Einsatz von Ultraschallenergie. 30° Aspirationsrohr mit distaler Öffnung. Empfohlen für 2,2 mm Inzisionsbreite. Mit Surelock™ Luer Konnektor für Stellaris®.

INDIVIDUELLE PER PROCEDURE TRAYS

Das individuelle Per Procedure Tray ist ein komplettes Set einmalverwendbarer Instrumente von Bausch + Lomb, die entsprechend Ihrer bevorzugten chirurgischen Technik konfiguriert werden können.

Besuchen Sie www.storzeye.eu und stellen Sie sich Ihr individuelles Per Procedure Tray mit dem Online-Konfigurator zusammen.

Konfigurieren Sie Ihr individuelles Per Procedure Tray auf www.storzeye.eu.



MANIPULATOREN, LIDSPERRER

LIDSPERRER

Lidsperrer n. Barraquer
SUH01



Lidsperrer mit Feststellschraube
SUH04



MANIPULATOREN

Koch Stop & Chop Manipulator
SUF01



IOL Häkchen n. Sinskey
SUF02



Phako-Spatel
SUF03



Nukleusmanipulator n. Drysdale
SUF04



Y-Häkchen, horizontal
SUF05



Y-Häkchen, vertikal
SUF06



PINZETTEN

Kapsulorhexispinzette
SUE01-12



Pinzette n. Bonn
SUE02-12



Fadenpinzette, gerade
SUE03-12



Fadenpinzette n. McPherson
SUE04-12



Fadenpinzette n. Pierse
SUE05-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette
SUE06-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette
mit Markierungen
SUE07-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette,
Branchen gebogen
SUE08-12



MICS™ Kapsulorhexispinzette
1.0 mm
SUI20-12



Adleberg Sklera-Fixationspinzette
Synergetics®
25G 11.46.25PIN



ANWENDER VIDEO

BIPOLARSTIFTE

Sklera Bipolarstift, Lemosa Adapter

20G E7928

STERILE



=12



Bipolarstift, angeschrägt, Lemosa Adapter

20G E7929

23G E7930

25G E7926

27G E7932

STERILE



=12



Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor

23G E7931

25G E7924

27G E7933

STERILE



=12



Bipolarstift, stumpf, 2-Pin-Konnektor

25G E7925

STERILE



=12



Bipolar-Konnektor, stumpf, Lemosa-Konnektor

25G E7927

STERILE



=12



ZUBEHÖR

Bananenstecker Adapter

CX9404



=1



Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor

CX9400



=1



Bipolarkabel, Lemosa Adapter

CX9430



=1



Iris Retraktoren, 2 pro Box

40.02-2

5 Retraktoren pro Set



=2

STERILE



Iris Retraktoren, 6 pro Box

40.02-6

5 Retraktoren pro Set



=6

STERILE



WIEDER- VERWENDBARE INSTRUMENTE



SCHEREN / LIDSPERRER

Bausch + Lomb führt heute seine Tradition im Bereich der Instrumentenfertigung fort und entwickelt erstklassige augenchirurgische Instrumente höchster Qualität. In seinen Produktionsstätten in Eppelheim/Heidelberg, Deutschland sowie St. Louis, USA, arbeiten hochqualifizierte und erfahrene Experten nach neuestem Stand der Technik.

Seit über 120 Jahren sind die augenchirurgischen Instrumente der Marke Storz® Ophthalmic Instruments weltweit für ihre erstklassige Qualität und Innovation bekannt.

Sämtliche Entwicklungs- und Testverfahren erfolgen unter Beteiligung von sachkundigen Chirurgen. Dadurch stellen wir sicher, dass die von uns produzierten Instrumente höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüchen genügen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Produktauswahl wiederverwendbarer Instrumente der Marke Storz® Ophthalmic Instruments.

Für das vollständige Sortiment besuchen Sie www.storzeye.eu oder scannen Sie den QR-Code.



SCAN MICH

SCHEREN

Bonn Augenschere*

23060

Gebogen, Gesamtlänge 89 mm



Augenschere, gerade, schweres Modell

E3424

Blattlänge 32 mm, vorne spitz,
Gesamtlänge 109 mm



LIDSPERRER

Lidsperrerr n. Barraquer, stark

52121H

14 mm Valven,
Gesamtlänge 40 mm,
Materialstärke 1,0 mm Ø



Lidsperrerr n. Cook*

52203

Groß,
Gesamtlänge 48 mm



Lidsperrerr n. Kratz-Barraquer

52121K

14 mm Valven,
Gesamtlänge 40 mm,
Branchen oben offen



Lidsperrerr n. Barraquer

E4106 T

Abgewinkelt,
für temporale Anwendung,
14 mm abgerundete gefensterte Valven,
Valvenabstand 18 mm, Gesamtlänge 38 mm



MANIPULATOREN

MANIPULATOREN

Iris Häkchen und Nukleus Chopper*

55481

Doppelinstrument:
Der Chopper auf der einen Seite wird
zum Spalten des Nukleus eingesetzt,
das Iris Häkchen auf der anderen Seite
zur Manipulation von Nukleus, IOL und Gewebe.
Gesamtlänge 125 mm



Nukleus Spatel und Chopper

55482

Doppelinstrument:
Der Chopper auf der einen Seite
wird zum Spalten des Nukleus eingesetzt,
der Spatel auf anderen Seite
zur Manipulation von Nukleus und IOL.
Gesamtlänge 126 mm



Kernteiler Häkchen, halbscharf

55483

Das Instrument hat einen 45° Winkel und dient zum
Spalten und Manipulieren des Nukleus.
Gesamtlänge 100 mm



Spatel

54270Y4

Flach abgewinkelt, 0,5 x 0,3 mm,
10 mm Spitze,
Gesamtlänge 110 mm



Irishäkchen n. Dardenne

54290

Abgerundet, 15 mm Spitze, 45° abgewinkelt,
Gesamtlänge 115 mm



Linsenkernrotierer n. Neuhann*

55415

Horizontaler "Y" Haken,
Gesamtlänge 104 mm



MANIPULATOREN / NADELHALTER

MANIPULATOREN

Doppelspatel und Kernteiler n. Nichamin

E0570 N

Doppelinstrument:
Rundes Ende zur Chop-Technik,
0,5 mm Spatel zur Manipulation weicher Linsenkerne,
Gesamtlänge 140 mm



Phako-Chopper n. Nagahara

E0578 L

Links, 1,25 mm Spitze,
60° abgewinkeltes Keilmesser,
Gesamtlänge 114 mm



Nukleus-Manipulator n. Koch

E0713 G

Abgewinkelter Schaft mit 1,5 mm Spitze,
zur effizienten Ausführung der
«Stop and Chop»-Technik,
Gesamtlänge 112 mm



NADELHALTER

Nadelhalter n. Castroviejo, gebogen

72053

Gebogenes Maul von 8 mm, ohne Sperre;
Gesamtlänge 142 mm



Nadelhalter n. Barraquer, gebogen

73050

Schwach gebogenes Maul von 9 mm, ohne Sperre;
Gesamtlänge 116 mm



Nadelhalter n. Barraquer

E3842

Feines, schwach gebogenes Maul von 10 mm,
großer Griff, ohne Sperre;
Gesamtlänge 137 mm



PINZETTEN

PINZETTEN

Kolibripinzette

63031

5 mm Fadenplatte;
Gesamtlänge 75 mm



Kolibripinzette

63032

Extra fein;
5 mm Fadenplatte;
Gesamtlänge 77 mm



Fadenpinzette Modell Tübingen

63051

Gerade, 7 mm Fadenplatte;
Gesamtlänge 113 mm



Fadenpinzette Modell Tübingen*

63052

Konisch, 6 mm Fadenplatte;
Gesamtlänge 101 mm



Fadenpinzette n. Kelman-McPherson

63150

Abgewinkelt, 7,5 mm Fadenplatte;
Gesamtlänge 100 mm



Linsenfasspinzette

65245

Feine, runde Branchen,
50° abgewinkelt;
Gesamtlänge 110 mm



PINZETTEN

PINZETTEN

Fixierpinzette n. Lester*

E1656


2 x 3 feine Zähne,
Gesamtlänge 96 mm



Kapsulorhexispinzette n. Utrata

E2002 F

Feine, abgewinkelte Spitzen,
ideal für 1,8 mm MICS
Operationen,
12 mm Schäfte,
Gesamtlänge 87 mm

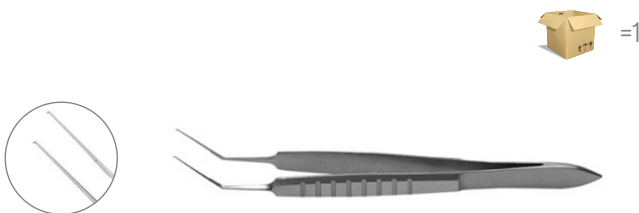

Kapsulorhexispinzette n. Utrata

E2002 GE


Feine, abgewinkelte Spitzen,
12 mm Schäfte,
mit Iris-Stop,
Gesamtlänge 87 mm



Kapsulorhexispinzette n. Utrata

E2002 R

Mit Rundem Griff,
abgewinkelte 12 mm Branchen,
mit Iris Stop,
Gesamtlänge 112 mm

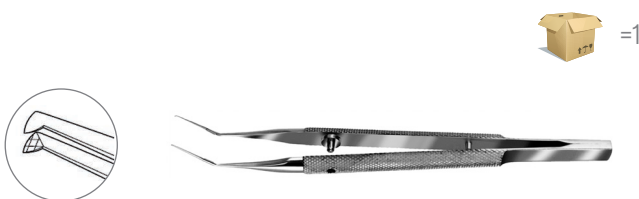

I/A HANDSTÜCKE

COAXIALE I/A HANDSTÜCKE

SILKO-I/A-Handstück, 20° gewinkelt

20G 85770

Saugöffnung 0,3 mm,
zur Verwendung mit Silikon-Spülsleeve D8109
für Standard Phako oder Silikon-Spülsleeve DP5531
für C-MICS 2,2 mm,
Griffsicherheit durch blaue Silikonbeschichtung,
Luer-Stahlkonnektoren,
Gesamtlänge 138,5 mm



SILKO-I/A-Handstück, 90° gewinkelt

20G 85771

Saugöffnung 0,3 mm,
zur Verwendung mit Silikon-Spülsleeve D8109
für Standard Phako oder Silikon-Spülsleeve DP5531
für C-MICS 2,2 mm,
Griffsicherheit durch blaue Silikonbeschichtung,
Luer-Stahlkonnektoren,
Gesamtlänge 138,5 mm



BIMANUELLE IRRIGATIONS- UND ASPIRATIONSHANDSTÜCKE

Irrigationshandgriff, Spitze glatt

21G 85779

Leicht gebogen,
Irrigationsöffnung 0,5 mm, Spitze glatt,
Außendurchmesser 0,8 mm



Irrigationshandgriff, Spitze konisch/aufgeraut

21G 85775

Gebogen,
zwei seitliche Irrigationsöffnungen 0,5 mm,
Außendurchmesser 0,8 mm



Aspirationshandgriff, Spitze konisch/aufgeraut

21G 85774R

Gebogen,
Aspirationsöffnung 0,3 mm,
Außendurchmesser 0,8 mm





Der umfassende Support-Service von Bausch+Lomb Surgical gewährleistet maximale Leistung.



KUNDENSERVICE

Das Team des Kundenservice steht Ihnen für Rückfragen zu den Themen Bestellungen, Preisgestaltung, Produktverfügbarkeit, Rücksendungen, Lieferungen und Gutschriften zur Seite.

DEUTSCHLAND

Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 58 93 114

ÖSTERREICH

Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 241 015

SCHWEIZ

Bausch & Lomb Swiss AG
Tel.: 0848 228 724



GLOBALE LOGISTIK

Bestellungen und Lieferungen auf der ganzen Welt werden durch das globale Netzwerk von Bausch+Lomb von Servicevertretern und Händlern sichergestellt. Die Lieferzeit unserer Produkte beträgt in etwa 24-48 Stunden.




TECHNISCHER SERVICE

Die Ingenieure von Bausch+Lomb Surgical unterlaufen regelmäßig einen strengen Zertifizierungsprozess, um Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.
Ein Monitoring-System ermöglicht Software-Updates und Datensicherungen, die bei Bedarf von Technikern vor Ort durchgeführt werden.



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die F&E-Abteilung von Bausch+Lomb Surgical konzentriert sich auf die Entwicklung technologisch innovativer Produkte. Die Produkte werden in fünf Zentren auf der ganzen Welt entwickelt: Saint Louis (Missouri, USA) für Geräte; Clearwater (Florida, USA) für Intraokularlinsen; Irvine (Kalifornien, USA) für IOL-Teile; München (Deutschland) für Laser und Heidelberg (Deutschland) für Instrumente.

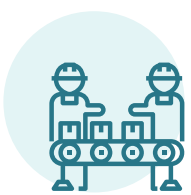

HIER ENTSTEHEN UNSERE PRODUKTE

Die Produktionsstätten von **Bausch+Lomb** Surgical befinden sich in den Vereinigten Staaten und in Europa.



St. Louis, Missouri, USA

- Katarakt- und Vitreoretinales Equipment und Zubehör



Manchester, Missouri, USA

- wiederverwendbare Instrumente



O'Fallon, Missouri, USA

- Instrumente und vitreoretinales Equipment



München, Deutschland

- Laser Equipment



Eppelheim, Deutschland

- wiederverwendbare und einmalverwendbare Instrumente



Clearwater, Florida, USA

- Intraokularlinsen



Warschau, Polen

- Intraokularlinsen

Produkt Referenz

Produktname

Seite

11.46.25PIN	Adleberg Sklera-Fixationspinzette	63
40.02-2	Iris Retraktoren, 2 pro Box	63
40.02-6	Iris Retraktoren, 6 pro Box	63
23060	Bonn Augenschere	68
52121H	Lidsperrer n. Barraquer, stark	68
52121K	Lidsperrer n. Kratz-Barraquer	68
52203	Lidsperrer n. Cook	68
54270Y4	Spatel	69
54290	Irishäkchen n. Dardenne	69
55415	Linsenkernrotierer n. Neuhann	69
55481	Iris Häkchen und Nukleus Chopper	69
55482	Nukleus Spatel und Chopper	69
55483	Kernteiler Häkchen, halbscharf	69
55485	Nukleusmanipulator n. Menapace	35
59081L	Viskoelastika AMVISC®	11/38
60081L	Viskoelastika AMVISC® PLUS	9/13/38
63031	Kolibripinzette	71
63032	Kolibripinzette	71
63051	Fadenpinzette Modell Tübingen	71
63052	Fadenpinzette Modell Tübingen	71
63150	Fadenpinzette n. Kelman-McPherson	71
65245	Linsenfasspinzette	71
65530	Explantationspinzette n. Jünemann	37
72053	Nadelhalter n. Castroviejo, gebogen	70
73050	Nadelhalter n. Barraquer, gebogen	70
82020S	Augenbrause	46
85770	SILKO-/A-Handstück, 20° gewinkelt	73
85771	SILKO-/A-Handstück, 90° gewinkelt	73
85774R	Aspirationshandgriff, 21G, Spitze konisch/aufgeraut	73
85775	Irrigationshandgriff, 21G, Spitze konisch/aufgeraut	73
85779	Irrigationshandgriff, 21G, Spitze glatt	73
85780S	Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut	60
85781S	Irrigationshandstück, aufgeraut	60
85782S	I/A Handstück, gerade	58
85783S	I/A Handstück, gebogen	58
85784S	I/A Handstück, 45°	58
85785S	I/A Handstück, gerade mit Sleeve	58
85786S	I/A Handstück, gerade, 90°	58
85787ST	Irrigationshandstück	60
85783ST	I/A Handstück, gebogen	60
85784ST	I/A Handstück, 45°	60
85786ST	I/A Handstück gerade Spitze 90°, abgewinkelt, 16GA	60
85787S	Irrigationshandstück mit lateralem Port	60
85789S	Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port	60
85790S	Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut	60
85791S	Irrigationshandstück, angeschliffen, zentraler Port	60
85792S	Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut	60
85794ST	I/A Handstück gebogen mit Sleeve für 1.8 C-MICS™	56
85795ST	I/A Handstück 45° mit Sleeve für 1.8 C-MICS™	56
85795STTR	I/A Handstück 45° mit Sleeve und angerauter Spitze für 1.8 C-MICS™	56
85806S	Irrigationshandstück mit lateralem Port	60
85806ST	Irrigationshandstück	60
85807S	Irrigationshandstück mit lateralem Port	60
85807ST	Irrigationshandstück	60
85900S	Anspirationshandstück mit lateralem Port	60
85901S19	Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut	60
85901S20	Aspirationshandstück, Spitze aufgeraut	60
85902S19	Irrigationshandstück mit lateralem Port	60
85902S20	Irrigationshandstück mit lateralem Port	60
85903S19	Biaxiale Irrigations-Chopper	60
85903S20	Biaxiale Irrigations-Chopper	60
85910S	CapsuleGuard IA® Handstück, 45°	59
85910ST	CapsuleGuard® I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze	57
85912S	CapsuleGuard IA® Handstück, gerade	59
85912ST	CapsuleGuard® I/A Handstück, gerade	57
85913S	CapsuleGuard IA® Handstück, gebogen	59
85913ST	CapsuleGuard® I/A Handstück, gebogen	57
85914S	CapsuleGuard IA® Handstück für 1.8 C-MICS™, gerade	59
85914ST	CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, gerade	57
85915S	CapsuleGuard IA® Handstück für1.8 C-MICS™, 45°	59
85915ST	CapsuleGuard® MICS™ I/A Handstück, 45° angewinkelte Spitze	57
100027051	Fußschalterbatterie	5
ACPi-11	Kapselspannring	35
ADAPTPRP	Akreos® Adapt	22/32
ADAPTAOPV / AO60PLC	Akreos® Adapt AO	9/22/31
B60130S	Loop Guardian™	34
AQ500G	Balanced Salt Solution 500ml Glasflasche	5/9/11
BL11145	Stellaris ELITE™ Anterior System	5
BL14455	Stellaris ELITE™ Kombiniertes System (ohneLaser)	5
BL15455	Stellaris ELITE™ Kombiniertes System (mit Laser)	5
BL2394	Integriertes Fußschalter	5
BL3118	1,8 mm Sleeves	13/18
BL3124S	2,4 mm Sleeves	12/18
BL3170	Stellaris® Phakohandstück	5
BL3190	Adapter Kit für anteriore Vitrektomie	19

Produkt Referenz

Produktname

Seite

BL3318S	MICS™ Nadel 1.8	18
BL3318AS	MICS™ Nadel 1.8 angewinkelt 30°	18
BL3420S	2.0 MICS™ Nadel	8/18
BL3420AS	2.0 MICS™ Nadel	18
BL3270	Stellaris® Fragmentationshandstück	18
BL4363	Stellaris ELITE™ Zero Level Bottle Hanger - Dual	5
BL4364	Stellaris® Mayo Tray Adapter	5
BL4391	Wandladegerät für Fußschalter	5
BL4393	Fußschalter Ladestation	5
BL4394	Netzkabel für Fußschalter	5
BL5110	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack	14
BL5111	Stellaris® Basic Vakuum Phako Pack	14
BL5112	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack	14
BL5113	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade	14
BL5113A	Stellaris® StableChamber™ Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt	14
BL5114	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, gerade	15
BL5114A	Stellaris® Premium Vakuum Phako Pack mit MICS™ Nadel, angewinkelt	15
BL5115-1	Adaptive Fluidics™ Premium Pack	12/17
BL5115-2	Adaptive Fluidics™ Standard Pack	11/17
BL5115-3	Adaptive Fluidics™ MICS™ Premium Packs	17
BL5115-4	Adaptive Fluidics™ Basic Pack	10/12/17
BL5275	Stellaris® Fragmentationsnadel 15°	5
BL5277	Stellaris® Fragmentationsnadel 30°	5
BL5612	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	21
BL5623S	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	21
BL5625S	Cutter Anterior (Stellaris Elite™Anterior & Stellaris® PC)	21
BLV3220000	Stellaris® Basic Phako Pack	15
BSS-10PK	Balanced Salt Solution 500ml Plastikflasche	5/9/11/13
CC050S / CC100SL	Viskoelastika OCUCOAT®	39
CX9400	Bananenstecker Adapter	65
CX9404	Bipolarkabel, 2-Pin-Konnektor	65
CX9430	Bipolarkabel, Lemosa Adapter	65
DP5501	2,6 mm Sleeves	18
DP5531	2,2 mm Sleeves	10/18
DP8230S	Microflow Nadel 30°	12/18
DP8245S	Microflow Nadel 45°	18
DP8330S	Microflow Plus Nadel 30°	18
DP8430S	Thin Tip Nadel 30°	18
DP8730S	Microflow Nadel 30°	18
DYE100	Färbemittel	43
DYE200	Färbemittel	09/11/13/43
DYE300	Färbemittel	43
E0570 N	Doppelspatel und Kernteiler n. Nichamin	70
E0578 L	Phako-Chopper n. Nagahara	70
E0713 G	Nukleus-Manipulator n. Koch	70
E1656	Fixierpinzette n. Lester	72
E2002 F	Kapsulorhexispinzette n. Utrata	72
E2002 GE	Kapsulorhexispinzette n. Utrata	72
E2002 R	Kapsulorhexispinzette n. Utrata	72
E3424	Augenschere, gerade, schweres Modell	68
E3842	Nadelhalter n. Barraquer	70
E4106 T	Lidsperrer n. Barraquer	68
E7925	Bipolarstift, stumpf, 2-Pin-Konnektor	64
E7927	Bipolar-Konnektor, stumpf, Lemosa-Konnektor	64
E7928	Sklera Bipolarstift, Lemosa Adapter	64
E7929 / E7930 / E7926 / E7932	Bipolarstift, angeschrägt, Lemosa Adapter	64
E7931 / E7924 / E7933	Bipolarstift, angeschrägt, 2-Pin-Konnektor	64
EYEC1NP/ EYEC1NPC	EyeCee® One / EyeCee® One Crystal	23/28
EYEFILL-SC	Viskoelastika EYEFILL®-SC.	38
EYEFILL-C-WST	Viskoelastika EYEFILL® C.	38
EYEFILL-HD-WST	Viskoelastika EYEFILL® H.D	39
EYEFILL-M	Viskoelastika EYEFILL® M.B.	38
HF600	S1 IOL	23/29
IC80USBL	IC-8™	22/26
LP7510	Tellermesser, Anschliff oben, angewinkelt	51
LP7515	Messer für Stichinzision, 15 Grad	54
LP7519	19G MVR Messer	51
LP7520	20G MVR Messer	51
LP7522	Messer für Stichinzision, 22.5 Grad	54
LP7527	Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt	51
LP7528	Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt	51
LP7530	Messer für Stichinzision, 30 Grad	54
LP7545	Messer für Stichinzision, 45 Grad	54
LP7548ADB	Phakolanze 2.2 mm, angewinkelt, Anschliff beidseitig	52
LP7549ADB	Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	52
LP7550A	Phakolanze 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7551A	Phakolanze 2.65 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7551ADB	Phakolanze 2.65 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	52
LP7552ADB	Phakolanze 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	52
LP7553A	Phakolanze 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7556A	Phakolanze 3.0 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7557A	Phakolanze 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7559A	Phakolanze 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben	52
LP7582	Trapezoides Messer, 2.85 – 3.2 mm angewinkelt	54
LP7592	Sideport Messer 1.1 mm, angewinkelt	54

Produkt Referenz	Produktname	Seite
LP7593	Sideport Messer 0.8 mm, angewinkelt	55
LP7594	Clear Corneal Messer 2.75 mm, angewinkelt	51
LP7595	Clear Corneal Messer 1.6 mm, angewinkelt	51
LP7596	Trapezoides Messer, 1,5 – 2.0 mm angewinkelt	54
LP7599	Trapezoides Messer, 1,5 – 1.7 mm angewinkelt	54
LP7600	Trapezoides Messer, 1,6 – 1.8 mm angewinkelt	54
LP7601	Trapezoides Messer, 2,0 – 2.2 mm angewinkelt	54
LP7603	Trapezoides Messer, 1,8 – 2.2 mm angewinkelt	54
M0638-02/10	Retrobulbärkanüle n. Atkinson	46
M2273B-02/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 45°, 7.5 mm	47
M2273G-02/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 35°, 5.5 mm	47
M2657-02/10	Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch	47
M2658-02/10	Selbsthaltende Vorderkammerkanüle n. Lewicky, 150 mm Silikonschlauch	47
M3000F-02/10	Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet	48
M3610S-02/10	Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz	48
M3926A-02/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft, angewinkelt 35°, 9mm	49
M4498-02/5	Infusionshandstück für schwere Flüssigkeiten	50
M9277-02/10	Tränenwegkanüle, gebogen	50
MI60P	Akreos® MICS	22/30
MXE / MXPLC / MXET	enVista® & enVista® TORIC	13/22/24
SD1273/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft	46
SD1275/10	Retrobulbärkanüle	46
SD1280/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft	46
SD1605/10	Kapselpolierer, mattierte Spitze	50
SD1610/10	Irrigationszystotomkanüle, abgerundet	48
SD1618/10	Irrigationszystotomkanüle, abgerundet	48
SD1637/10	Retrobulbärkanüle n. Atkinson	46
SD1639/10	Vorderkammerkanule n. Rycroft	46
SD2639/10	Viskokanüle, angewinkelt	49
SD3902/10	Hydrodissektionskanüle, angewinkelt, - abgeflachte Spitze	49
SD4804/10	Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet	48
SD5003/10	J-förmige Hydrodissektionskanüle	49
SD5005/10	Kapselpolierer mit Silikonspitze	50
SD5037/10	Hydrodissektionskanüle, angewinkelt	8/10/12/49
SD5042/10	Kapsulorhexis Irrigationszystotomkanüle, abgerundet, kurz	48
SD5099/10	Hydrodissektionskanüle n. Sauter, gebogen, abgefflachte Spitze, vertikal	48
SD5106/10	Irrigationskanule n. Charleux	49
SD5108/10	Peribulbärkanüle n. Atkinson	46
SD5109/10	Peribulbärkanüle n. Atkinson	46
SD5155/10	Hydrodissektionskanüle Helsinki, gebogen, abgeflachte Spitze, horizontal	48
SD5176/10	Sub-Tenon Anästhesie Kanüle	46
SE5620AV	Anteriore Vitrektomie Pack	19
SE5623AV	Anteriore Vitrektomie Pack	19
SE5623	Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)	19
SE5625	Cutter Anterior (Stellaris Elite™ Kombiniert)	19
SUB7515	Messer für Stichinzision, 15 Grad	54
SUB7522	Messer für Stichinzision, 22.5 Grad	54
SUB7528	Clear Corneal Messer 2.85 mm, angewinkelt	51
SUB7530	Messer für Stichinzision, 30 Grad	54
SUB7545	Messer für Stichinzision, 45 Grad	54
SUB7548ADB	Phakolanze 2.2 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	54
SUB7549ADB	Phakolanze 2.4 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	12/53
SUB7550A	Phakolanze 2.5 mm, angewinkelt Anschliff oben	53
SUB7559A	Phakolanze 2.75 mm, angewinkelt Anschliff oben	53
SUB7552ADB	Phakolanze 2.8 mm, angewinkelt Anschliff beidseitig	53
SUB7553A	Phakolanze 2.85 mm, angewinkelt Anschliff oben	53
SUB7557A	Phakolanze 3.2 mm, angewinkelt Anschliff oben	53
SUB7596	Trapezoides Messer, 1,5 – 2.0 mm angewinkelt	8/53
SUB7599	Trapezoides Messer, 1,5 – 1.7 mm angewinkelt	54
SUB7600	Trapezoides Messer, 1,6 – 1.8 mm angewinkelt	54
SUB7601	Trapezoides Messer, 2,0 – 2.2 mm angewinkelt	10/54
SUE01-12	Kapsulorhexispinzette	63
SUE02-12	Pinzette n. Bonn	63
SUE03-12	Fadenpinzette, gerade	63
SUE04-12	Fadenpinzette n. McPherson	63
SUE05-12	Fadenpinzette n. Pierse	63
SUE06-12	MICS™ Kapsulorhexispinzette	63
SUE07-12	MICS™ Kapsulorhexispinzette mit Markierungen	63
SUE08-12	MICS™ Kapsulorhexispinzette, Branchen gebogen	63
SUF01	Koch Stop & Chop Manipulator	62
SUF02	IOL Häkchen n. Sinsky	62
SUF03	Phako-Spatel	62
SUF04	Nukleusmanipulator n. Drysdale	62
SUF05	Y-Häkchen, horizontal	62
SUF06	Y-Häkchen, vertikal	62
SUH01	Lidsperrrer n. Barraquer	62
SUH04	Lidsperrrer mit Feststellschraube	62
SUI20-12	MICS™ Kapsulorhexispinzette, 1.0 mm	63
SUP06	ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm	61
SUP06ST	Stellaris® ZeroPhako Handstück für FLACS 2.2mm	61
TP613	Loop Keeper™	33
YSMART / YSMARTT	LuxSmart™ & LuxSmart™ toric	11/22/25
YGOOD	LuxGood™	11/23/27



	VISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 2 & 4 LASER PRODUCTS (IEC 60825-1:2007)	Aiming beam: Class 2, $\lambda = 635$ nm 1 mW CW (max) Treatment beam: Class 4, $\lambda = 532$ nm 2W CW (max)
	Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007	
		015000642 / 4104600

 Bausch & Lomb
Incorporated
Rochester, NY 14609, USA

 Bausch & Lomb GmbH
Lilienthalstraße 16,18
69214 Eppelheim, Germany

 Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm 165 - 173
13581 Berlin, Germany

Deutschland

Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 58 93 114
www.bausch-lomb.de/surgical

kontakt-surgical@bausch.com

www.discoverstellariselite.com

Österreich

Bausch & Lomb GmbH
Tel.: 0800 241 015
www.bausch-lomb.at/surgical

Schweiz

Bausch & Lomb Swiss AG
Tel.: 0848 228 724
www.bausch-lomb.ch/surgical

 Bausch + Lomb Surgical DACH